

Костыли опорные и стойки 540; 380-03; 376; 377; 378; 541*

Этикетка

540ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Назначение изделий

Костыли предназначены для дополнительной опоры при ходьбе людям с ограничениями жизнедеятельности массой до 100 кг.

Костыли, предназначенные для эксплуатации в зимнее время, имеют устройство против скольжения (УПС), снабженное кулачком для открытия и закрытия стержня.

В соответствии с общим назначением костыли делятся: для взрослых, подростков и детей, смотри таблицу А.1 приложения.

Стойка 541 предназначена для замены нижней стойки в костылях 540, 380-03 при ремонте и эксплуатации в зимнее время.

1.2 Техническая характеристика

Костыли опорные изготавливаются раздвижными с диапазоном регулирования:

- для взрослых 1170-1345 мм; 1260-1435 мм – шаг регулирования 35 мм;
- для подростков 980-1225 мм – шаг регулирования 35 мм;
- для детей 828-968 мм – шаг регулирования 35 мм;
- для малышей 650-810 мм – шаг регулирования 20 мм.

1.3 Комплект поставки:**

Костыль металлический _____ 1 пара.

обозначение

Стойка _____ 1 шт.

металлическая или деревянная обозначение

Этикетка 540 ЭТ _____ 1 шт.

1.4 Требования по эксплуатации и указания мер безопасности

1.4.1 Подготовка к эксплуатации раздвижных костылей

Раскрутить гайки с винтами на нижней стойке, вынуть винты, раздвинуть костыль до нужной высоты, совместив отверстия на боковых и нижней стойках, зафиксировать это положение винтами с гайками.

Для изменения положения ручки раскрутить гайку, вынуть винт, установить в новое положение ручку, зафиксировав ее винтом с гайкой.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации изделий с УПС на мраморном и ему подобном полу – УПС следует отключить, так чтобы кулачок занял верхнее положение, а острие стержня спряталось в резиновый наконечник.

2 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

2.1 Средний срок службы – 4 года.

2.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

2.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.


2.4 Гарантии изготовителя

2.4.1 Изготовитель гарантирует соответствие костылей и стоек требованиям

ТУ 92.9698110.006-92 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

* При заполнении этикетки нужно отметить.

** Заполняется при упаковке изделия.

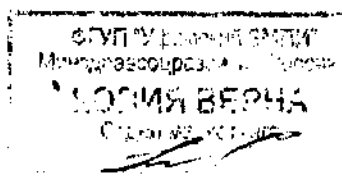

ДИРЕКТОР
С.В. ФОМИЧЕВ

3 Свидетельство о приёмке

3.1 Костыли и стойки изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признаны годными для эксплуатации.

М.П. _____ «___» _____ 200 г.

(Подпись лица, ответственного за приемку, штамп ОТК)

Дата продажи _____

(Подпись лица реализующего продукцию)

4 Хранение

Костыли и стойки должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%.

Замечания и предложения по качеству костылей и стоек направляйте по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Высоковольтная, 6
ФГУП «Уфимский ЗМП» Минздравсоцразвития России.

Приложение А (обязательное)

Перечень костылей опорных и стоек

Таблица А.1

Наименование	Обозначение
1 Костыль металлический для взрослых	540
2 Костыль металлический с устройством против скольжения	380-03
3 Костыль металлический подростковый	378
4 Костыль металлический детский	377
5 Костыль металлический малышовой	376
6 Стойка металлическая с устройством против скольжения	541

Всего прошнуровано и
скреплено
печатью _____ лист

Подпись _____

