

тью ООО

Ю « ПАРАМЕД »

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «ПАРАМЕД»
М.А.Пасынков
2010 г.

A circular stamp of ZAO "PARAMED" is located in the upper right quadrant. The stamp contains the text "ЗАО ПАРАМЕД" around the perimeter and "ПАРАМЕД" in the center. A handwritten signature is written across the stamp.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

«Повязки давящие ДЖЕТПУЛЛ 2, ДЖЕТПУЛЛ Ультимейт, Джетпулл ПРО»
производства: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, 65232
Taunusstein, Germany/
(наименование изделия медицинского назначения)

2010 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязки давящие ДЖЕТПУЛЛ 2, ДЖЕТПУЛЛ Ультимейт, Джетпулл ПРО с зажимным устройством, регулирующим силу компрессии, предназначены для остановки венозного кровотока с целью облегчения пункции вены при внутривенных инъекциях или взятии крови в условиях учреждений здравоохранения, формированиях гражданской обороны, при оказании скорой медицинской помощи, где в ходе лечебно-диагностического процесса проводится взятие крови у взрослого населения, подростков и детей старше трех лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Повязки давящие ДЖЕТПУЛЛ 2, ДЖЕТПУЛЛ Ультимейт, Джетпулл ПРО предназначены для облегчения пункции вены при внутривенных инъекциях или взятии крови.

Повязки давяще состоят из резиноканевой ленты с наконечником, замка и безопасной защелки.

Лента:

- ширина, см 2,4 ;
- длина, см 49,5;
- материал ленты – полиамид 65 % и резина 35%;
- максимальное растяжение 90% от длины жгута.

Замок, защелка, наконечник изготовлены из ударопрочного медицинского полистирола.

Масса жгута, г – 35.

С целью удаления белковых, жировых, механических загрязнений повязки обрабатывают методом погружения в дезинфицирующий раствор, разрешенный для обработки изделий медицинского назначения из полимерных

материалов в соответствии с МУ 287-113-98.


Изделие периодически подвергают стерилизации. Повязки автоклавируют при температуре 121⁰С и давлении 2 атм. в течение 20 мин.

3. Противопоказания к применению

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про не имеют противопоказаний к применению кроме индивидуальной непереносимости материалов, из которых изготовлены повязки. Но кратковременное взаимодействие с кожей человека позволяет использовать их даже при особо чувствительной коже.

Нельзя накладывать повязку на кожу с синяками, ссадинами или порезами, т. к. появляется возможность еще большего травмирования кожных покровов и тканей организма.

4. Подготовка повязок давящих к работе

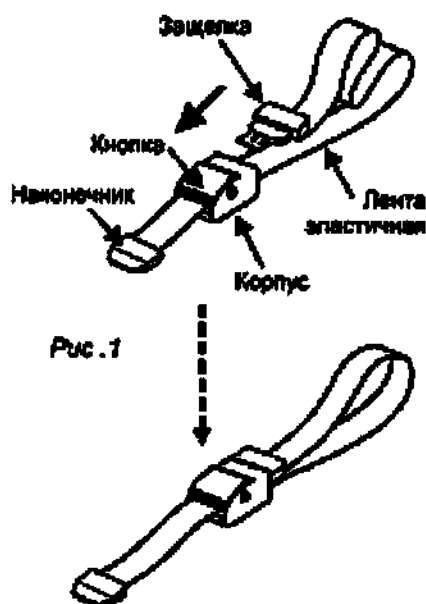

Повязки давящие перед началом применения проверяют работу зажимного устройства, внешнее состояние эластичной ленты, которая должна быть целостной, без повреждений, без следов фармацевтических препаратов, крови и других биологических жидкостей.

При необходимости жгут подлежит дезинфекции и стерилизации.

С целью удаления белковых, жировых, механических загрязнений повязки обрабатывают методом погружения в дезинфицирующий раствор, разрешенный для обработки изделий медицинского назначения из полимерных материалов в соответствии с МУ 287-113-98.

Изделие периодически подвергают стерилизации. Повязки автоклавируют при температуре 121⁰С и давлении 2 атм. в течение 20 мин.

5. Порядок работы повязок давящих

Для проведения необходимых манипуляций с помощью повязок давящих «Джетпулл 2», «Джетпулл Ультимейт», «Джетпулл Про» выполнить следующее:

1. Обернуть ленту эластичную вокруг конечности, выше места венепункции (или раны), не допуская ее перекручивания, и вставить защелку в корпус жгута;
2. Необходимое сжатие для ограничения циркуляции крови в конечности достигается натягиванием свободного конца ленты с наконечником;
ВНИМАНИЕ! Не тянуть за наконечник во избежание его отрыва.
3. Для высвобождения эластичной ленты нажать кнопки для ослабления сжатия;
4. После проведения необходимых манипуляций нажать кнопки для полного освобождения ленты и освободить защелку.

6. Правила хранения и использования

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл ПРО следует хранить в упакованном виде в складском помещении при температуре от 0°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении и использовании изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, от механических воздействий, способных повредить эластичную ленту и полимерный замок, а также не должны подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ разрушающих полимерные изделия.

Хранить в недоступном для детей месте.


4 листа
Прошито и скреплено печатью



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПАРАМЕД»

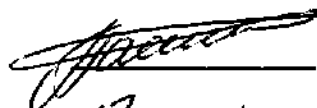

М.А.Пасынков

17 ноября

2010 г.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про
производства: HOLTSCHE Medizinprodukte GmbH, In den Faltern 13, 65232
Taunusstein, Germany/ ХОЛЬТШ Медицинпродукт ГмбХ, Ин ден Фалтерн
13, 65232 Таунусштайн, Германия

(Наименование изделия с указанием комплектации)

производства фирмы

1 Назначение и использование

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про предназначены для остановки венозного кровотока с целью облегчения пункции вены при внутривенных инъекциях или взятии крови.

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про применяются в условиях больниц, станций скорой помощи, станций переливания крови, формированиях гражданской обороны, при оказании скорой медицинской помощи, где в ходе лечебно-диагностического процесса проводится взятие крови путем венепункции у взрослого населения, подростков и детей старше трех лет или внутривенные введения препаратов.

2 Описание и работа

Повязки давящие представляют собой резинотканевую ленту шириной 2, 4 см и длиной 49, 5 см, с полистирольным наконечником, замком и защелкой. Максимальное растяжение повязки -90 % от длины повязки. Повязка весит менее 35 г.

Многоразовые повязки (жгуты) снабжены удобным механизмом, позволяющим одной рукой зафиксировать повязку, ослабить или расстегнуть ее.

Схема использования давящей повязки:

1 этап



Рис. 1 Обернуть жгут вокруг руки, не допуская перекручивания ленты и вставить защелку в корпус жгута.

2 этап

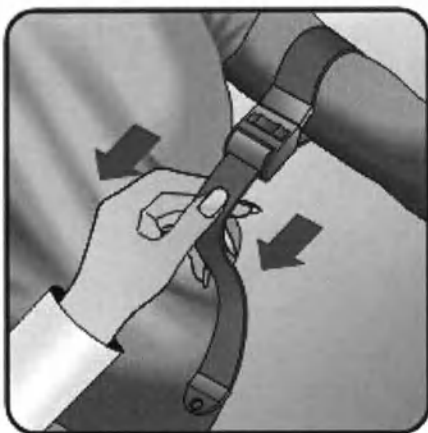


Рис. 2 Потянуть за свободный конец жгута с усилием для ограничения циркуляции крови.

Внимание! Во избежание использования жгута не по назначению конструкция жгута рассчитана только на усилие достаточное для ограничения циркуляции крови. При возникновении большего усилия защелка автоматически покидает корпус жгута.

3 этап



Рис. 3 Для ослабления петли нажать:

- у «Джетпулл 2» на большую кнопку, находящуюся на корпусе замка ближе к защелке;

- у «Джетпулл Ультимейт» на 2 кнопки, находящиеся по обе стороны замка;
- у «Джетпулл Про» слегка нажать на большую кнопку с защелкой.

4 этап



Рис. 4 Для освобождения ленты после проведения манипуляций нажать

- у «Джетпулл 2» на 2 кнопки, находящиеся по обе стороны замка;
- у «Джетпулл Ультимейт» на 2 кнопки, находящиеся по обе стороны замка
- у «Джетпулл Про» на большую кнопку с защелкой с большим усилием, чем для ослабления давления.

3. Требования к персоналу

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про просты, надежны и удобны в эксплуатации. Благодаря различной конструкции замков, каждый медицинский работник может выбрать для себя эргономичную в использовании повязку. Эксплуатация повязки не требует специального обучения персонала.

Для удаления незначительных загрязнений повязки моют мылом или любым моющим средством. С целью удаления белковых, жировых загрязнений повязки дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор, разрешенный для обработки изделий медицинского назначения в соответствии с МУ 287-113-98.

Изделие периодически подвергают стерилизации. Повязки давящие автоклавируют при температуре 121 градус Цельсия и давлении 2 атм в течение 20 минут.

4. Условия хранения

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про следует хранить в упакованном виде в складском помещении при температуре от 0°C до +25°C и относительной влажности воздуха не выше 80% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. При хранении изделия должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении повязки давящие не должны подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ разрушающих полимерные изделия. Хранить в недоступном для детей месте.

5. Условия транспортирования

Повязки давящие Джетпулл 2, Джетпулл Ультимейт, Джетпулл Про транспортируют транспортом всех видов: авиа, железнодорожным, автомобильным в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от 0 °C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

6. Утилизация

Повязки давящие не требуют особых способов утилизации и утилизируются как бытовой мусор.

Генеральный директор
ООО «ПАРАМЕД»



М.А.Пасынков

5м 606
Прошито и скреплено не

Генеральный директор О
Владимир Сычков

