

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Росздравнадзора

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2011



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Диалоджик»

Работаев Д. Е.

2011 г.

## **Инструкция по использованию перчаток медицинских «DiaMedical»**

Перчатки медицинские «DiaMedical» изготовлены из материалов, разрешенных для применения в клинической практике. Перчатки предварительно припудрены кукурузным крахмалом медицинского сорта (биоабсорбируемый порошок фармацевтической чистоты). Количество порошка на перчатках тщательно контролируется для обеспечения требуемой консистенции.

Перчатки медицинские «DiaMedical» выпускаются в соответствии со стандартами:

ISO 9001:2000

ISO 13485:2003

US FDA 510(K)

ASTM

CEN

### **Перчатки медицинские «DiaMedical» опудренные и неопудренные**

#### **Описание и состав изделия**

Перчатки медицинские «DiaMedical» изготовлены из натурального или синтетического латекса, опудренные перчатки припудрены кукурузным крахмалом. Перчатки имеют неанатомическую форму, микротекстурированную поверхность и длину не менее 240 мм. Выпускаются следующих типоразмеров:

хирургические перчатки - 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 и 9,0;

смотровые перчатки – XS; S; M; L; XL.

Перчатки используются однократно, их повторное использование запрещено.

#### **Область применения**

Перчатки медицинские нестерильные «DiaMedical» латексные используются во всех областях медицинской практики. Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования в работе с заражёнными медицинскими материалами.

#### **Способ применения**

Перчатки следует использовать не позднее даты, указанной на упаковке. Для использования перчатки извлекаются из упаковки, одевают на чисто вымытые сухие руки, визуально проверяют их целостность.

С опудренных перчаток перед использованием следует удалить опудривающие вещества влажной губкой, салфеткой или другим эффективным методом.

После использования снять с рук и поместить в специальный контейнер для транспортировки использованных медицинского инструментария и материалов. Перчатки следует оберегать от механических повреждений.

#### **Противопоказания**

Кожные аллергические заболевания, повышенную чувствительность к латексу.

#### **Побочные действия**

Возможно появление аллергической реакции на натуральный латекс.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, прохладном помещении при температуре не выше 35°C. Вскрытая коробка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, флуоресцентного света, рентгеновских лучей, озона и влаги.

**Срок годности**

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

**Примечание.**

Латексные перчатки являются отличным биологическим барьером, но не защищают от агрессивных химических веществ.

**Изготовитель:** DIAMEDICAL Ltd., Suk 205, 58 Queensway, London W2 3RW (Великобритания)

**Завод:** Terang Nusa Sdn. Bhd., 1, Jalan 8, Pengkalen Chepa 2, Industrial Zone, 16100

Kota Bharu, Kelantan (Малайзия)

**Завод:** Innovativegloves Co., Ltd., 830 Moo 4 Sanambin-Ban Klang Road, Kuanalang, Hatyai, Songkhla 90110 (Таиланд)

2 листа

