



т. 8 499 705 03 75
WWW.TESTGEN.RU
e-mail: info@testgen.ru

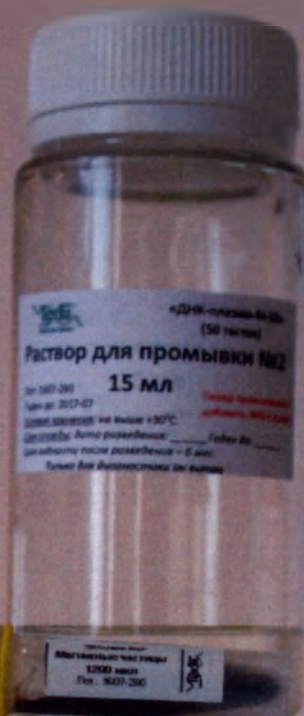

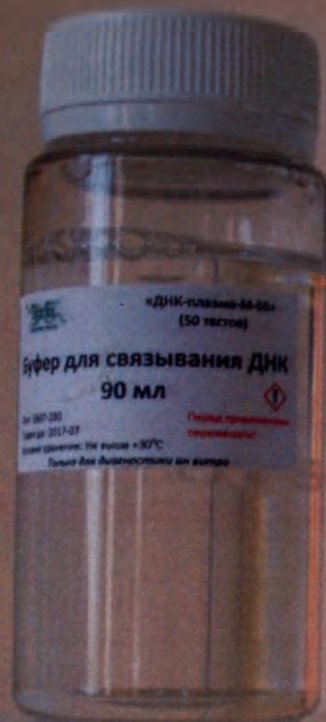



Г Е Н Е Т И К А
Н О В О Г О П О К О Л Е Н И Я



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из плазмы
крови «ДНК-ПЛАЗМА-М»
на 50 или 100 анализов

ТУ 9396-002-97638376-2015


Версия 1 от 22.07.2016



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 3
Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот
из плазмы крови
«ДНК-ПЛАЗМА-М-50»


Номер доку	
Количество наборов в серии	1607-200
Дата изготовления	4
Срок годности	24.07.2016
Условия хранения	до 29.07.2017
	На холоде +30 °C

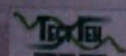

ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 4
Набор реагентов для выделения
нуклеиновых кислот
из плазмы крови
«ДНК-Плазма-М-100»

Номер документа	1607-281
Количество наборов в партии	2
Дата изготовления	26.07.2016
Срок годности	до 07.07.2017
Условия хранения	Не выше +10 °C

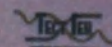

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из плазмы крови «ДНК-ПЛАЗМА-М»
на 50 или 100 выделений

ТУ 9398-002-97638376-2015

Набор реагентов для выделения нуклеиновых
кислот из плазмы крови
«ДНК-Плазма-М-50»
(50 выделений)

TU 9398-002-97638376-2015

 1607-280

 2016-07

 2017-07

 50

 Не выше +30°C



Состав набора:

Буфер для связывания ДНК	1 флакон, 90 мл
Раствор для промывки №1	1 флакон, 30 мл
Раствор для промывки №2	1 флакон, 15 мл
Протеиназа К	1 флакон, 50 мг
Раствор для разведения протеиназы К	1 флакон, 2,5 мл
Магнитные частицы	1 пробирка, 1,2 мл
Элюент	1 флакон, 5 мл



РЗН ____/____

Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения



Набор реагентов для выделения нуклеиновых
кислот из плазмы крови
«ДНК-Плазма-М-100»
(100 выделений)



TU 9398-002-97638376-2015



1607-281



2016-07



2017-07



100



Не выше +30°C



Состав набора:

Буфер для связывания ДНК 2 флакона, по 90 мл

Раствор для промывки №1 1 флакон, 60 мл

Раствор для промывки №2 2 флакона, по 15 мл

Протеиназа К 1 флакон, 100 мг

Раствор для разведения 1 флакон, 5 мл

протеиназы К

Магнитные частицы 2 пробирки, по 1,2 мл

Элюент 1 флакон, 10 мл



РЗН ____/____

Только для *in vitro* диагностики
Только для профессионального применения





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) листов
Должность: ген. директор
Тороповский А.Н.