



Инструкция по применению

Одежда медицинская одноразовая

Описание изделия

Одежда медицинская одноразовая производится из безворсовых тканей, что исключает вероятность попадания в организм частиц, способных вызвать негативную реакцию.

Изделия из специального полиэтилена, латекса, медицинских тканей антистатичны, обладают антисептическими свойствами, не впитывают грязь и не выделяют вредных веществ.

Медицинская одежда может быть изготовлена на тканевой основе или из полимерных материалов.

Специальная обработка одноразовой одежды из таких материалов обеспечивает абсолютную стерильность.

современные медицинские материалы обеспечивают хорошую воздухопроницаемость и химическую стойкость.

Кислото-щелоче защитные качества одноразовой одежды для медиков позволяют безопасно работать со специальными медицинскими препаратами.

Параметры	Описание
Внешний вид	Белый, желтый, синий, нетканый материал, пленка или марля
Упаковка	Пакет «бумага / бумага» или «бумага / пленка»
Статус стерильности	Нестерильный или стерильный
Рабочие характеристики	Защита от пыли, микроорганизмов и т.д.

Назначение изделия

Специальная одноразовая медицинская одежда для работников и одноразовое белье предназначены, в первую очередь, для снижения операционных рисков инфицирования и занесения вредных бактерий в организм. Использование специальной одноразовой одежды в медицине обязательно, а применяемые для ее изготовления материалы утверждаются едиными стандартами. Применяют для снижения вероятности распространения инфекции среди пациентов и персонала, для облегчения медицинского осмотра.

Перечень изделий:

1. Изолирующий халат (Isolationgown) применяют как средство индивидуальной защиты с целью изолирования или при проведении потенциально «грязных» процедур.
2. Халат для пациента (Patientgown) применяют для снижения вероятности распространения инфекции среди пациентов и персонала, для облегчения медицинского осмотра.
3. Халат для посетителей (Visitorgown) применяют для предотвращения инфицирования пациента и посетителя за пределами операционного зала.
4. Хирургический халат (Surgicalgown) предназначен для ношения персоналом операционного зала при проведении хирургических процедур для защиты врача и окружающего персонала от переноса микроорганизмов, жидкостей организма и инородного материала.
5. Шапочку (Caps) используют как средство индивидуальной защиты; она предохраняет голову врача от попадания раневых экссудатов и выпадения волос.
6. Лицевые маски (Facemask) используют для обеспечения оптимального улавливания бактерий, что позволяет снизить риск инфицирования путем минимизации вероятности переноса бактерий от персонала в окружающую среду операционной комнаты.
7. Нарукавники (Sleeves) применяют как средство индивидуальной защиты; они защищают руки врача от воздействия раневых экссудатов.
8. Фартук (Aprons) применяют для предотвращения распространения микроорганизмов от одного пациента другому, защищают клиническое оборудование и кожу пациента от загрязнения.
9. Бахилы (Shoe covers) используют для временного хранения грязной обуви при вхождении в изолированное помещение или операционную комнату.
10. Комбинезон (Coverall) используют для обеспечения повышенной индивидуальной защиты от опасного материала, потенциально опасных химических веществ и эпидемических агентов.
11. Марлевая лицевая маска (Gauze face mask) применяется для обеспечения оптимального улавливания бактерий, что позволяет снизить риск инфицирования путем минимизации вероятности переноса бактерий от персонала в окружающую среду операционной комнаты.

Winner WINNER MEDICAL

Упаковка:

Одежда медицинская одноразовая упакована в полимерную герметичную упаковку.

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки/хранения и гарантирует удобство погрузочно-разгрузочных работ.

