

Инструкция по применению

**Повязки стерильные, адгезивные и неадгезивные
из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов**

Описание изделия

Повязки стерильные, адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов служат для защиты от вторичной инфекции и других внешних влияний, а также для остановки кровотечения, подсушивания ран при хирургических операциях и иммобилизации органов и тканей.

К таким изделиям предъявляют общие требования. Они должны:

- 1) быть мягкими, но не хрупкими;
- 2) гигроскопичны;
- 3) владеть хорошей капиллярностью и смачиваемостью;
- 4) иметь нейтральную реакцию и быть нейтральными по отношению к организму;
- 5) иметь определенный процент влажности;
- 6) надежно стерилизоваться, одним из способов стерилизации, не изменяя своих свойств.

Гигроскопическая прокладка изготовлена из древесной целлюлозы, древесной целлюлозы, покрытой целлюлозной бумагой, синей тканью и синей ПЭ пленкой, лежащей в основе данного изделия. Изделие завернуто в нетканый материал, упакованный с помощью термокля. На обоих концах изделия присутствует нетканый материал. Данное изделие представляет собой нелипкую гигроскопическую прокладку, обеспечивающую отличное поглощение экссудатов, защиты области вокруг раны.

Марлевый комбинированный перевязочный материал представляет собой перевязочный материал для раны, который состоит из высоко гигроскопичного толстого слоя хлопка, вложенного в мягкую и удобную марлю. Марля сложена таким образом, чтобы достигалась ровная лицевая поверхность. Данный материал мягкий, удобный и воздухопроницаемый, имеет высокую поглощающую способность.

Повязка для глаза представляет собой перевязочный материал, который изготовлен из 100% хлопка, покрытого нетканым материалом / марлей. Данный материал характеризуется высокой воздухопроницаемостью. Его форма специально спроектирована для перевязки глаза, его можно использовать для защиты глаз после выполнения операции на них. Процесс производства строго контролируется для обеспечения чистоты материала.

Перечень изделий:

- 1 Повязка абсорбирующая (Absorbent pad)
- 2 Повязка комбинированная из хлопчатобумажного материала (Gauze combinedressing)
- 3 Повязка комбинированная из нетканного материала (combine dressing)
- 4 Повязка адгезивная из нетканного материала (Non-woven adhesive wound dressing)
- 5 Повязка неадгезивная абсорбирующая из нетканного материала (Non-adherent absorbent pad)
- 6 Повязка прозрачная адгезивная из синтетического материала (Transparent dressing)
- 7 Повязка прозрачная адгезивная защитная из синтетического материала (Transparent island dressing)
- 8 Повязка неадгезивная из синтетического материала (PE finger bandage)
- 9 Повязка адгезивная защитная из синтетического материала (Adhesive wound strip)
- 10 Повязка неадгезивная глазная из хлопчатобумажного материала (Eye pad)
- 11 Повязка неадгезивная глазная из нетканного материала (Eye pad)
- 12 Повязка адгезивная глазная из хлопчатобумажного материала (Eye pad)
- 13 Повязка адгезивная глазная из нетканного материала (Eye pad)

Назначение

- Влагонепроницаемая, позволяет принимать душ или ванну
- Бактерионепроницаемая
- Микропористая основа обеспечивает воздухо- и влагообмен, тем самым не вызывает мацерацию кожи.
- С атравматичной абсорбирующей подушечкой
- Простое наложение с помощью рамки и надежная фиксация
- Гипоаллергенная
- Стерильная

Преимущества:

- Проста в использовании
- Уникальная система наложения с помощью рамки обеспечивает закрепление, помогая точно разместить повязку, предотвращает слипание и натяжение повязки, что снижает опасность травмирования кожи
- Способствует созданию благоприятной влажной среды, ускоряя процесс заживления раны
- Безболезненное удаление повязки
- Прозрачная повязка позволяет следить за степенью абсорбции впитывающей подушечки.
- Пластичная повязка принимает любую форму, подходит для наложения на все части тела и не стесняет движений пациента.
- Изготовлена на основе полиуретановой плёнки, покрытой акрилатным гипоаллергенным адгезивом, с атравматичной абсорбирующей подушечкой, выполненной из вискозы.

Показания к применению:

- Для послеоперационной обработки ран со слабой или умеренной степенью экссудации
- Подходит для фиксации медицинских устройств (катетеры, датчики, дренажные трубки и т.д.).
- Повязку можно оставлять до 5 дней в зависимости от состояния раны.

Техника наложения повязок стерильных, адгезивных и неадгезивных из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов:

- Обработать рану.
- Тщательно высушить рану и прилегающий к ней участок кожи стерильным тампоном.
- Наложение повязки согласно схеме: Взять повязку пальцами за специальный выступ для удерживания.
 - А. Отклеить бумажную центральную часть повязки.
 - В. Отклеить бумажную заднюю адгезивную часть повязки.
 - С. Наклеить повязку на рану или устройство, которое необходимо закрепить, не растягивая повязку. Слегка прижать поверхность повязки для лучшего прилипания.
 - Д. Медленно и аккуратно снять бумажную рамку на повязке. Разгладьте повязку от центра к краям для лучшего прилегания и адгезии.
- Удаление повязки: Приподнять край повязки и легко потянуть ее. Данный способ снятия повязки путем растяжения является безболезненным и сокращает риск раздражения кожи при частой смене повязки.

Техника наложения глазных повязок

- Повязки из бинтов шириной 6-7 см применяют в основном после удаления глазного яблока или операции в области орбиты. Повязка должна быть плотной, но у больного не должно быть чувства давления на глаз или стягивания под ухом. Повязка может накладываться на один глаз (монокулярная повязка) и на оба глаза (бинокулярная повязка).
- При наложении повязки на глаз вначале на закрытые веки помещают ватно-марлевую подушечку. Конец бинта медицинская сестра придерживает левой рукой у мочки уха на стороне больного глаза. Ватно-марлевую повязку фиксируют бинтом вокруг лба так, чтобы ход бинта был направлен в сторону здорового глаза. Затем проводят бинт под ухом со стороны больного глаза кверху, через глаз, покрывают подушечку главным образом с носовой стороны, затем по затылку и опять ведут бинт под мочку уха. Таких оборотов нужно сделать 4-5, последний тур бинта проводят вокруг лба и заканчивают повязку сбоку на противоположной стороне от больного глаза.
- В остальных случаях при необходимости повязки в настоящее время вместо бинтов применяют ватно-марлевые подушечки, которые укрепляют пластырем шириной 1 см.

Меры предосторожности

Необходимо убедиться в том, что упаковка продукции герметична, бинт / липкая лента не имеют дефектов, которые отличают их от других изделий.

Если сила упругости слишком велика, необходимо поместить под повязку мягкий материал.

Упаковка:

Повязки стерильные, адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов соответствуют требованиям международных стандартов.

Производство повязок стерильных, адгезивных и неадгезивных из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов соответствует требованиям системы управления качеством ISO 13485:2003.

Повязки стерильные, адгезивные и неадгезивные из хлопчатобумажного и синтетического нетканого материалов фасуется в полимерную герметичную емкость.

Упаковка обеспечивает защиту изделия от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки/хранения и гарантирует удобство погрузочно-разгрузочных работ.

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
8 ЛИСТА (ОВ)

