



Общество с ограниченной ответственностью

«НЕОМЕД»

195269, Санкт-Петербург, Учительская улица, дом 23

тел./факс: (812) 329-15-16

ИНСТРУКЦИЯ

по применению

«Тампоны кровоостанавливающие носовые впитывающие, одноразовые, стерильные ТН-«НЕОМЕД»

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Для остановки носового кровотечения после травм, оперативных вмешательств, при заболеваниях слизистой оболочки полости носа, спонтанных носовых кровотечениях и т.д.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тампон для носовой полости состоит из (из расчёта на 1г веса изделия): коллагена (субстанции- раствора 2%)- 0,98г сухого коллагена, нитрофурана (фурацилина)- 0,0075г, борной кислоты- 0,0125г (из расчета на 1г).

Размер тампона: 90 x 25мм (± 5 мм), 45 x 20мм (± 5 мм), с обработкой краев прошиванием синтетическим шовным материалом.

Вес тампона составляет: 0,2 г $\pm 0,01$ г при размерах 90 x 25мм и 0,1 г $\pm 0,01$ г при размерах 45 x 20мм.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Возможна индивидуальная непереносимость компонентов тампона.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Тампоны находятся в стерильной среде в пакете. При вскрытии пакета извлекают тампон.


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

При помощи пинцета в носовой ход вставляют тампон. Последний пропитывается кровью и слизью в полости носа, увеличивается в размерах, плотно прижимая кровоточащие поверхности. Фиксирующие нити наматывают на ватный шарик и вставляют в преддверие носа. Тампон в полости носа оставляют на 1-2-3 суток, в зависимости от интенсивности кровотечения и объема раневой поверхности.

Тампон пропитывается кровью и приобретает физиологические формы полости носа.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 10 до 30 гр С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

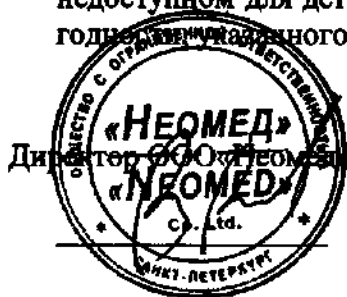

В.Д. Воеводенко