


Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Мед»

Хусаинов М.Д.

« 7 » июня

2016 г.

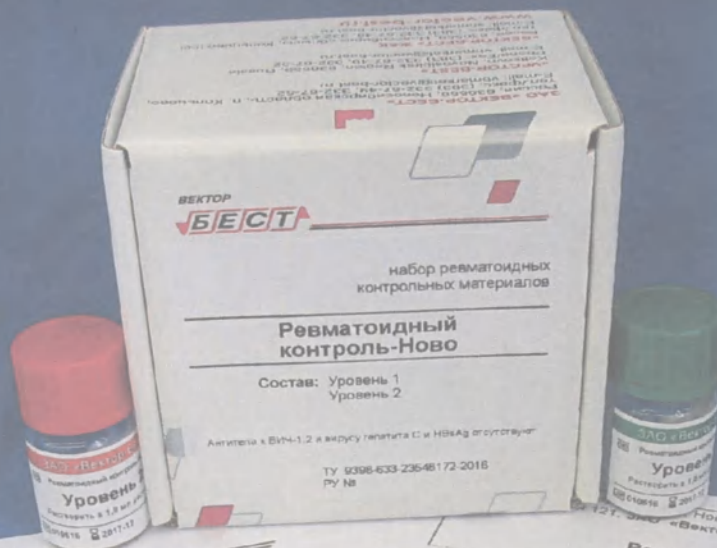

ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ
к изменению набора ревматоидных контрольных материалов
(Ревматоидный контроль-Ново)

4.2. При работе с исследуемыми следует соблюдать меры по безопасности при работе с биологическими материалами. «Инструкция...

4.2. При работе с исследуемыми образцами следует соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с потенциально инфекционным материалом. Основные правила работы изложены в «Инструкции по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений», утвержденной Минздравом СССР 17 января 1991 г. и в методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения, утв. Департаментом госсанэпиднадзора Минздрава РФ от 30.12.1998 г.).

4.3. При работе с набором следует надевать резиновые перчатки или пластиковые перчатки, избегать контакта с кровью, слюной, мочой, фекалиями, потением.

Новосибирский р-н,
«Вектор-Бест»
ПАСПОРТ № 1
Ревматоидный контроль-Ново
Набор ревматоидных контрольных мате
ТУ 9308-633-23548172-2016

Tel. (383) 227-67-84,
227-75-50, 332-32-32

Tel./fax:
E-mail: ybo

Номер серии 010616


Дата изготовления	010616
Дата выдачи паспорта	Июнь 2016
Срок годности наборов до	07.06.2016
	Декабрь 20

Характеристика и нормы	Результат
Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фл	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фл
Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фл	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фл

Директор
ЗАО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«6» июля 2016 г.

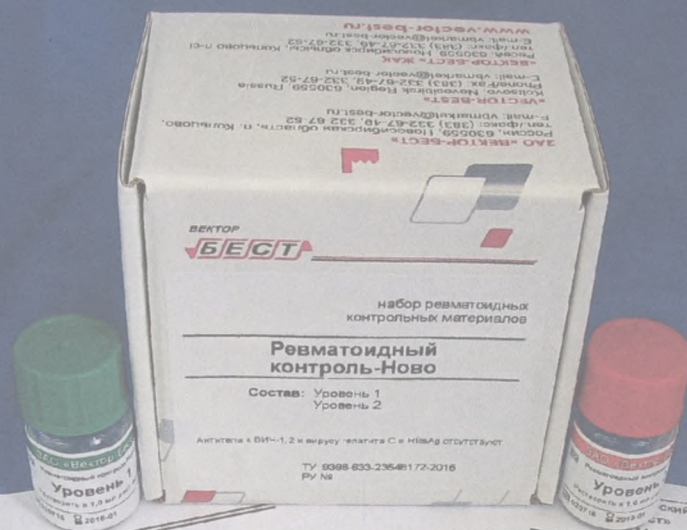

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора ревматоидных контрольных материалов
(Ревматоидный контроль-Ново)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.
Набор ревматоидных контрольных материалов «Ревматоидный контроль-Ново» (далее – набор) предназначен для внутрилабораторного контроля при определении концентрации С-белка (СРБ) наборами «С-белок-Ново (латекс)» и «СРБ-Ново» ЗАО «Вектор-Бест» (РФ) и ревматоидного фактора (РФ) «Вектор-Бест» (АСО) и ревматоидного фактора (латекс) «Вектор-Бест» (АСО).

4.2. При работе с исследуемыми образцами следует соблюдать меры предосторожности, принятые при работе с потенциально инфекционным материалом. Основные правила работы изложены в «Инструкции по мерам профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в клинико-диагностических лабораториях Минздрава СССР 17 января 1991 г. и в методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения», утв. департаментом госсанэпиднадзора Минздрава РФ от 30.12.1998 г.).

4.3. При работе с набором следует надевать резиновые или пластиковые перчатки, обрабатывать образцы крови человека как потенциально опасный материал.

ПАСПОРТ № 2
Набор ревматоидных контрольных материалов
У 9998-633-23548172-2016

Тел: (383) 227-67-64, 227-75-60, 332-37-58
Тел: (383) 362-13-49
E-mail: vbest@vbest.ru

Номер серии 029716
Дата изготовления Июль 2016
Дата выдачи паспорта 06.07.2016
Срок годности наборов до Января 2018

показателя	Характеристика и нормы	Результаты контроля
Уровень 1, серия	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фла	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета (соответствует)
Уровень 2, серия	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета, 1 фла	Лиофилизированная масса светло-желтого цвета (соответствует)

термостойкость
Уровень 1
Уровень 2

20



Сформулировано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 листов

[Handwritten signature]