


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Онтэкс РУ»


Б.М.Булади
_____ 200__ г.

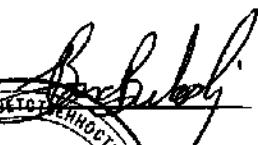

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Впитывающие простыни «EURON SOFT».

1. Перед применением впитывающих простыней необходимо провести предварительное очищение кожного покрова пациента. Это предотвратит развитие пролежней, опрелостей, сыпи, инфекции мочевыводящей системы.
2. После очищения кожного покрова, необходимо открыть простынь.
3. Развернуть впитывающую простынь.
4. Расстелить ее под поясничную и ягодичную область пациента целлюлозной впитывающей поверхностью вверх.
5. Попросить повернуться пациента самому на бок, если он в состоянии, или повернуть его на бок самому.
6. Разгладить поверхность пеленки, чтобы не было складок - это предотвратит развитие пролежней.
7. Впитывающую простынь следует менять по мере ее загрязнения и после каждого опорожнения кишечника.