

ФГУП «Тамбовское ПрОП»  
Минздравсоцразвития России

**Памятка по пользованию**  
**Протез грудной (молочной) железы ПГЖ**

Тамбов 2011



В.А. Селин

## **1. Описание конструкции**

Протез грудной (молочной) железы ПГЖ (далее – протез) предназначен для компенсации послеоперационного дефекта и восстановления симметрии туловища у женщин, перенесших мастэктомию.

Протез включает в себя:

- экзопротез грудной (молочной) железы ЭПМЖ (далее – экзопротез) – симметричной и ассиметричной формы – «правого (П)» и левого (Л) исполнения;
- чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный (ЧТ);
- одежду для женщин при мастэктомии – бюстгальтер ЛФ (далее – одежда).

Установленный срок службы протеза не менее одного года. Установленный срок службы одежды, по настоящим техническим условиям, не менее трех месяцев. Срок сохраняемости протеза регламентируется сроком хранения экзопротеза и одежды на складе готовой продукции, указанным в технических условиях на конкретную продукцию. Срок сохраняемости одежды по настоящим техническим условиям не более шести месяцев.

## **2. Применение протеза грудной (молочной) железы ПГЖ**

Экзопротез со съемным чехлом вставляется в бюстгальтер со специальным клапаном.

Бюстгальтер правильно подобран по размеру пациента. С протезом можно принимать ванную и заниматься плаванием в морской воде.

## **3. Уход за протезом и его хранения**

Экзопротез следует ежедневно промывать не менее 2,5 минут теплым мыльным раствором детского мыла и просушивать полотенцем или салфеткой.

После плавания в морской воде или хлорированной воде нужно незамедлительно промыть экзопротез в теплой воде с детским мылом.

При использовании экзопротеза следует избегать острых и колющих предметов (броши, перстни, пилочки для ногтей, когти животных и т.д.), воздействия прямых солнечных лучей и химически активных веществ.


Бюстгальтер следует стирать теплыми нейтральными растворами моющих средств или раствором детского мыла с последующей просушкой в хорошо проветриваемом помещении.

#### 4. Комплектность протеза

В комплект поставки (по медицинскому назначению) входит:

- экзопротез грудной (молочной) железы;
- чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный (ЧТ);
- одежду для женщин при мастэктомии – бюстгальтер ЛФ;
- памятка по пользованию – 1 экз.;
- упаковка – 1 шт.



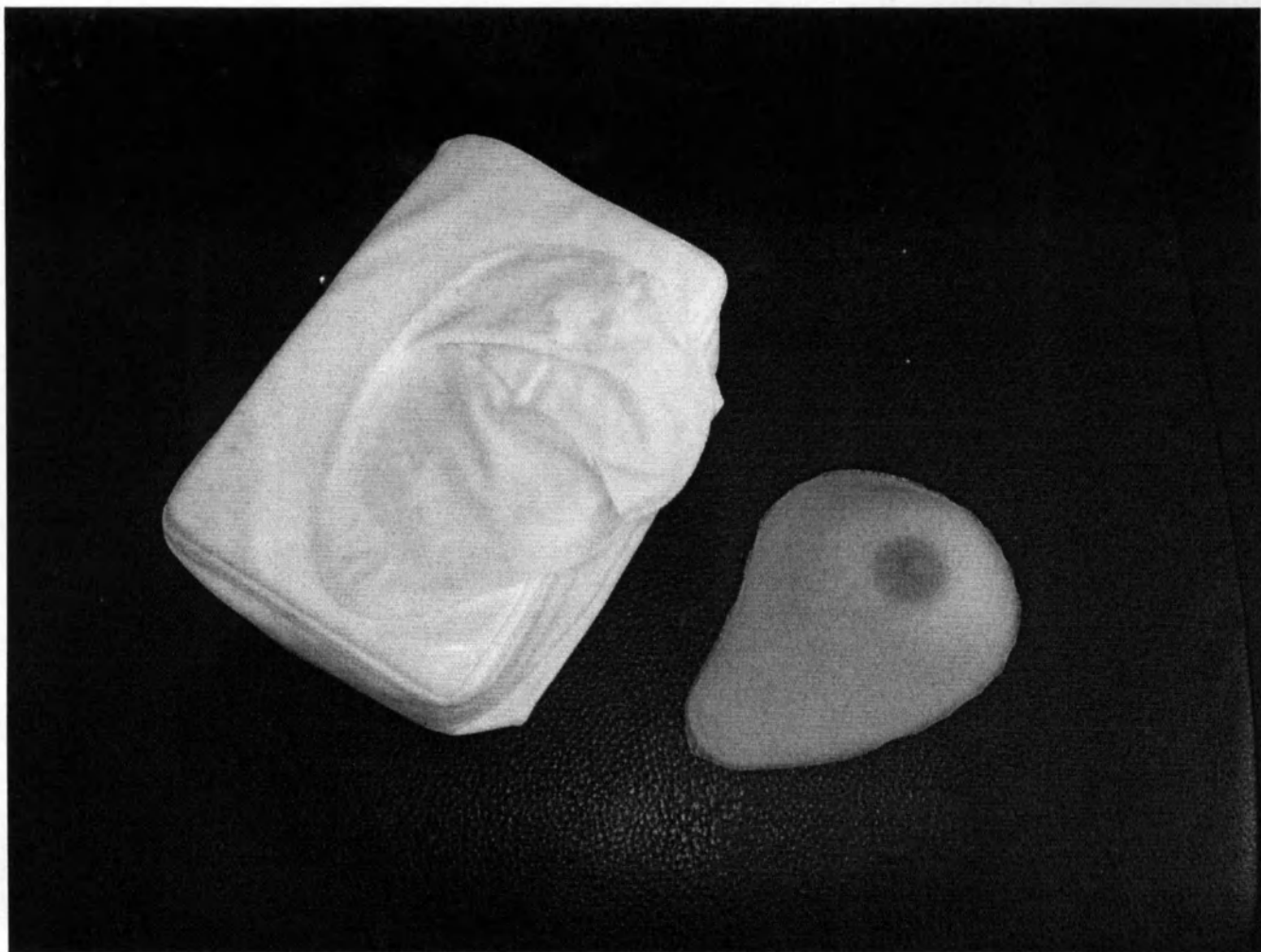

И.о. Директора ФГУП «Тамбовское ПрОП»

Минздравсоцразвития России


В. А. Селин

392000 г. Тамбов  
ул. Московская 23  
телефон 8 (4752) 72-34-52



Пронумеровано, прошнуровано  
И скреплено печатью  
количество листов 4

И.о.Директора ФГУП «Тамбовское ПрОП»  
Минздравсоцразвития России

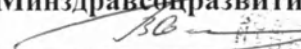  
В. А. Селтин

