



Для того чтобы поменять подгузники необходимо:

1. Если пациент «грязный» прежде, чем надеть подгузники, следует тщательно вымыть и протереть его специальными влажными салфетками, и высушить. Подгузники надевают только на чистую и сухую поверхность!
2. Разворачиваем подгузники.
3. Надеваем на больного подгузники.
4. Поправляя, смотрим, чтобы подгузники не сидели слишком туго и не сдавливали, врезаясь в кожу.
5. Для того чтобы избежать опрелостей, покраснения и сыпи подгузники следует менять по мере их наполнения и после каждого опорожнения кишечника. И обязательно менять ночью.
6. Частая смена подгузники предотвратит раздражение кожи пациента, и будет являться частью профилактики инфекции нижних мочевыводящих путей у пациента.
7. Кроме того, необходимо всегда помнить, что новые подгузники одеваются лишь после того, как будет очищена кожная поверхность и высушена.

Подгузники поставляются нестерильными в групповой упаковке (картон или полиэтилен).