



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «АПК Сфера»

Пучкин В.В.

«25» апреля 2012 г.

М.п.

Руководство

по эксплуатации изделий медицинского назначения Аптечки первой помощи в дорогу «АПК Сфера» (наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аптечка первой помощи в дорогу предназначена для оказания неотложной медицинской помощи вне медицинских учреждений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аптечка первой помощи в дорогу «АПК Сфера» представляет собой пластиковый футляр с ручкой (размер $(165,0 \pm 3,0)$ мм $\times$ $(125,0 \pm 3,0)$ мм $\times$ $(60,0 \pm 3,0)$ мм.), каждый футляр индивидуально упакован. На внешней стороне футляра имеется наклейка с содержанием следующей информации:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя.
- наименование изделия.
- обозначение настоящих технических условий.
- регистрационное удостоверение;
- годен до (месяц и две последние цифры года).
- номер партии

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не допускать произвольной замены указанных в перечне изделий медицинского назначения.

Не применять средств с поврежденной маркировкой и просроченным временем использования.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

При несчастном случае или дорожно-транспортном происшествии, до приезда скорой помощи следует оказать максимально полезное действие на пострадавшего, что выполняется как раз при непосредственной помощи аптечки.

Для оказания помощи открыть футляр, воспользоваться содержимым аптечки по необходимости.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

При артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий выше.



места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку.

При наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильный бинт.

При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный.

При отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аптечка первой помощи (автомобильная) должна всегда находиться в автотранспортном средстве, в недоступном для детей месте. Аптечка первой помощи (автомобильная), используется при оказании помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий и предназначена для оказания неотложной медицинской помощи вне медицинских учреждений.

Должность ответственного за
производство



Санакоев М.К.

(подпись)

