


«Утверждаю»

генеральный директор
ООО «Бристол-Майерс Сквибб»

 Константин Г. В.

«____» _____ 2007 г.

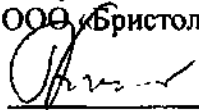

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Средство перевязочное: гидроколлоидный гель «ГрануГель»»

(наименование изделия медицинского назначения)

Должность руководителя ЛПУ,
проводившего медицинские
испытания


(подпись)

Ф.И.О

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Средства перевязочные: Гидроколлоидный гель «ГрануГель»» производства компании ConvaTec Limited (Великобритания)

GranuGEL®

Гидроколлоидный Гель

Описание продукта

GranuGEL – это стерильный гель, состоит из гидроколлоидов (пектин, натрий карбоксиметил целлюлоза), образующих прозрачный вязкий гель.

Показания

GranuGEL разработан для лечения поверхностных и глубоких ран, таких как трофические язвы и пролежни. Гель создает в ранах влажную среду, способствующую аутолитическому очищению.

Противопоказания

Не использовать у лиц с повышенной чувствительностью к гелю или его компонентам.

Меры предосторожности

Колонизация хронических ран микроорганизмами не является противопоказанием к использованию GranuGEL. При подозрении или возникновении инфекционного процесса во время использования GranuGel, необходимо начать проведение соответствующей антибиотикотерапии, дальнейшее использование GranuGel можно продолжить, но под наблюдением врача.

Безопасность применения GranuGEL при ожогах третьей степени не доказана.

Лечение диабетических язв должно включать в себя контроль сахара крови и прекращение механической нагрузки.

GranuGEL помогает аутолитическому очищению раны и удалению некротических масс, благодаря образованию влажной среды, что может сопровождаться увеличением размера раны при первых перевязках.

Продукт стерилизован. Если упаковка (туба) повреждена – не использовать.

Нанесение и удаление

Тщательно промыть рану стерильной водой или физиологическим раствором, или согласно методики принятой в клинике. Высушить окружающие рану ткани.

Отвинтить колпачок и удалить белое предохранительное кольцо.

Вернуть колпачок на место с целью перфорации мембраны.

Поместить GranuGEL непосредственно в рану. Рану заполнять не выше ее краев. Для получения среды оптимальной для ранозаживления наложить удерживающую влагу вторичную повязку, например, Granuflex®.

GranuGEL должен быть заменен при протекании вторичной повязки или ее удалении во время очередной перевязки. Гель необходимо смыть стерильным физиологическим раствором. В любом случае смену GranuGEL необходимо производить не реже чем раз в трое суток, при использовании на раны с наличием фибринового струпа, сухого некроза и не реже чем раз в семь дней при использовании на чистых гранулирующих ранах.

Условия хранения

Не нагревать выше 25° С; Не замораживать