

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы  
сертификации/ регистрации  
отдела Здравоохранение  
ЗАО «ЗМ Россия»  
Мазурова Н.В.

« 31 » 01. 2011 г.



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Белье хирургическое Steri-Drape

2011 г.

## 1. Введение

Данное руководство имеет целью дать рекомендации относительно применения хирургического белья Steri-Drape.

## 2. Описание изделия

Белье хирургическое Steri-Drape, представлено в следующем ассортименте:

### 1. Комплекты:

- 1.1. Комплект основной хирургический
- 1.2. Комплект основной хирургический без Мейо большой (L)
- 1.3. Комплект ортопедический хирургический
- 1.4. Комплект ортопедический хирургический без Мейо
- 1.5. Комплект хирургический для изоляции конечности
- 1.6. Комплект офтальмологический
- 1.7. Комплект для кесарева сечения с карманом из разрезаемой пленки Steri-Drape 2
- 1.8. Комплект урологический для ТУР

### 2. Простыни:

- 2.1. Простыня с адгезивным слоем с надрезом
- 2.2. Простыня кардиоваскулярная с разрезаемой пленкой Ioban 2,
- 2.3. Простыня кардиоваскулярная со вставкой Ioban 2
- 2.4. Простыня для бедренной ангиографии
- 2.5. Простыня офтальмологическая с разрезаемой пленкой Steri-Drape и карманом
- 2.6. Простыня для кесарева сечения с апертурным отверстием
- 2.7. Простыня для кесарева сечения с карманом из разрезаемой пленки Ioban 2
- 2.8. Простыня ТУР/Урологическая

Хирургическое белье Steri-Drape состоит из двухслойного материала: первый слой из пластифицированной ткани и служит защитой от микроорганизмов и промокания. Второй слой из нетканного материала обладает высокой впитывающей способностью и предотвращает растекание крови и прочих жидкостей.

Особенности хирургического белья:

- Непроницаемость для жидкостей и микроорганизмов.

Перенос жидкости и с нею – бактерий нарушает целостность стерильного поля, повышая вероятность инфицирования операционного поля. Хирургические простыни компании 3М непроницаемы для жидкости, за счет чего они препятствуют переносу бактерий и последующей контаминации операционного поля.

- Нетканый слой быстро и равномерно впитывает кровь и прочие жидкости, не давая им скапливаться в одном месте и предотвращая стекание на пол и одежду персонала.

- Материал Steri-Drape прочен на разрыв и устойчив к истиранию (низкое ворсоотделение).

- Клейкие застежки и ленты значительно упрощают работу персонала и позволяют быстро и надежно фиксировать простыни в любом положении.

- Простыни равномерно и удобно облегают тело пациента, быстро раскладываются и занимают мало места.

- Наличие карманов для сбора и контроля жидкости.

Уменьшение влажной контаминации во время операции не только снижает вероятность контакта с инфицированными жидкостями, но и помогает сохранить тело пациента сухим, что сокращает время подготовки операционной к следующей операции. Многие простыни марки 3М имеют карманы для сбора жидкости, а серия Steri-Drape 9000 изготавливается из абсорбирующего материала, способствующего уменьшению влажной контаминации.

- Вставки из разрезаемых операционных пленок, иммобилизирующих и подавляющих кожную микрофлору.

### **3. Использование по назначению**

1. Вскрытие полимерного пакета и все операции, связанные с использованием хирургического белья на операционное поле, производить операционной бригадой в стерильных халатах, стерильными руками и инструментами (см. рис 1)

При выполнении хирургических операций:

**Для накрытия малого инструментального стола может использоваться простыня-мешок на столик Мейо.** Малый инструментальный стол накрывается на каждую операцию.

**Простыней одноразового использования укрывается операционный стол** и накрывается пациент (2 простыни – меняются на каждой операции). В процессе укладки пациента могут использоваться разовые пеленки.

**После обработки рук хирурга одеваются в разовые стерильные халаты** и приступают к выполнению хирургических вмешательств.

**После обработки операционного поля пациент укрывается одной специализированной простыней с вырезами, отверстиями и т.д., снабженных адгезивными краями, впитывающими зонами, карманами и т.д.** Такой подход позволяет использовать одну одноразовую простыню вместо двух многоразовых и двух пеленок для укрытия пациента.

**Смена хирургических халатов, простыней и пеленок на операционном столе,** производится после каждой выполненной операции.

**После окончания операций использованное белье собирается в специальную емкость,** где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.



Рис.1- использование хирургического белья по назначению.

#### **4. Техническое обслуживание и ремонт.**

Изделия не предусматривают технического обслуживания и ремонта. Не используются повторно.

#### **5. Хранение**

Срок хранения 5 лет при температуре 10-30° С. Оптимальная влажность 30-60%

#### **7. Транспортирование**

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

#### **8. Утилизация**

Изделия утилизируются соблюдая местные правила утилизации отходов.

#### **9. Гарантийные обязательства производителя**

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

*Ирина*  
31.01.11.

