

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Кимрская фабрика имени Горького»

Жохов И.А.

2011 г.



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВМЕЩЁННОЕ С ПАСПОРТОМ
РЕСПИРАТОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ
«СПИРО-100», «СПИРО-200», «СПИРО-300»**

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОПИСАНИЕ

1.1. «СПИРО-100»

1.2. «СПИРО-200»

1.3. «СПИРО-300»

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСПИРАТОРОВ

2.1. «СПИРО-100»

2.2. «СПИРО-200»

2.3. «СПИРО-300»

3. УПАКОВКА

4. СРОК ГОДНОСТИ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСПИРАТОРОВ

Респираторы медицинские «СПИРО» предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыли, дыма, тумана) растительного происхождения (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная, угольная пыль), животного происхождения (шерстяная, роговая, костяная, кожаная, пуховая пыль), металлургические (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая пыль), минерального происхождения (наждачная, цементная, стеклянная, известковая, дорожная пыль, при производстве минеральных и органических удобрений). Респираторы испытаны на устойчивость к запылению и маркированы буквой D.

Удобно применять респираторы «СПИРО» в быту при обработке садово-огородных растений от вредителей, при уборке помещений. Защищает от инфекций передающихся воздушно-капельным путём.

1.1. «СПИРО-100»

Наименование полумаски	Класс защиты фильтрующей полумаски	Степень защиты (кратность ПДК по ГОСТ 12.1.005-88)	Наличие и цвет клапана выдоха	Количество в упаковке/коробке
«СПИРО-101»	FFP1	4	нет	20/200
«СПИРО-102»	FFP2	12	нет	20/200
«СПИРО-103»	FFP3	50	нет	20/200
«СПИРО-111»	FFP1	4	жёлтый	20/200
«СПИРО-112»	FFP2	12	зелёный	20/200
«СПИРО-113»	FFP3	50	красный	20/200

Респираторы «СПИРО-103» и «СПИРО-113» могут применяться для защиты от особо опасных аэрозолей, в том числе радиоактивных.

Респираторы не защищают органы дыхания от газов и паров вредных веществ. Респираторы предназначены для эксплуатации при концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17 % (объёмных).

Респираторы «СПИРО-100» выполнены в виде фильтрующей полумаски складывающейся в горизонтальной плоскости. Респираторы «СПИРО-111», «СПИРО-112», «СПИРО-113» снабжены клапанами выдоха. Защищающей органы дыхания составляющей частью является фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон. В зависимости от концентрации аэрозоля, влажности и температуры воздуха, физической нагрузки работающего – время эксплуатации респиратора составляет до 3 (трёх) смен.

Степень защиты, предусматриваемая изделием FFP2 или FFP3, включает степень защиты, предусматриваемую изделием более низкого класса или классов.

При использовании респиратора для защиты от вредных веществ 1 и 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88 запрещается эксплуатация респиратора более одной рабочей смены.

1.2. «СПИРО-200»

Наименование полумаски	Класс защиты фильтрующей полумаски	Степень защиты (кратность ПДК по ГОСТ 12.1.005-88)	Наличие и цвет клапана выдоха	Количество в упаковке/коробке
«СПИРО-201»	FFP1	4	нет	20/200
«СПИРО-202»	FFP2	12	нет	20/200
«СПИРО-203»	FFP3	50	нет	20/200
«СПИРО-211»	FFP1	4	жёлтый	20/200
«СПИРО-212»	FFP2	12	зелёный	20/200
«СПИРО-213»	FFP3	50	красный	20/200

Респираторы «СПИРО-203» и «СПИРО-213» могут применяться для защиты от особо опасных аэрозолей, в том числе радиоактивных.

Респираторы не защищают органы дыхания от газов и паров вредных веществ. Респираторы предназначены для эксплуатации при концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17 % (объёмных).

Респираторы «СПИРО-200» выполнены в виде фильтрующей полумаски складывающейся в вертикальной плоскости. Респираторы «СПИРО-211», «СПИРО-212», «СПИРО-213» снабжены клапанами выдоха. Защищающей органы дыхания составляющей частью является фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон. В зависимости от концентрации аэрозоля, влажности и температуры воздуха, физической нагрузки работающего – время эксплуатации респиратора составляет до 3 (трёх) смен.

Степень защиты, предусматриваемая изделием FFP2 или FFP3, включает степень защиты, предусматриваемую изделием более низкого класса или классов.

При использовании респиратора для защиты от вредных веществ 1 и 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88 запрещается эксплуатация респиратора более одной рабочей смены.

1.3. «СПИРО-300»

Наименование полумаски	Класс защиты фильтрующей полумаски	Степень защиты (кратность ПДК по ГОСТ 12.1.005-88)	Наличие и цвет клапана выдоха	Количество в упаковке/коробке
«СПИРО-301»	FFP1	4	нет	10/100
«СПИРО-302»	FFP2	12	нет	10/100
«СПИРО-303»	FFP3	50	нет	10/100
«СПИРО-311»	FFP1	4	жёлтый	10/100
«СПИРО-312»	FFP2	12	зелёный	10/100
«СПИРО-313»	FFP3	50	красный	10/100

Респиратор «СПИРО-303» и «СПИРО-313» могут применяться для защиты от особо опасных аэрозолей, в том числе радиоактивных.

Респираторы не защищают органы дыхания от газов и паров вредных веществ. Респираторы предназначены для эксплуатации при концентрации кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17 % (объёмных).

Респираторы «СПИРО-300» выполнены в виде формованной фильтрующей полумаски.

Респираторы «СПИРО-311», «СПИРО-312», «СПИРО-313» снабжены клапанами выдоха. Защищающей органы дыхания составляющей частью является фильтрующий материал электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон. В зависимости от концентрации аэрозоля, влажности и температуры воздуха, физической нагрузки работающего – время эксплуатации респиратора составляет до 3 (трёх) смен.

Степень защиты, предусматриваемая изделием FFP2 или FFP3, включает степень защиты, предусматриваемую изделием более низкого класса или классов.

При использовании респиратора для защиты от вредных веществ 1 и 2 класса опасности по ГОСТ 12.1.005-88 запрещается эксплуатация респиратора более одной рабочей смены.

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. «СПИРО-100»

Надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились внутри полумаски. Прижать концы носового зажима и расправить респиратор на лице. Чтобы проверить плотность прилегания полумаски респиратора к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу.

Респираторы «СПИРО» обеспечивают надёжную защиту органов дыхания человека, если его правильно надеть. Респиратор разрешается эксплуатировать до затруднения дыхания.

Температурный интервал эксплуатации респираторов: от минус 40° С до плюс 70° С.



2.2. «СПИРО-200»

Надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились внутри полумаски. Прижать концы носового зажима и расправить респиратор на лице. Чтобы проверить плотность прилегания полумаски респиратора к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу. При необходимости отрегулировать натяжение тесем оголовья и прижим носового зажима.

Респираторы «СПИРО-200» обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека, если его правильно надеть. Респиратор разрешается эксплуатировать до затруднения дыхания.

Температурный интервал эксплуатации респираторов: от минус 40° С до плюс 70° С.




2.3. «СПИРО-300»

Надеть респиратор на лицо так, чтобы подбородок и нос полностью разместились внутри полумаски. Прижать концы носового зажима и расправить респиратор на лице. Чтобы проверить плотность прилегания полумаски респиратора к лицу, сделать резкий выдох – при этом выдыхаемый воздух не должен проходить по полосе прилегания респиратора к лицу. При необходимости отрегулировать натяжение тесем оголовья и прижим носового зажима. Если Вы носите бороду, то полумаска становится малоэффективной.

Респираторы «СПИРО-300» обеспечивают надежную защиту органов дыхания человека, если его правильно надеть. Респиратор разрешается эксплуатировать до затруднения дыхания.

Температурный интервал эксплуатации респираторов: от минус 40° С до плюс 70° С.

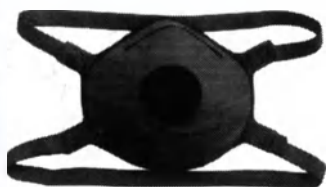

3. УПАКОВКА/МАРКИРОВКА

Наименование полумаски	Количество в упаковке/коробке
«СПИРО-101»	20/200
«СПИРО-102»	20/200
«СПИРО-103»	20/200
«СПИРО-111»	20/200
«СПИРО-112»	20/200
«СПИРО-113»	20/200
«СПИРО-201»	20/200
«СПИРО-202»	20/200
«СПИРО-203»	20/200
«СПИРО-211»	20/200
«СПИРО-212»	20/200
«СПИРО-213»	20/200
«СПИРО-301»	10/100
«СПИРО-302»	10/100
«СПИРО-303»	10/100
«СПИРО-311»	10/100
«СПИРО-312»	10/100
«СПИРО-313»	10/100



4. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ.

Гарантийный срок хранения полумаски с даты изготовления составляет 3 (три) года.

Утилизация выработавших свой ресурс респираторов осуществляется в порядке, установленном для утилизации отходов на предприятии – потребителе.

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
Семь листов
лист _____
регистратор _____

