


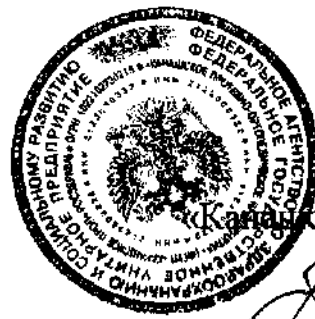

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ФГУП
«Канавское ПРОП» Росздрава

Н.А. Михайлова

«06» *август* 3 2008г.

«Обувь ортопедическая на протезы»
Памятка по пользованию

2008г.

Настоящая памятка предназначена для ознакомления с правилами эксплуатации ортопедической обуви на протез предназначена для взрослых и детей, пользующихся протезами нижних конечностей, правилах пользования и ухода.

1. Медицинское назначение обуви

Обувь ортопедическая на протезы предназначена пациентам при односторонней или двусторонней ампутации нижних конечностей.

2. Пользование обувью

Обувь должна использоваться по целевому назначению: повседневная на улице или в помещении; прогулочная - на отдыхе; домашняя только в помещении; спортивная — при занятиях физкультурой.

При односторонней ампутации обувь назначается по сохранившейся стопе, при двусторонней ампутации назначается в зависимости от размера искусственной стопы. Новую обувь течение 5 -7 дней необходимо использовать по несколько часов в день с обязательным периодическим осмотром стоп. Пациентам с отеками стоп необходимо в течение дня следить за состоянием нижних конечностей и при необходимости регулировать объемные параметры обуви за счет натяжения или ослабления застежки (шнуровки, ремешков).

При надевании обуви рекомендуется пользоваться ложечкой (рожком). Для предотвращения деформации задника, при снятии обуви нельзя наступать на ее пяточную часть.

Не допускается надевать обувь на босую стопу, а также использовать носочно-чулочные изделия, не соответствующие размеру стопы и имеющие грубые швы, шпопку или дыры.

3. Уход за стопой

Уход за стопами должен осуществляться в соответствии с рекомендациями лечащего врача. Перед надеванием обуви и после ее снятия необходимо внимательно осмотреть стопу, в случае обнаружения покраснений и (или) потертостей немедленно обратиться к специалисту.

4. Уход за обувью

После каждого использования приводить обувь в порядок, очищая от пыли и грязи, а при необходимости мыть мыльным раствором.

Ежедневно извлекать и просушивать индивидуальную ортопедическую стельку.

Сушить обувь и стельки необходимо при комнатной температуре вдали от отопительных приборов или других источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей.

5. Ремонт обуви

Ремонт обуви осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами предприятия-изготовителя

6. Гарантийные обязательства

Гарантийные сроки носки обуви в соответствии с требованиями ТУ 8820-038-53279025-2004 «Обувь ортопедическая на протезы».



Н.А. Михайлова