

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МИК»

Минин М.А.



2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл,
20 мл, 50 мл с иглами и без игл.

Соответствует требованиям национального стандарта
ГОСТ 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.22-2002
ГОСТ Р 50723-94, ГОСТ Р 50267.0.2.-2005
и технической документации изготовителя

Содержание

1. Описание.....	2
2. Показания.....	3
3. Противопоказания.....	3
4. Применение.....	3

1. ОПИСАНИЕ

Шприцы одноразовые стерильные объемом 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами и без игл - предназначены для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения жидких лекарственных средств, а так же для отсасывания различных жидкостей из организма при кратковременном контакте с кровью и лимфой.

Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с конусом, на который насаживается игла, и открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.

Шприцы различных моделей могут использоваться по необходимости с инъекционными иглами различной модели.

тип кончика иглы	описание
	Игла имеет кончик, срезанный под углом 12°.

2. ПОКАЗАНИЯ

Одноразовый шприц предназначен для выполнения инъекций. Для проведения инъекции игла шприца помещается в ёмкость с лекарственным препаратом, после чего движением поршня на себя втягивается необходимое количество препарата в цилиндр шприца.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость.

4. ПРИМЕНЕНИЕ

Одноразовый шприц предполагает его разовое применение сразу же после заполнения лекарственным препаратом, и после использования подлежит обязательной утилизации.

Стерильность: только для одноразового применения

