

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «МИК»

Минин М.А.

2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой
(см. Приложение на 1 листе)

**Соответствует требованиям национального стандарта
ГОСТ 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.22-2002
ГОСТ Р 50723-94, ГОСТ Р 50267.0.2.-2005
и технической документации изготовителя**

2010

1. ОПИСАНИЕ

Устройство с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром предназначено для внутривенного вливания инфузионных растворов, позволяет проводить вливания как из стеклянных, так и из полимерных емкостей.

При размещении контейнера с жидкостью между плоскостями корпуса, внутри контейнера возникает избыточное давление (0,05 атм) , которое держится постоянным в течение всего процесса до полного вытеснения жидкости из контейнера. Величину избыточного давления внутри контейнера можно определить (визуально проконтролировать) в процессе подсоединения системы для вливания инфузионных растворов по высоте столба жидкости в вертикально поднятой трубке.

Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов различных моделей может использоваться по необходимости с инъекционными иглами стандартной длина иглы 51 мм.

2. ПОКАЗАНИЯ

В устройство входит полужесткая прозрачная капельница с фильтром, предназначенным для фильтрования растворов в процессе инфузии. Капельница обеспечивает образование 20 капель из $(1,0 \pm 0,1)$ г воды. Встроенная канюля для крепления иглы подходит для игл любого диаметра. Канюля и устройство для прокалывания крышки закрыты защитными колпачками для обеспечения герметичности и сохранения стерильности внутри устройства для вливаний инфузионных растворов.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не использовать для переливания крови и компонентов крови. Не применять при нарушении целостности упаковки.

4. ПРИМЕНЕНИЕ

- закрыть зажим
- ввести иглу в капельницу до половины контрольной емкости
- открыть зажим и выпустить воздух из системы трубок
- закрыть зажим
- произвести венепункцию
- зажимом установить необходимую скорость инфузии

Стерильность: только для однократного применения

Приложение:

Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, исполнения:

- 1.Тип ECO-IV20**
- 2.Тип IV20-V1**
- 3.Тип IV20-V2**
- 4.Тип IV20-V3**

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 25 листов
Генеральный директор

[Handwritten signature]

