

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ-Инновации»

Макарова О.Е.

2009 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«Кетгут полированный и кетгут хромированный, в кассетах и в отдельных упаковках, с атравматическими иглами и без»

Москва, 2009

КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ/ КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ

РАССАСЫВАЮЩИЕСЯ НАТУРАЛЬНЫЕ ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПИСАНИЕ

Шовные материалы КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ/ КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ представляют собой рассасывающиеся, стерильные шовные материалы, изготовленные из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец или серозного слоя тонкого кишечника крупного рогатого скота. КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ покрыт солями хрома.

ПОКАЗАНИЯ

Применение шовных материалов КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ/ КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ показано для стягивания мягких тканей, наложения лигатур, но не для работы на сердце, сосудах и нервной ткани.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Применение данных шовных материалов противопоказано пациентам, имеющим аллергическую реакцию на их компоненты.

КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ/ КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ не следует использовать там, где необходима длительная фиксация тканей.

СВОЙСТВА

КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ отличается высоким качеством полировки, благодаря чему имеет хорошие манипуляционные свойства, сохраняя при этом достаточную прочность в организме в течение 7-8 суток. Легко проходит через ткани, имеет высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. В тканях кетгут вызывает умеренную воспалительную реакцию. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. За счёт покрытия солями хрома, КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ вызывает меньшую тканевую реакцию и обладает увеличенными сроками рассасывания (после имплантации 50% прочности сохраняет до 10-12 сут.). Рассасываются ферментативным путём.

ФОРМА ПОСТАВКИ

Рассасывающиеся шовные материалы КЕТГУТ ПОЛИРОВАННЫЙ/ КЕТГУТ ХРОМИРОВАННЫЙ поставляются в диапазоне размеров USP с 3 (7 метрический) по 5/0 (1,5 метрический). Шовные материалы поставляются стерильными, предварительно нарезанными, без игл или предварительно закрепленным на атравматических иглах разных типов, в коробках по 24 штуки.

ТИП СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОКИ ГОДНОСТИ

У-стерилизация. Нить помещена в специальный консервант, обеспечивающий сохранение гладкости и эластичности нити. Годен в течение 3 лет со дня стерилизации. Срок годности и номер партии указаны на упаковке.