

BEKA  HOSPITEC



Общий вид

Рисунок 1

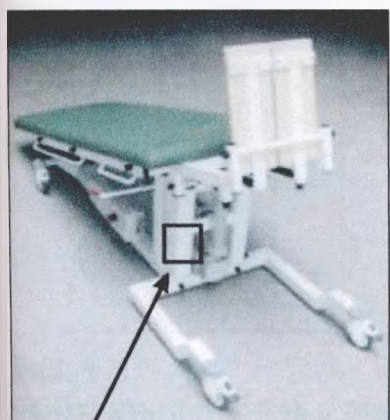
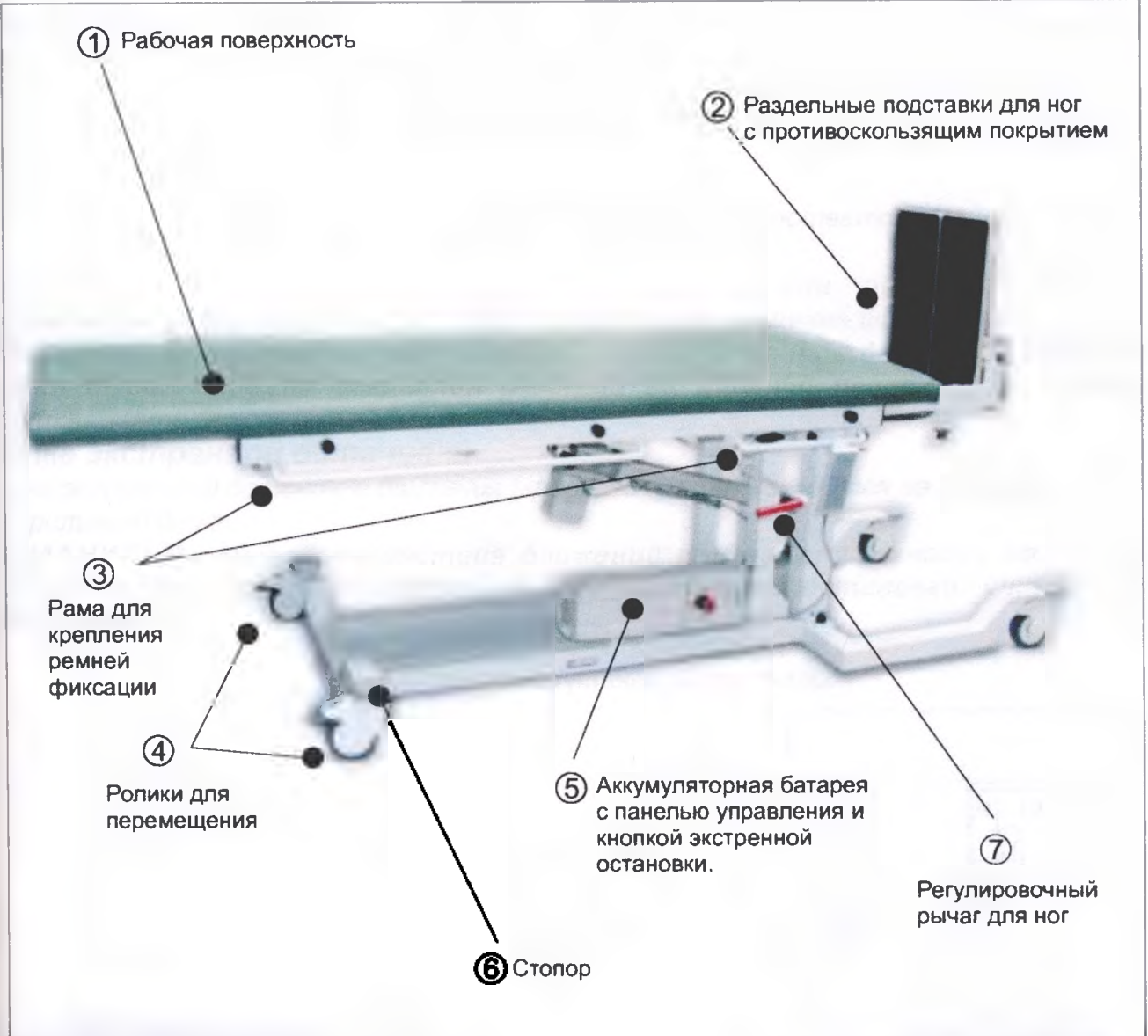


Рисунок 2
Позиция с низким положением
головной части

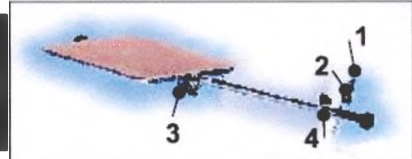


Рисунок 4
регулируемы рабочий столик
(опция)



Рисунок 3
Регулируемые подставки для ног

серийный
номер

Световой индикатор

Служит для выдачи информации о состоянии аккумуляторов:

Зеленый свет - аккумуляторы заряжены.

Желтый мигающий свет - требуется зарядить аккумуляторы.

Желтый свет - зарядка аккумуляторов.

Лампа не горит - нет подключения к электропитанию.

Аккумуляторы

Вертикализатор снабжен блоком аккумуляторов 24 В, которые легко устанавливаются в верхней части контрольного блока или на зарядной станции. Для установки (снятия) аккумуляторов служит ручка (см. рис. 1 на листе 5). Фиксация аккумуляторов осуществляется посредством захватов (см рис. 2 на листе 7), входящих в соответствующие гнезда блока или зарядной станции.

Зарядка аккумуляторов осуществляется на зарядной станции (дополнительная опция) или непосредственно на вертикализаторе через адаптор (см. рис.1.на Листе 7).

ВНИМАНИЕ! В процессе использования вертикализатора адаптор должен быть ОТКЛЮЧЕН.

Места подключения адаптора и других устройств контрольному блоку указаны на рисунке 3 на листе



Рис.1 Адаптор
(включен в поставку)



Рис. 2 (расположены с задней части аккумуляторов) для фиксации аккумуляторов.

Подключение адаптора

Подключение электродвигателя

Подключение пульта управления

Штеккер аккумулятора для подключения к контрольному блоку

Рис. 3 Подключение устройств вертикализатора