

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель бизнес-группы
"Диабетическая продукция"
ЗАО «БАЙЕР»



Сосновская И.В.

20__ г.

М. П.

Инструкция по применению:

**Контрольные растворы к прибору для измерения уровня глюкозы в крови
CONTOUR TS ("Контур ТС") низкой, нормальной и высокой концентрации.**

1. Показания к применению

Контрольные растворы к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS ("Контур ТС") низкой, нормальной и высокой концентрации содержат водный раствор глюкозы для проверки качества измерений, проводимых медицинскими специалистами.

В контрольных растворах к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS ("Контур ТС") низкой, нормальной и высокой концентрации содержится измеренный объем глюкозы.

Они предназначены для использования в следующих случаях:

- Если Вы еще не привыкли к работе измерительного прибора и необходимо попрактиковаться.
- Для периодической проверки эффективности работы всей системы (измерительного прибора, тест-полосок и техники проведения процедуры).
- Для проверки точности результатов измерения и выявления нарушений в работе системы.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:

	Глюкоза (г/100 мл)	Нереагирующие компоненты (г/100 мл)
Низкая концентрация	0,05	99,95
Средняя концентрация	0,12	99,88
Высокая концентрация	0,30	99,70

2. Противопоказания

Противопоказаний нет.

3. Предупреждения

• **ВНИМАНИЕ:** Контрольные растворы к прибору для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS ("Контур ТС") низкой, нормальной и высокой концентрации предназначены только для диагностики в лабораторных условиях. Их запрещено глотать или вводить в виде инъекции.

4. Пошаговая процедура

Для получения инструкций перед проведением измерения с помощью контрольного раствора ознакомьтесь с руководством пользователя измерительного прибора.

1. Перед измерением всегда проверяйте срок годности и дату утилизации.
2. Используйте только контрольный раствор CONTOUR TS. Использование других контрольных растворов может привести к получению неточных результатов.
3. Перед открытием немного встряхните бутылку для перемешивания контрольного раствора.
4. Не капайте контрольным раствором на тест-полоску прямо из бутылки. Выдавите небольшую каплю контрольного раствора на чистую непитывающую поверхность, например на лист вощеной бумаги.
5. После формирования капли контрольного раствора прикоснитесь к ней заборным кончиком тест-полоски и удерживайте его в капле до тех пор, пока не прозвучит сигнал.
6. Закройте бутылку с контрольным раствором крышкой.

5. Правила хранения

При перемещении измерительного прибора и тест-полосок в более теплое или прохладное место подождите 20 минут и только затем проводите измерения. Система CONTOUR TS обеспечивает получение точных результатов при температуре от 5°C до 45°C.

Храните контрольные растворы при температуре от 15°C до 30°C.

Запрещено использовать контрольный раствор, если истек напечатанный на бутылке и картонной коробке срок годности или прошло шесть месяцев с момента открытия бутылки. При открытии бутылки с контрольным раствором может оказаться полезным отсчитать шесть месяцев вперед и записать дату утилизации в специальном поле этикетки.

