

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «НАТАНА ГРУПП»**



Д.О. Капустин

Инструкция

**Расходные материалы к глюкометру CareSens для
определения глюкозы в крови (см. Приложение к заявлению).**

**Производства: i-SENS, Inc (Южная Корея),
адрес: 465-14 Wolgye-dong, Nowon-gu, Seoul 139-845, Republic of Korea
тел: +82-2-916-6191, факс: +82-2-910-0688, E-mail: i-sens@i-sens.com**

Проверка глюкометра с помощью контрольной полоски CareSens II

Контрольная полоска CareSens используется для определения правильности работы глюкометра. Чтобы провести тест, начните с отключенным глюкометром. Тест с контрольной полоской необходимо провести при следующих ситуациях:

- Когда глюкометр используется впервые.
- После замены батареек.
- Когда результаты теста кажутся неточными.
- Когда результаты теста не отражают Вашего самочувствия.
- Если Вы уронили глюкометр.

Шаг 1

Начните с выключенным глюкометром. Достаньте контрольную полоску CareSens из упаковки. Вставьте контрольную полоску в порт для тест-полосок.



Шаг 2

После нескольких секунд на дисплее глюкометра отразится "Yes". Это значит что Ваш глюкометр работает правильно. Выньте контрольную полоску и положите ее обратно в упаковку.



Тест-полоски CareSens

Тест-полоски CareSens поддерживают точное измерение уровня глюкозы в капиллярной крови.



Хранение и использование тест-полосок

Для безопасного и оптимального использования:

- Храните тест-полоски только в оригинальном флаконе.
- Храните флакон с тест-полосками в прохладном и сухом месте при температуре 8 - 30° C.
- Храните флакон с тест-полосками вдали от прямых солнечных лучей и тепла.
- Не замораживайте тест-полоски или флакон с тест-полосками.
- Закрывайте плотно колпачок флакона сразу же после извлечения тест-полоски.
- Используйте тест-полоску сразу после ее извлечения из флакона.
- Держите тест-полоски только чистыми и сухими руками.
- Не сгибайте, не режьте и не видоизменяйте тест-полоски ни при каких условиях.
- Не применяйте силу при вставке тест-полоски в глюкометр.
- Используйте только свежую кровь для теста.
- Не используйте тест-полоску после истечения ее срока годности. Используйте тест-полоски в течение трех месяцев после открытия флакона с тест-полосками. Запишите дату открытия флакона на его этикетке.

Несколько советов

Для более подробной информации о хранении и использовании тест-полосок смотрите вкладыш в упаковке с тест-полосками.



Берегите тест-полоски и флакон с тест-полосками от детей. Осуществители и вскрытые флаконы могут нанести вред при вдыхании или проглатывании, или может быть причиной раздражения кожи или глаз.

Система проверки глюкометра и тест-полосок



Контрольный раствор CareSens:
Раствор содержит заранее известное количество глюкозы. После проведения теста на контрольном растворе Вы сможете проверить правильность работы глюкометра и тест-полоски. А также, Вы сможете проверить правильность процедуры проведения теста.

Проведите проверку глюкометра при следующих обстоятельствах:

- Если Вы хотите поупражняться в проведении теста, используя контрольный раствор CareSens вместо крови.
- При использовании глюкометра в первый раз.
- При использовании тест-полоски с нового флакона.
- Если Ваши симптомы противоречат показаниям глюкометра.
- Если Вы подозреваете, что результаты теста не точны.
- Если Вы подозреваете, что Ваш глюкометр и тест-полоски работают не корректно.

Хранение и использование Контрольного раствора CareSens

Не используйте Контрольный раствор CareSens после окончания его срока эксплуатации. Добавьте три месяца к дате открытия флакона с Контрольным раствором CareSens и запишите эту дату на этикетке флакона – это будет дата окончания срока годности Контрольного раствора CareSens.

Для точности результата:

- Храните раствор в плотно закрытом флаконе при температуре (8-30 °C)
- Не замораживайте и не храните контрольный раствор в холодильнике.
- Держите контрольный раствор, глюкометр и тест-полоски при комнатной температуре (20-25 °C) за 30 минут до проведения теста.

Установка кода тест-полосок

Для точности результата, код на дисплее глюкометра CareSens II и код тест-полосок CareSens должны совпадать. Вы должны установить код перед использованием глюкометра в первый раз, а также каждый раз перед использованием тест-полоски с нового флакона. Номер кода на дисплее должен совпадать с номером кода на флаконе с тест-полосками.

Шаг 1

Аккуратно вставьте тест-полоску до упора, пока глюкометр не подаст звуковой сигнал. Номер кода появится на дисплее на три секунды. Код 1 появится при первом использовании глюкометра.



Шаг 2

Номер кода на дисплее и на флаконе с тест-полосками должен совпадать. Если код совпадает, дождитесь появления значка «» на экране и проведите тест. Если нет – перейдите к шагу 3.



Вы должны установить код перед использованием глюкометра в первый раз, а также каждый раз перед использованием тест-полоски с нового флакона. Номер кода на дисплее должен совпадать с номером кода на флаконе с тест-полосками. При неправильном коде, результат будет ошибочен.

Установка кода тест-полосок

Шаг 3

Нажмите кнопку M или кнопку C для выбора нужного кода. При нажатии кнопки M – число уменьшается на единицу. При нажатии кнопки C – число увеличивается на единицу. Для быстрого пролистывания чисел нажмите и удерживайте кнопку C.



Шаг 4

После выбора нужного кода подождите три секунды до появления значка «».



Шаг 5

После появления значка «», глюкометр готов к использованию.



Проверка глюкометра и тест-полосок

Для проверки глюкометра CareSens II и тест-полосок, пройдите следующие шаги:

Шаг 1

Аккуратно вставьте тест-полоску в порт электрической контактной части внутри до упора, пока глюкометр не подаст звуковой сигнал. Номер кода появится на экране в течение трех секунд. Значок  появится на экране. Убедитесь, что код на дисплее и на флаконе с тест-полосками совпадает. Если код не совпадает см. раздел «Установка кода тест-полосок» на стр. 18-19.



Шаг 2

Хорошо встряхните флакон с контрольным раствором. Не используйте первую каплю раствора для теста, сотрите её с кончика флакона. После появления значка  на экране, нанесите раствор на заостренный конец тест-полоски до тех пор пока глюкометр не подаст звуковой сигнал.




 Уровень содержания глюкозы, нанесенный на флаконе, применим только для контрольного раствора CareSens. Это не имеет никакого отношения к уровню содержания глюкозы в крови у Вас.

Проверка глюкометра и тест-полосок

Шаг 3

Глюкометр отсчитывает от пяти до одного, и результат отобразится на экране. Чтобы отметить результат теста, нажмите и удерживайте кнопку C в течение трех секунд. На экране появится значок CHECK. Этот результат не будет засчитан в среднюю Ваших результатов.

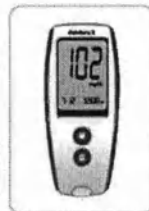

Шаг 4

Сравните результат с диапазоном указанным на этикетке флакона с тест-полосками. Если результат входит в этот диапазон – Вы готовы к проведению теста Вашей крови.



Шаг 5

Извлеките использованную тест-полоску. Глюкометр отключится.



Факторы ошибок теста

Если результат теста с контрольным раствором не входит в диапазон, напечатанный на флаконе с тест-полосками – повторите тест. Результат вне диапазона может получиться в результате:

- Ошибки при проведении теста.
- Использование контрольного раствора после окончания его срока годности.
- Использование испорченной или просроченной тест-полоски.
- Несовпадения кода на экране глюкометра с кодом тест-полоски.
- Флакон с контрольным раствором не был достаточно встряхнут.
- Для теста была использована первая капля раствора или не была достаточно хорошо стерта с кончика бутылки.

 Если при повторных тестах, результат не будет попадать в диапазон, напечатанный на флаконе с тест-полосками, это может означать, что тест-полоски CareSens и глюкометр CareSens II не работают должным образом. При таких обстоятельствах, не используйте ваш глюкометр и обратитесь к официальному торговому представителю i-SENS.

Забор крови для теста

Для забора крови Вам понадобится ручка-прокалыватель. Система для определения уровня глюкозы в крови CareSens II включает в набор ручку-прокалыватель по Вашему выбору.

Если Вы приобрели систему с обычной ручкой-прокалывателем смотрите страницы 27-29 для инструкций по применению.



Если Вы приобрели систему с ручкой-прокалывателем CareLance смотрите страницы 27-29 для инструкций по применению.



 Во избежание инфекции используйте лангет только один раз и:

- Не используйте лангет, который был в употреблении другим лицом.
- Всегда используйте новый стерильный лангет.
- Храните ручку-прокалыватель в чистоте.

Помогите себе

Глюкометр работает с любой одобренной медицинскими учреждениями ручкой-прокалывателем. Используйте обычную ручку-прокалыватель для забора крови только из пальца. С помощью ручки-прокалывателя CareLance, возможен забор крови из ладони и предплечья.

Диаграмма ручки-прокалывателя



Подготовка обычной ручки-прокалывателя для забора крови

Шаг 1

Тщательно вымойте и вытрите насухо ту часть тела, из которой Вы хотите взять кровь.



Шаг 2

Открутите наконечник ручки-прокалывателя.



Шаг 3


Плотно вставьте новый ланцет в держатель ланцета. Крепко держите ланцет. Аккуратно открутите защитный диск от ланцета. Сохраните диск для утиковки использованного ланцета. Крепко закрутите наконечник ручки-прокалывателя.



Подготовка обычной ручки-прокалывателя для забора крови


Шаг 4

Выберите желаемую глубину входа ланцета от 1 до 5 регулятором, который находится на тонком конце ручки-прокалывателя. Чтобы выбрать желаемую глубину, поверните регулируемую верхушку колпачка в любом направлении до тех пор, пока нужная цифра не совпадет со стрелкой. Рекомендуемая глубина для начинающих - 3.

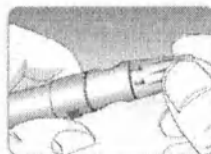

Шаг 5

Для зарядки пускового механизма ручки-прокалывателя, отведите пусковую трубку, расположенную на корпусе ручки-прокалывателя назад до характерного щелчка. Если щелчка не последовало, возможно, ручка-прокалыватель уже была приведена при установке ланцета.

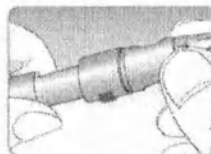


Полезный совет

Глубина входа ланцета для забора крови различна для каждого индивидуума. Ручка-прокалыватель позволяет Вам выбрать любую желаемую глубину входа ланцета для получения нужного объема крови. Рекомендуемая глубина для начинающих - 3.

Шаг 1

Держите ручку-прокалыватель перпендикулярно к поверхности пальца.

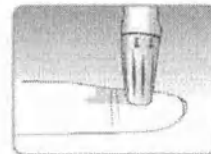


Полезный совет

Во избежание дискомфорта выбирайте различные участки кожиной пальца каждый раз при проведении теста.

Шаг 2

Нажмите на кнопку спуска. Слегка помассируйте место прокола для получения округлой капли крови (объем крови должен быть не менее 0.5 мкл). Поместите узкий конец тест-полоски в каплю крови.

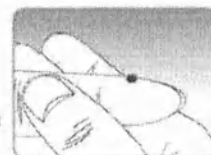

Из-за анатомической выской вероятности или недостаточного объема, после проведения теста на диске может появиться сообщение об ошибке E14 (Смотрите «Сообщения об ошибках и устранение неполадок» на стр. 46-47).

Схема устройства ручки-прокалывателя CareLance



Индикатор размера капли крови для анализа (этикетка с красной каплей размером 0,5 мкл. Φ) входит в комплект системы определения уровня содержания глюкозы в крови CareLance II. Поместите этикетку на наконечник ланцета для удобства измерения «на глаз» размера капли крови.

Подготовка CareLance для забора крови


Шаг 1

Тщательно вымойте и вытрите насухо ту часть тела, из которой Вы хотите взять кровь.




Шаг 2

Для зарядки пушкового механизма ручки-прокалывателя, опустите пушковую трубку, расположенную на корпусе ручки-прокалывателя, назад до характерного щелчка.

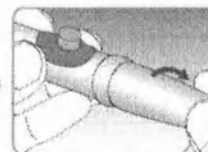

Шаг 3

Выберите желаемую глубину входа ланцета. Покрутите регулируемую верхнюю колпачку в любом направлении до тех пор, пока нужная цифра не сопадёт со стрелкой.

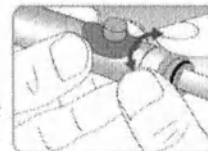

Подготовка CareLance для забора крови


Шаг 4

Плюжно вставьте новый ланцет в держатель ланцета. Крепко держите ланцет. Аккуратно откройте защитный диск от ланцета. Сохраните диск для упаковки использованного ланцета.



Шаг 5


Крепко закрутите наконечник ручки-прокалывателя.

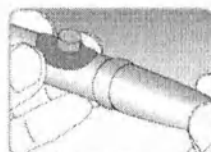

Использование ручки-прокалывателя CareLance для забора крови из кончика пальца


Шаг 1

Держите ручку-прокалыватель перпендикулярно к поверхности пальца. Нажмите на кнопку спуска.

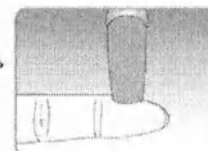

Шаг 2

Слегка помассируйте место прокола для получения округлой капли крови (объем крови должен быть не менее 0,5 мкл. Φ). Поместите узкий конец тест-полоски в каплю крови.

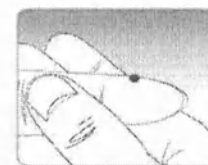

Важный совет

Держите ручку-прокалыватель перпендикулярно к поверхности пальца. Нажмите на кнопку спуска.



Если автоматически выскочит недостаточный объем, после применения теста на диске может появиться сообщение об ошибке E14 (См. раздел «Сообщения об ошибке и устранение неполадок» на стр. 47).

Использование ручки-прокалывателя CareLance для забора крови из альтернативных участков тела

С помощью ручки-прокалывателя CareLance, забор крови возможен не только из кончиков пальцев, но и из предплечья. Эти участки имеют меньше нервных окончаний, чем кончики пальцев, поэтому забор крови из этих участков менее болезнен. Если процесс забора крови из кончика пальца очень болезнен для Вас, попробуйте использовать ручку-прокалыватель CareLance для забора крови из альтернативных участков тела.

Шаг 1

Вставьте прозрачный колпачок для вакуумного использования.



Шаг 2

Зафиксируйте поршень, нажав на него вниз.



Шаг 3

Выберите чистый и нежный участок предплечья без видимых вен и вдали от костей.



Если Вы проколите видимую вену — на коже может сохраниться кровоподтек на некоторое время.

Использование ручки-прокалывателя CareLance для забора крови из альтернативных участков тела

Шаг 4

Для лучшей циркуляции крови и снижения различий результатов теста при заборе крови из кончиков пальцев с тестом крови из альтернативных участков, нежно помассируйте место прокола.



Шаг 5

Держите CareLance как Вы держите карандаш, прижмите к предплечью. Нажмите и удерживайте кнопку спуска. Пулевая трубка CareLance вытянет вакуумом, пахнущимся в колпачке, необходимый объем крови для теста. Крепко удерживайте кнопку спуска пальцем, пока не появится достаточный объем (не менее 0.5 мл: ☉) крови.



Шаг 6

Опустите шпатель с кнопки спуска.



Аккуратно опускайте шпатель с кнопки спуска во избежание разбрызгивания собранной для анализа крови.

Полезный совет

Если у Вас возникнут затруднения при заборе крови из альтернативных участков тела, свяжитесь с официальным торговым представителем i-SENS. Результаты теста из кончиков пальцев и из альтернативных участков тела могут значительно отличаться, по причине быстрой смены уровня глюкозы после еды, физической активности. Используйте кровь из кончиков пальцев при гипогликемии. А также людям пережившим гипогликемический приступ его симптомы, рекомендуют забор крови из кончиков пальцев.

Устранение использованных ланцетов

Правильное устранение использованных ланцетов защитит Вас и Вашего близкого от инфекций и ранений. Ниже описана правильная процедура устранения использованных ланцетов.


Шаг 1

Открутите колпачок ручки-прокалывателя. При использовании CareLance, снимите колпачок ручки-прокалывателя.



Шаг 2

Поместите защитный диск на ланцет. Аккуратно снимите использованный ланцет с ручки-прокалывателя. Поместите его в контейнер для острых предметов. Поместите в тот же контейнер использованную тест-полоску.

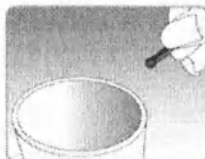

Ланцет создан только для однократного применения. Никогда не используйте использованный ланцет. Устраняйте использованные ланцеты должным образом.

Проведение теста на уровень содержания глюкозы в крови

Шаг 1

Аккуратно вставьте тест-полоску в порт, электрической контактной частью внутрь до упора, пока глюкометр не подаст звуковой сигнал. Номер кода появится на экране на три секунды. Значок «» появится на экране. Убедитесь, что код на экране и на флаконе с тест-полосками совпадает. Если код не совпадает см. раздел «Установка кода тест-полосок» на стр. 18-19.




Проведение теста на уровень содержания глюкозы в крови

Шаг 2


Используйте ручку-проколыватель для забора крови. Объем крови для теста должен быть не менее 0,5 мкл: ● для полного заполнения индикаторного окна. После появления значка ■ поместите узкий конец тест-полоски в каплю крови и ждите звукового сигнала.



При проведении теста на предплечье, держите глюкометр как показано на картинке.

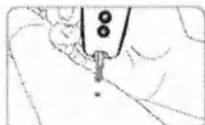

Если индикаторное окно не было заполнено из-за аномально высокой вязкости или недостаточного объема, на дисплее появится сообщение об ошибке Et4.

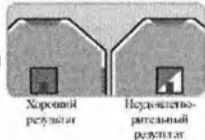

Получить совет

Если тест-полоска не забрала кровь при проведении теста, обратитесь к официальному торговому представителю i-SENS.

Проведение теста на уровень содержания глюкозы в крови

Шаг 3

Глюкометр отсчитает от пяти до одного на дисплее. Затем появится результат, время и дата теста, и автоматически записутся в память глюкометра. Выньте использованную тест-полоску из порта глюкометра, и он отключится автоматически через три секунды.



Если тест не был проведен в течение двух минут, глюкометр автоматически отключится. Для проведения теста выньте тест-полоску и вставьте ее еще раз в порт глюкометра.

Результаты теста на кожных покровах и на альтернативных участках тела могут значительно отличаться из-за быстрой смены уровня глюкозы после еды и физических упражнений. А также при симптомах гипогликемии, обезвоживания и последствии таких медицинских процедур, как инсулин. Максимальное время теста перед проходом сигналами отключено. Любые перекрывающие индикаторный шок или его симптомы, рекомендован забор крови из ладони пальца.

Устраните неподходящие элементы и тест-полоску должным образом в контейнер для острого предосторожности.

Вычисление диапазона уровня содержания глюкозы в крови

Время дня	Диапазон без диабета (ммоль/л)	Ваш диапазон (ммоль/л)
Перед завтраком	3,9 - 5,8	
Перед обедом или ужином	3,9 - 6,1	
Один час после еды	Ниже 8,9	
Два часа после еды	Ниже 6,7	
Между 14.00 и 16.00	Выше 3,9	


Источник: Krall, L.P., & Beaser, R.S. (1989). Joslin Diabetes Manual. Philadelphia: Lea and Febiger. p.138.

Сообщения Hi и Lo

Глюкометр CareSens II отображает результаты от 1,1 до 33,3 ммоль/л (20-600 мг/дл)

Сообщение Hi

Если результат теста выше чем 33,3 ммоль/л, на экране появится значок Hi. Результат выше 33,3 ммоль/л может указывать на гипергликемию (повышенная концентрация глюкозы в крови).

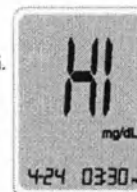

Сообщение Lo

Если результат теста ниже чем 1,1 ммоль/л, на экране появится значок Lo. Этот результат может указывать на гипогликемию (пониженная концентрация глюкозы в крови).



Если Вы получили сообщение Hi или Lo, повторите тест. Если результат повторится – свяжитесь с Вашим лечащим врачом немедленно.

Если сообщение Hi или Lo не отображает Вашего состояния, свяжитесь с официальным торговым представителем i-SENS.

Чтение факторов вариации

Аномально высокий или низкий объем красных кровяных клеток (уровень гематокрита выше 60% или ниже 20%) могут привести к неточным результатам.

Нормальный объем красных кровяных клеток находится в диапазоне от 30% до 50%. Объем красных кровяных клеток может быть повышен или понижен у новорожденных, беременных женщин и у людей, страдающих серьезной анемией.

Результат теста ниже 3,9 ммоль/л может указывать на низкий уровень содержания глюкозы в крови (гипогликемия). Результат теста выше 13,3 ммоль/л может указывать на высокий уровень содержания глюкозы в крови (гипергликемия).

Серьезное обезвоживание (чрезмерная потеря воды) может служить причиной искаженного низкого результата. Если Вы думаете, что у Вас серьезное обезвоживание – немедленно обратитесь к Вашему лечащему врачу.



Прочитайте инструкцию к Вашему устройству, чтобы убедиться, что Вы провели всю процедуру теста правильно и:

- Вы правильно получили результат типизации или типизации.
- Вы отражаете серьезное обезвоживание.
- Результаты теста не соответствуют Вашим симптомам.

Уход за глюкометром

Используйте мягкую ткань или салфетку для протирания глюкометра. При необходимости, для протирания может быть использовано небольшое количество спирта на мягкой ткани или салфетке. Органические растворители, такие как бензин, ацетон или домашние или промышленные очистители, могут нанести серьезный урон глюкометру.

Очень важно:

- Хранить глюкометр в сухом месте при температуре 10 – 40 °C.
- Избегать прямых солнечных лучей и жары на длительный период.
- Следить за непонеджением грязи, пыли, крови или воды в порт глюкометра.
- Не бросать глюкометр.
- Не пытаться чинить или выключить глюкометр.
- Хранить глюкометр вдали от сильных электромагнитных полей, таких как, сотовые телефоны и микроволновые печи.

Поздравляем!

Храним вас в безопасности! Теперь для проверки уровня сахара в крови в крови Сирбест. И в дальнейшем парализовать фигуру до появления «тупи».



Не используйте для чистки глюкометра домашние или промышленные очистители, бензин и ацетон.

Замена батареи

Когда значок **1** появится в первый раз, это означает, что в батарее достаточно энергии для проведения около 40 тестов. Для получения точного результата теста, замените батарею, как только ее заряд стал низким.

Используйте только не перерабатываемые литиевые батареи типа CR2032 с номинальным напряжением 3 вольта, номинальной емкостью 220 мАч и номинальным стандартом разгрузки 0,2 мА/минимум.

Шаг 1

Найдите, где батарея находится на обратной стороне глюкометра. Для открытия крышки снимите крышку.




Шаг 2

Вставьте использованную батарею. Установите новую батарею тестовой (-) стороной вверх.



Шаг 3

Сдвиньте крышку обратно до щелчка.

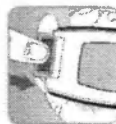


⚠ При вставке неподходящего вида батарейки возникает угроза травмы. Пожалуйста, измеряйте батареи и их соответствие. Всегда используйте систему.


Специальная система для определения уровня содержания глюкозы в крови CareSens II

- Диапазон измерения: 1,1 – 33,3 ммоль/л (20 – 600 мг/дл)
- Объем крови: минимум 0,5 мкл
- Время измерения: 5 секунд
- Для теста применяется: Свежая капиллярная кровь
- Калибровка: плазма-эквивалент
- Пробирный метод: электрохимический
- Тест глюкометры: контрольная полоска
- Мощность: одна 3V батарейка (не перерабатываемая, заменяемая, тип CR2032)
- Срок работы батареек: 1.000 тестов
- Объем памяти: 250 чисел уровня содержания глюкозы в крови.
- Размер: 95 x 40 x 18 (мм)
- Рабочий диапазон:
 - o Температурный режим: 10 – 40°C (50 – 104°F)
 - o Относительная влажность: 10 – 90%
 - o Гематокрит: 20 – 60%

Сообщения об ошибках и устранение неполадок

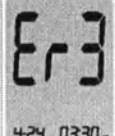Сообщение	Возможная причина	Разрешение
	Тест-полоска была в использовании	Вставьте новую тест-полоску.
	Проба крови была взята до появления значка «  » на экране.	Повторите тест с новой тест-полоской. Подождите появления значка «  » на экране перед проведением теста.
	Температура воздуха была вне рекомендованного диапазона.	Перейдите в помещение с температурой от 10 до 40 °C. Повторите тест с новой тест-полоской.

Сообщения об ошибках и устранение неполадок

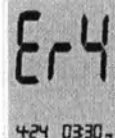Сообщение	Возможная причина	Разрешение
	Кровь не заполнила окошко подтверждения тест-полоски из-за аномально высокой вязкости или недостаточного объема.	Повторите тест с новой полоской и с адекватной пробой крови.



Свяжитесь с официальным торговым представителем i-SENS, если сообщение об ошибке сохраняется после нескольких раз тестирования.

Общее устранение неполадок

Глюкометр не включается при вставке тест-полоски.

- Вытащите тест-полоску из порта глюкометра. Вставьте тест-полоску еще раз.
- Нажатием кнопки M убедитесь, что глюкометр включен. Если глюкометр не включается, причиной тому может служить низкий заряд батарейки. Замените батарейку.
- Убедитесь, что батарейка установлена отрицательной (-) стороной вверх.

Глюкометр не очищается от крови до одного после нанесения крови на тест-полоску.

- Проверьте индикаторное окошко на адекватность пробы крови.

Результат теста не согласуется с вашими ожиданиями.

- Убедитесь, что код на флаконе с тест-полосками совпадает с кодом на экране глюкометра. Повторите тест с новой тест-полоской.
- Убедитесь, что проба была взята вовремя. Повторите тест с новой тест-полоской.
- Возьмите пробу крови из другого пальца или из другого альтернативного места. Повторите тест с новой тест-полоской.

Информация о гарантии

Гарантия производителя

Компания i-SENS, Inc. гарантирует, что при нормальном использовании глюкометра CareSens II в течение пяти лет, у глюкометра не возникнут проблемы из-за дефектов материала и дефектов производства. Глюкометр должен подвергаться только обычной эксплуатации.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда на работу прибора влияют внешние помехи или когда он эксплуатировался или хранился с нарушением требований инструкции. Любые претензии должны быть сделаны в течение гарантийного срока.

Компания i-SENS, Inc. обязуется по её усмотрению, либо бесплатно отремонтировать вышедшие из строя компоненты, либо заменить прибор на исправный. Компания i-SENS, Inc. не возмещает покупной стоимости глюкометра.

Получение гарантийного обслуживания

Для получения гарантийного обслуживания Вы должны вернуть неисправный глюкометр или часть глюкометра вместе с подтверждением покупки в ближайший центр гарантийного обслуживания i-SENS, Inc.

