

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Изделия медицинского назначения
«Самоклеящиеся фиксирующие системы
для ринопластики AUDIOSPLINT»

После первого наложения гипса, положить самоклеящейся частью эластичного листа на спинку носа, проверяя профиль и накладывая лист так, чтобы центральная его часть (часть без разрезов) совпадала со спинкой носа. В случае, если спинка носа вогнутая, поперечные разрезы откроются веерообразно.

Проверяя профиль, придайте форму центральной части (где нет разрезов). Разместите на спинке носа, прижмите и аккуратно закройте. В случае прямого профиля, разрезы остаются параллельными; в случае вогнутого профиля разрезы откроются веерообразно. Имеется возможность согнуть пластину в соответствии с выбранной формой; сгибание можно продолжить, фиксируя 4 разрезанные части. Для достижения наилучшего результата, проверьте, чтобы поперечные пластины были достаточно короткими, чтобы не задевать верхние челюсти.

В случае деформации носа, 4 мобильных «крыла» пластины, которые в силу своей независимости от друга от друга на каждой стороне, делают возможным дозировать нагрузку для более выпуклых частей. Пластина должна быть зафиксирована с помощью обычного пластыря.

Система для ринопластики AUDIOSPLINT состоит из:

- мягкий полиуретановый элемент с анти-пролежневыми порами. Самоклеящаяся поверхность должна накладываться поверх стерильного биндажа.
- твердый элемент из легкого сплава. Самоклеящаяся поверхность наносится поверх мягкого элемента.

Меры предосторожности:

Самоклеящаяся полиуретановая пластина должна быть расположена сверху первичного пластыря.

При закрытии твердого элемента не допускать сильного надавливания.

Когда базальная остеотомия не выполнена, слегка закройте пластину для того, чтобы создать давление только на спинку носа.

Генеральный директор ООО «РамТЭК»

Нажим Р.Ю.

