


Руководство по эксплуатации PRISTINE

Алмазная микрошлифовка

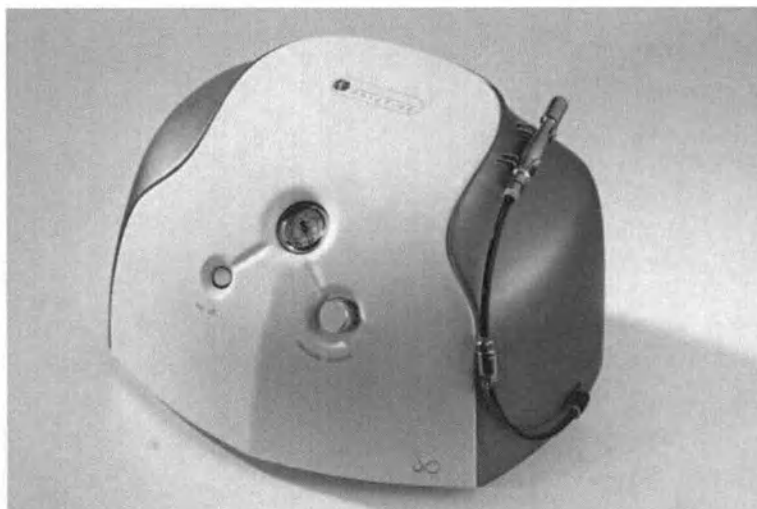

Наши поздравления и благодарность за выбор Pristine - Это современная система микродермabrasии. Вы выбрали качество и передовую точность без компромисса.

Viora приглашает Вас ознакомиться и тщательно следовать за простыми инструкциями в этом руководстве для оптимального и безопасного использования.

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Global Headquarters

Rosalya Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

www.vioramed.com
info@vioramed.com

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

Содержание:

ГЛАВА	НАЗВАНИЕ	СТРАНИЦА
1	Введение	3
2	Использование аппарата для Микродермабразии Pristine	3
3	Профессиональные характеристики	4
4	Комплекующие части и принадлежности	4
5	Инструкция по Эксплуатации	5
6	Инструкция по Безопасности	6
7	Протокол процедуры микродермабразии	8
8	Уход после процедуры	13
9	Чистка аппарата Pristine	13
10	Обслуживание аппарата Pristine	14
11	Поиск неисправностей и безопасность	15

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Global Headquarters

Rosalya Bldg. 29
Hanatshir Street
Tel Aviv, Israel 61018

T: +972.774.030.036
F: +972.774.030.036

www.vioramed.com
info@vioramed.com



1. Введение

Наука Микродермабразии кожи развивается - и технология, связанная с этим.

Аппарат Микродермабразии Pristine - крупное достижение, современная система Микродермабразии. Инновационное устройство, комбинирующее полировку кристаллами алмаза лазерной огранки с очищающим действием вакуума; Даже после одной процедуры, пациенты испытывают существенное изменение в структуре их кожи.

Pristine Hypoallergenic («Гипоаллергенная») подразумевает, что продукт с такой пометкой имеет меньшую вероятность вызвать аллергическую реакцию, - процедура не требует расходных материалов, устраняет необходимость использования свободных кристаллов и другого абразивного действия, вызывающих раздражение кожи, заменяя их микроскопическими кристаллами. В результате проблемы засорения исключены и появляется выгода косметологов благодаря гибкому, надежному устройству с долгим сроком хранения. С алмазным аппаратом Микродермабразии косметологи могут выполнять различные виды шлифовки для разных областей кожи. Удаляет ороговевшие клетки поверхностного слоя кожи, обновляет эпидермис, и придает коже необычайную гладкость, выравнивая ее поверхность. Аппарат оснащен насадками с напылением алмазной пудры. В то же самое время мертвые клетки удаляются вакуумной трубкой стерильно и под контролем.

Аппарат Pristine - позволяет регулировать степень шлифовки, выбирая уровень зернистости и форму насадки (10 алмазных насадок различного диаметра и разной зернистости) и уровень вакуумного давления. Настраиваемый вакуум позволяет Вам управлять давлением алмаза на кожу, таким образом, позволяя контролировать процесс и приспосабливаться к большему количеству типов кожи и условий. В результате Pristine - уникальная процедура для кожи, - удаляет мертвые клетки кожи, одновременно стимулируя рост новых, молодых клеток кожи и производства коллагена и эластина. Подходящий для всех типов кожи, аппарат Pristine может быть применен к коже лица, шеи, области декольте и всему телу.

2. Использование Аппарата микродермабразии Pristine:

- Мягко шлифует, и отсасывает вакуумом мертвые слои кожи из эпидермального слоя.
- Повреждение от солнца, прыщи и акне, гиперпигментация и старение, жирная или увядающая кожа.
- Уменьшает видимость мимических морщин, возрастных пятен, увеличенных пор, целюлитных растяжки, белых и черных комедонов.

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Global Headquarters

Rosalia Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

www.voramed.com
info@voramed.com



3. Профессиональные характеристики:

- Комбинирование действия полировки алмазов лазерной огранки с полностью управляемым вакуумом, помогает стимулировать кровоток и досягаемость слоев кожи.
- 10 настоящих алмазных насадок различных размеров и вариантов грубости для более широкого лечебного воздействия
- Нежный, но эффективный пилинг для всех типов кожи и всего тела
- Непревзойденная точность шлифовки
- Удобная, эргономическая рукоятка, подобная ручке, разработана для полной свободы движения запястья и гибкости.
- Тихий и простой в использовании
- Безопасный и Гипоаллергенный
- Процедура без кристалла уменьшает засорения, стоимость обслуживания и затраты, увеличивая производительность и чистоту
- Устраняет ингаляцию оксида алюминия.
- Значимые результаты после первой процедуры
- Аппарат с Ультразвуковой мойкой Ultrasonic Cleaner - может эффективно обработать насадки после каждого использования. Также возможность обрабатывать их в автоклаве.

4. Комплектующие части и принадлежности:

1 x DiamondTip™ рукоятка

2 x резиновые прокладки O-RING для DiamondTip™ рукоятки

10 x DiamondTip™ насадок:

- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 100 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 125 микрон (маленькая)
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 125 микрон (большая)
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 170 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 75 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 150 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 170 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 200 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – 300 микрон
- 1 x DiamondTip™ обработанная насадка – Гладкая Поверхность

1 x DiamondTip™ контейнер для хранения

1 x spiral cleaning brush – спиральная щеточка - для разных видов насадок

1 x мягкая щеточка для обработки маленьких 1 x DiamondTip™ насадок

1 x короткая полиуретановая трубка

1 x длинная полиуретановая трубка

1 x адаптер фильтра

2 x 100 ед. сменных фильтров

1 x пинцет для гигиенического использования фильтра

1 x "Ультразвуковая мойка " Ultrasonic Cleaner

1 x Руководство по эксплуатации

25 x Брошюр

Corporate Headquarters
30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

Global Headquarters
Rasaily Bldg., 29
Hanatsky Street
Tel Aviv, Israel 67019

www.vioramed.com
info@vioramed.com

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036



5. Инструкция по безопасности

Важные предостережения:

Вся инструкция по безопасности должна быть тщательно прочитана и должна быть полностью понята перед началом использования нашего оборудования

Эта глава содержит инструкции безопасности, которые должны быть соблюдены, чтобы избежать опасностей, которые могут привести к телесным повреждениям или могут повредить ваше оборудование. Инструкции безопасности были классифицированы согласно серьезности риска следующим образом:

Опасность:

Чтобы избежать, риска удара током или возможного повреждения устройства, никогда не снимайте крышку устройства, если нет конкретной инструкции от производителя или разрешенного поставщика оборудования.

Предупреждение:

Никогда не используйте поврежденные или изношенные шнуры или штепселя. Использование поврежденных или изношенных шнуров или штепселей может привести к удару током, ожогам или пожару. Не используйте удлинители и тройники с этим устройством. Свяжитесь с разрешенным поставщиком обслуживания немедленно, чтобы получить подходящие детали для замены. Все наборы шнуров не одинаковы.

Предупреждение:

Чтобы избежать любого риска короткого замыкания, пожара или другого внутреннего повреждения, никогда не позволяйте попасть любым металлическим предметам, типа винтов или скрепок для бумаг. Если это случится, немедленно выключите питание и отключите шнур от сети. Свяжитесь с разрешенным поставщиком обслуживания для соответствующей помощи

Предостережение:

Никогда не сгибайте или скручивайте шнур питания. Никогда не дергайте за провод в попытке вытащить шнур из розетки. Никогда не ставьте тяжелые предметы на шнур питания, поскольку это может привести к повреждению шнура. Всегда держитесь за вилку шнура непосредственно, выключая шнур питания, чтобы избежать повреждений шнура.

Предостережение:

Чтобы избежать повреждения устройства, никогда не проливайте жидкости в любую часть оборудования, и никогда выставляйте под дождь или воду. Если любое из этих событий произошло, выключите аппарат немедленно и свяжитесь с поставщиком обслуживания для помощи перед использованием устройства снова. Чтобы предотвратить сбой или повреждение оборудования никогда не помещайте аппарат поверх нагревающегося устройства. Всегда отключайте шнур питания во время молний, чтобы защитить аппарат от возможного повреждения в результате высокого напряжения. Если аппарат когда-либо роняли и повредили, или если Вы когда-либо обнаруживаете неприятный запах или чрезмерную

Corporate Headquarters Global Headquarters
Suite 600 Jersey City, NJ 07302-USA
Racheli Building
Hanatviv Street
Tel Aviv, Israel 67018

info@vioramed.com

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036



высокую температуру, немедленно отключите шнур питания и свяжитесь с разрешенным поставщиком обслуживания для соответствующей помощи.

6. Процесс работы Apparata микродермабразии Pristine

Общая Инструкция

Перед использованием

В качестве пробного теста, включите устройство с регулятором в положении максимального давления всасывания. Прикрыв пальцем пластмассовое отверстие, наблюдайте за манометром. Давление должно быть 0.8-1.0 БАР. Если это давление не достигнуто, свяжитесь с вашим агентом обслуживания.

Перед использованием, оператору советуют прочитать все инструкции по использованию аппарата, чтобы регулировать мощность всасывания согласно выбранной процедуре.

- Включите устройство в розетку 110/220 Вольт.
- Включите питание через переключатель включения-выключения на пульте управления с тыльной стороны устройства. Насос должен включиться. Для того чтобы включить устройство перед каждой процедурой, нажмите кнопку Вкл. - Выкл. на панели устройства.


Важно – Для регулирования силы вакуума, прикройте отверстие пальцем, затем, считывая данные манометра, регулируйте силу вакуума. Убедитесь, что Вы в перчатках и соблюдаете надлежащие гигиенические условия.

Система

Манометр

Трубка и
рукоятка

Разъем
питания

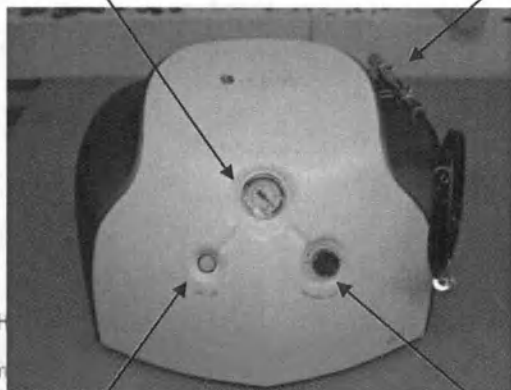

Corporate H
30 Montgom
Suite 660 Jersey City,
NJ 07310 USA

Hahatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

www.vioramed.com
info@vioramed.com

Кнопка
Вкл. – Выкл.

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036


Регулятор
вакуума




Переключатель
включения

Инструкции по сборке:

1. Соедините короткую трубку с кнопкой зафиксированной на дне аппарата
 2. Вставьте один фильтр в ячейку для фильтра
 3. Соедините более длинный конец трубки с коротким концом вместе.
 4. Соедините длинный конец трубки с рукояткой **Diamond Tip™**.
- Убедитесь, что должным образом соединили шланг трубки с системой, чтобы избежать воздушной утечки.
5. Включите вилку в розетку переменного тока и включите систему сзади переключателем.
 6. Включите устройство кнопкой Вкл. – Выкл.

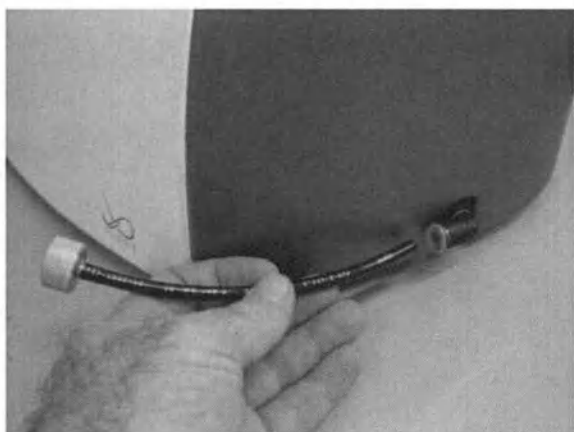

1 шаг - Соедините трубку

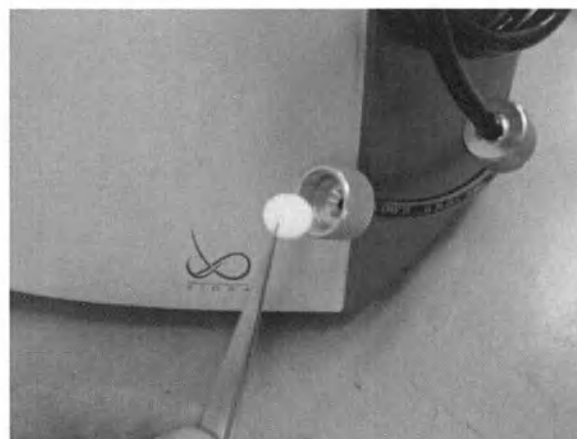

2 шаг - Вставьте фильтр

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Global Headquarters

Rosalya Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

www.vioramed.com
info@vioramed.com



3 шаг - Соедините трубки



4 шаг - Соедините с рукояткой

7. Протокол процедуры микродермабразии:

Противопоказания

Не используйте аппарат без предварительной консультации с врачом при следующих проблемах кожи :

- Невыявленные повреждения кожи
- Свежие очаги герпеса
- Бородавки
- Солнечные ожоги
- Активная форма акне (3-4 уровень)
- Активная Розацея
- Диабетическое воспаление
- Нарушение иммунной системы
- Беременность
- Гиперпигментация

Аппарат Pristine с 10 сменными насадками включает процедуры Микродермабразии для всего тела, комбинируя вакуумную стимуляцию, которая активизирует микроциркуляцию, подготавливая кожу к процедуре эксфолиации. Процедура нежна и безопасна, однако очень эффективна для кожи лица и тела.

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302, USA

Rosalya Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

www.vioramed.com
info@vioramed.com

Подготовка к использованию:

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

- Очистите участок кожи, который будет впоследствии подвержен процедуре при помощи мыла и теплой воды.
- Ваша кожа должна быть чистой и сухой
- Выберите уровень мощности вакуума, закрывая отверстие в трубке, при этом регулируя силу вакуума посредством манометра
- Рекомендуемый уровень вакуума колеблется между 0.2-0.4[бар] (зависит от типа кожи и восприятию пациента). Когда вы обрабатываете чувствительные зоны, например, около глаз, желательнее более низкое вакуумное давление. Рекомендованный вакуумный уровень для процедуры тела колеблется между 0.4-0.6 [бар].
- Рекомендуется растянуть кожу не доминирующей рукой, когда проводите рукояткой по нужной вам зоне
- Работайте крест-накрест (сетка) образец для каждой области
- Уделите особое внимание проблемной области вокруг глаз (морщины и складки).
- Обрабатывайте область вокруг глаз и нос меньшими насадками для более точной шлифовки .
- Шею можно обрабатывать алмазным наконечником, работая по направлению вниз от подбородка к груди. **Не проводите по горлу.**
- Небольшая эритема (покраснение) - хороший признак шлифовки, которое обычно исчезает в течение нескольких часов после процедуры
- Результаты заметны после первой процедуры. Для ухода и существенных результатов, рекомендуется 6-8 процедур в интервалах 10-14 дней, сопровождаемых ежемесячными процедурами по уходу.

3 Легких Шага для Оптимальной Точности Шлифовки Алмазной Микродермабразии:

1. Выберите желательный Diamond Tip™
2. Закрепите насадку Diamond Tip™ в рукоятке
3. Поместите один фильтр в ячейку для фильтра и плотно закройте

В конце каждой процедуры, удалите и избавьтесь от старого фильтра

Точность Шлифовки с Алмазными Насадкам



Corporate H

Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Rosalya Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

www.vioramed.com
info@vioramed.com

Микродермабразия для всего тела.

Специализируется на обработке целлюлитной зоны и

растяжках

170 микрон



Обрабатывать морщины, черные, белые комодомы в области

вокруг глаз

100 микрон



Шрамы, мимические морщины и солнцем пораженные участки

125 микрон



Фокус на больших частях и дефектах

125 микрон



Стимулирует подачу крови и производство коллагена
Лимфодренаж

Corporate Headquarters

Headquarters

SM (Чистый)
30 Montgomery Street
Suite 100, Jersey City,
NJ 07302- USA

Rosalya Bldg*, 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

www.vioramed.com
info@vioramed.com



75 микрон
микрон

150 микрон

170 микрон

200 микрон

300

Толще ----- Тоньше
Разнообразие выбора зернистости насадки для разных типов кожи

Процедуры обработки:

Лимфодренаж: Отрегулируйте Вакуумный уровень на минимальную силу ~0.2 [бар]

Шаг 1: Начните с шеи, гладко поглаживая по направлению вниз.

Шаг 2: Продолжите по направлению к области носа, перемещая рукоятку вниз, осторожно спускаясь по линии челюсти. Обработывая лоб, решительно двигайтесь от центра по направлению к линии волос, не выходя рукояткой за границы лица как на иллюстрации.

Шаг 3: От линии бровей используйте короткие точные движения по направлению вверх, старайтесь избегать чувствительных областей века. Мягкие движения под глазной зоной, остерегайтесь само веко.

Шаг 4: Используйте прямые движения, вниз поглаживающие по линии носа и от кости на скуле по направлению к носу.

Процедуру можно повторить два или три раза, по мере необходимости.

Corporate H

30 Montgomery
Suite 660 Jer
NJ 07302- U


T: +
F: +


Шаг 1

.018
.038
.036

www.viorame
info@viorame

- 11 -

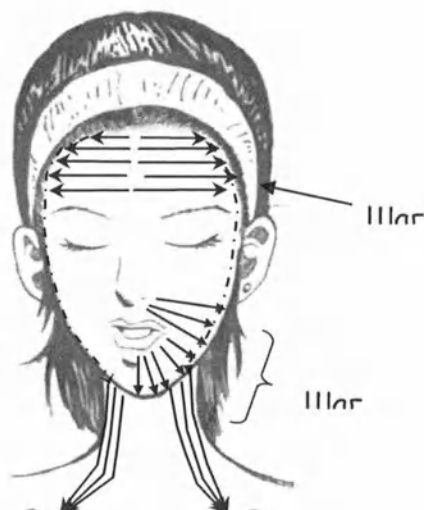

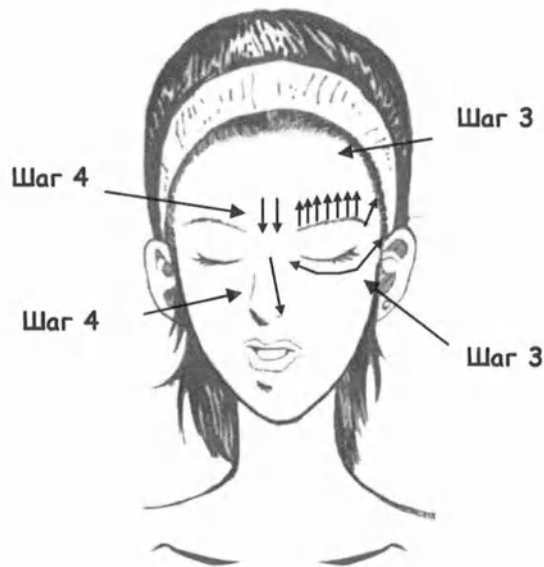

Процедура для лица: Установите Вакуумный уровень на -0.2 ч-0.4 [бар] (В зависимости от типа кожи). Согласно диаграмме ниже, используйте короткие круговые или крест-накрест движения вокруг глаз, рта, подбородка и лба. Вокруг глаз, используйте короткие движения направленные наружу. На лбу, используйте движения по направлению вверх



Corporate Headquarters


Global Headquarters

Процедура для тела: Установите Вакуумный уровень на -0.3÷ -0.6 [бар] (В зависимости от типа кожи и области обработки). На больших областях, используйте круговые или крест-накрест движения вверх-вниз.

30 Montgomery Street
New York, NY 10730-USA
T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Hosanya Bldg., 29
Tel Aviv, Israel 67018
T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

- 12 -

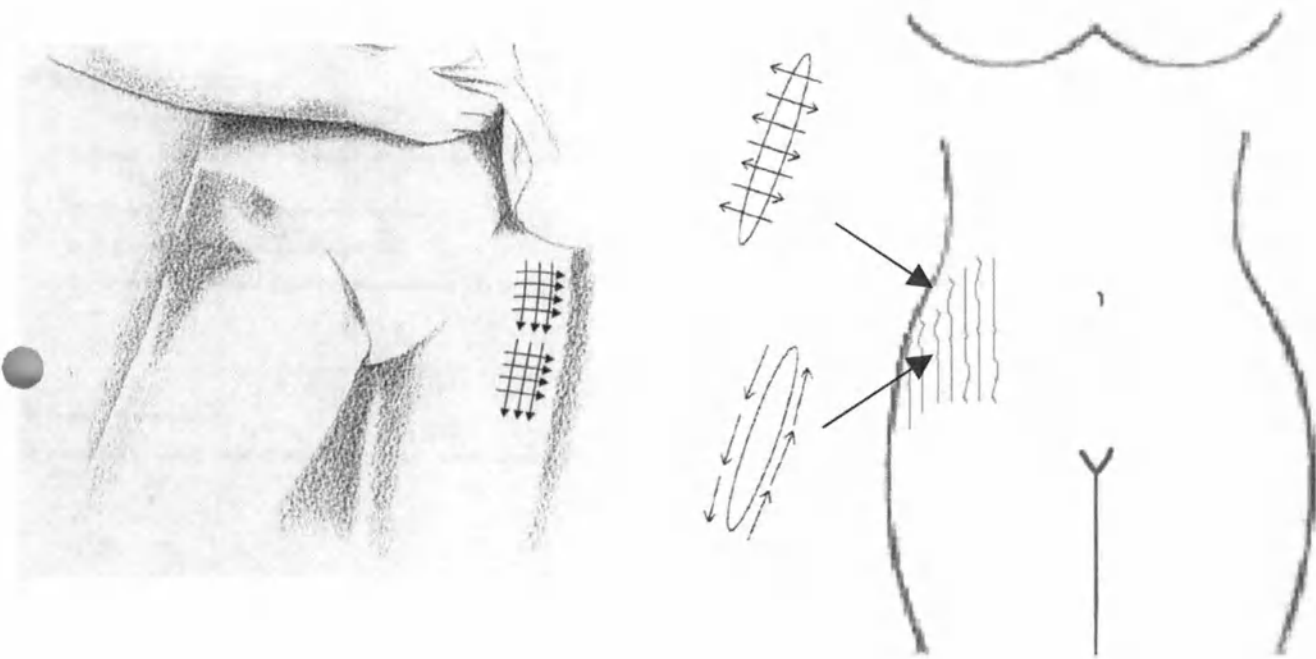

Уход после процедуры

В течение четырех дней после процедуры, требуется соблюдение следующих рекомендаций на постпроцедурный период:

- Избегать попадания прямых солнечных лучей и чрезмерно высокой температуры - перегревание может вызвать гиперпигментацию
- Использовать солнцезащитный крем
- Не трогайте обработанную кожу
- Избегать прямого попадания горячей воды на обработанные участки кожи. Не используйте Джакузи, парилку, или сауну.
- Избегать обильного потоотделения старайтесь не перегружаться.
- Не используйте никаких других механических пилингов
- Не подвергайте обработанные участки кожи прямого попадания горячего воздуха (включая фен для волос).

Corporate Headquarters
30 Montross Road
Suite 650 Jersey City
NJ 07302- USA

Global Headquarters
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

info@vioramed.com

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036



- Не использовать электролиз, инъекции коллагена, средства для удаления волос в течение 5 дней
- Приостановить использование ретинола (Retin-A/Renova) на постпроцедурный период в течение 7 дней
- **Не использовать в течение трех недель на постпроцедурный период**

Чистка аппарата Pristine

- Выключите систему, нажав на кнопку off
- После каждой процедуры, удалите старый фильтр и замените новым
- Используйте щетку, чтобы вручную чистить насадки, которые использовались в обработке
- Поместите используемые насадки в Ультразвуковую мойку
- Насадки могут быть автоклавированы

Обслуживание аппарата Pristine

Ограниченная гарантия

Аппарат Pristine находится под гарантией согласно срокам закупки, согласованным с вашим местным дилером. Для гарантийных сроков и условий, пожалуйста, см. приложенное гарантийное свидетельство или свяжитесь с вашим местным дилером для дальнейшей информации.

Кроме того, как предусмотрено в данном руководстве производитель не несет ответственности, подразумеваемой гарантией товарной пригодности при использовании аппарата не по назначению.

Поиск неисправностей и безопасность

Наиболее широко распространенные источники неисправностей:

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

Roselya Bldg*, 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

www.vioramed.com
info@vioramed.com

T: +1 201.332.4100
F: +1.201.332.4200

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

- 14 -

Ситуация/Признак:	Причина:	Решение:
Система не включается.	Кнопка on/off на тыльной стороне устройства в положении off или нажали на кнопку off на панели устройства	Включите кнопку "on" на панели устройства "on/off".
Система не включается.	Аппарат отключен от блока питания	Поверните кнопку в положение "off". Проверьте, включен ли кабель в розетку и соединен с основным блоком питания
Система не включается	Сгорел предохранитель	Проверьте плавкий предохранитель. Смените предохранитель
Нет вакуума.	Нестойкое (нестабильное) соединение	- Проверьте соединение между угловым соединением зафиксированной на дне аппарата и коротким концом трубки - Проверьте соединение между рукояткой и диной частью трубки - Проверьте, плотно ли закрыта ячейка для фильтра

Corporate Headquarters

30 Montgomery Street
Suite 660 Jersey City,
NJ 07302- USA

T: +1.201.332.4100
F: +1.201.332.4200

Global Headquarters

Rosalia Bldg', 29
Hanatsiv Street
Tel Aviv, Israel 67018

T: +972.774.030.038
F: +972.774.030.036

www.vioramed.com
info@vioramed.com

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
ООО "АльфаСпа Мед"



Генеральный директор

Н.Б. Глазко