

Руководитель ИЛ

ООО «Полимертест» СПб

Тихомирова Т.И.

«__» 2012 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Средство медицинское специальное NOVA для реабилитации и ухода за инвалидами, с принадлежностями

Область применений: Кресло-туалет NOVA предназначены для отправления естественных физиологических нужд больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений. Приспособление для людей, не имеющих возможности двигаться, как и временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. Это устройство передвижения для людей с затруднением передвижения, которое можно использовать в ванных помещениях. Съёмный **поручень для ванной** помогает людям с ограниченными возможностями в перемещении по ванной комнате: Опорный поручень для ванны, туалета. Хромированный, рифлёный. Длина 40 см Поручни придают устойчивость при переходе в вертикальное положение из положения сидя (в ванне или туалете). Предотвращают скольжения и падения, которые особенно опасны в ванной комнате.

Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд. Сиденье для ванн изготовлено из белого, особо прочного пластика, нейтрального к воздействию воды. При помощи четырех регулируемых зажимов можно приспособить сиденье под различную ширину ванн (от 34 см. до 58 см.). Резиновая часть зажимов плотно прилегает к стенкам ванны, тем самым жестко фиксирует сиденье и предотвращает его скольжение или перемещение. Стулья для душа и ванны помогают людям с нарушенной координацией движения более удобно принимать водные процедуры, полностью безопасны и комфортны.

Кресло-туалет оснащено съёмными колесиками и резиновыми насадками на ножки. Имеет 5 уровней регулировки высоты. Высота регулируется при помощи надежных кнопочных фиксаторов, расположенных на ножках.

Стр. 1 из 3

Хранение и срок годности.

Срок хранения – 5 лет. 1 год (12 месяцев) гарантия на изделие с момента первой эксплуатации.

Обслуживание и уход при эксплуатации кресла-туалета

При эксплуатации кресло-туалет требует определенного технического ухода.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите насухо.

Следует предохранять от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.

Указание мер безопасности

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Кнопки фиксаторов на нижней части опор должны совпадать с соответствующими отверстиями на опорах.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые насадки на ножки.

Не допускайте контакта изделия с электроприборами и проводами.

Подготовка к эксплуатации

Кресло-туалет собирается без использования инструмента.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Судно с крышкой ставятся на дугообразные опоры рамы по сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла.

Конструкция кресла-туалета позволяет устанавливать его сверху над унитазом. Резиновые насадки можно заменить на колеса.

Обслуживание и уход при эксплуатации стула для ванны

При эксплуатации стула для ванны требует определенного технического ухода.

Рама стула для ванны изготовлена из алюминия, имеет полимерное покрытие, не подверженное коррозии при контакте с водой, что облегчает санитарную обработку стула.

При мытье допустимо использование воды и моющих средств. Не используйте растворители и абразивные средства. После санитарной обработки вытрите насухо.

Следует предохранять от ударов твердыми и острыми предметами.

Не подвергайте длительному воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.

При повреждении резиновых наконечников на ножках стула необходимо провести их замену.

Указание мер безопасности

Запрещается эксплуатировать изделие с незакрепленными деталями.

Не устанавливайте стул на наклонной поверхности.

Убедитесь в надежности закрепления всех резьбовых соединений.

Вовремя заменяйте изношенные резиновые насадки на ножки.

Не допускайте контакта изделия с электроприборами и проводами.

Подготовка к эксплуатации

Стул для ванны не требует сборки.

Сиденье, затем крышка прикрепляются к задней части рамы.

Судно с крышкой ставятся на дугообразные опоры рамы по сиденьем.

Высота сиденья регулируется выдвигающимися опорами ножек кресла.

Конструкция позволяет устанавливать его в ванной комнате или душевой кабине.

Установите стул так, что бы все четыре ножки прочно стояли на горизонтальной поверхности.

Прошито и пронумеровано

3(три) листа(ов)



Директор
ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.