

**Перчатки рентгено и радиационно-защитные
силиконовые ПРЗс
ПАСПОРТ**

1. Общие сведения об изделии

Перчатки рентгено и радиационно-защитные силиконовые ПРЗс, дата выпуска _____ 2010 г.
Предприятие - изготовитель: ООО «ЭкоРусс»

1.2 Перчатки рентгено и радиационно-защитные (в дальнейшем - перчатки), предназначены для защиты рук персонала при работе с источниками рентгеновского излучения мощностью до 120 кэв.;

1.3 Перчатки рекомендованы к применению для индивидуальных рентгенозащитных средств Комитетом по новой медицинской технике Минздрава и медицинской промышленности РФ (протокол № 6 от 15.12.97.)

2. Основные технические характеристики

2.1. Свинцовый эквивалент не менее - 0,25 мм, (- 10 %, +30%) (при напряжении на трубке 100 кВ);

2.2 Масса перчатки - 420 г (+ 10 %);

2.3 Средний срок службы - 2 года.

3. Устройство и принцип работы

3.1 Перчатки изготавливаются из эластомерного материала (силиконовый компаунд). В качестве наполнителя используется свинцово-оловянный порошок.

3.2 Материал перчаток обеспечивает максимальную эластичность с одновременной стойкостью к кислотам, озону и воздействию температур (до 150 гр.С).

3.3 Для удобства работы предварительно на руки персонала рекомендуется одевать хлопчатобумажную перчатку.

3.4 Эластичность перчаток обеспечивает возможность их выворачивания и обработки внутренней поверхности.

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

4.1 Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150.69 для исполнения - УХЛ категории размещения 4.2, условия хранения - по группе 2(с), транспортировка - по группе 5(ШЖ4).

4.2 Эксплуатация изделий должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами НРБ-96 и ОСП-72/87.

4.3 Перчатки могут быть одеты как поверх других средств защиты рук (например, тонких резиновых или хлопчатобумажных перчаток), так и на руки, не имеющие такой защиты;

4.4 Перчатку берут за крагу и, без рывков, одевают на руку, обращая особое внимание на аккуратное попадание пальцев рук в соответствующие углубления в перчатках.

4.5 После использования проводится визуальный осмотр и, при необходимости, дезинфекция перчаток.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

6. Комплект поставки:

- перчатки рентгено и радиационно-защитные (1 правая, 1 левая) - 2 шт.;
- перчатки х/б - 1 пара
- паспорт - 1 шт.;
- упаковочный пакет.

7. Свидетельство о приемке

Перчатки соответствуют ТУ 9398-001-9974357-2010 и признаны годным к эксплуатации.

8. Дата выдачи _____



**Перчатки рентгено и радиационно-защитные
силиконовые ПРЗс
ПАСПОРТ**

1. Общие сведения об изделии

Перчатки рентгено и радиационно-защитные силиконовые ПРЗс, дата выпуска _____ 2010
Предприятие - изготовитель: ООО «ЭкоРусс»

1.2 Перчатки рентгено и радиационно-защитные (в дальнейшем - перчатки), предназначены для защиты рук персонала при работе с источниками рентгеновского излучения мощностью до 120 кэв.;

1.3 Перчатки рекомендованы к применению для индивидуальных рентгенозащитных средств Комитетом по новой медицинской технике Минздрава и медицинской промышленности РФ (протокол № от 15.12.97.)

2. Основные технические характеристики

2.1. Свинцовый эквивалент не менее - 0,35 мм, (- 10 %, +30%) (при напряжении на трубке 100 кВ);

2.2 Масса перчатки - 500 г (+10 %);

2.3 Средний срок службы - 2 года.

3. Устройство и принцип работы

3.1 Перчатки изготавливаются из эластомерного материала (силиконовый компаунд). В качестве наполнителя используется свинцово-оловянный порошок.

3.2 Материал перчаток обеспечивает максимальную эластичность с одновременной стойкостью к кислотам, озону и воздействию температур (до 150 гр.С).

3.3 Для удобства работы предварительно на руки персонала рекомендуется одевать хлопчатобумажную перчатку.

3.4 Эластичность перчаток обеспечивает возможность их выворачивания и обработки внутренней поверхности.

4. Условия эксплуатации, хранения и транспортирования

4.1 Климатические условия эксплуатации по ГОСТ 15150.69 для исполнения - УХЛ категории размещения 4.2, условия хранения - по группе 2(с), транспортировка - по группе 5(ШЖ4).

4.2 Эксплуатация изделий должна проводиться в соответствии с указаниями настоящего паспорта и нормами НРБ-96 и ОСП-72/87.

4.3 Перчатки могут быть одеты как поверх других средств защиты рук (например, тонких резиновых или хлопчатобумажных перчаток), так и на руки, не имеющие такой защиты;

4.4 Перчатку берут за крагу и, без рывков, одевают на руку, обращая особое внимание на аккуратное попадание пальцев рук в соответствующие углубления в перчатках.

4.5 После использования проводится визуальный осмотр и, при необходимости, дезинфекция перчаток.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

6. Комплект поставки:

- перчатки рентгено и радиационно-защитные (1 правая, 1 левая) - 2 шт.;
- перчатки х/б - 1 пара
- паспорт - 1 шт.;
- упаковочный пакет.

7. Свидетельство о приемке

Перчатки соответствуют ТУ 9398-001-9974357-2010 и признаны годным к эксплуатации.

8. Дата выдачи _____

