

Руководитель ИЛ
ООО «Полимертест» СПб
Тихомирова Т.И.

«__» 2012 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Кресло-коляска инвалидная NOVA, с принадлежностями

Область применений Кресло-коляска инвалидная: Кресла-коляски NOVA, Кресла-коляски с санитарным оснащением NOVA предназначены для передвижения и отправления естественных физиологических нужд больных с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на открытых площадках. Приспособление для людей, не имеющих возможности двигаться, как и временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. Это устройство передвижения для людей с затруднением передвижения, которое можно использовать в пешеходных зонах, а также в закрытых помещениях.

Хранение и срок годности.

Срок хранения – 5 лет. 1 год (12 месяцев) гарантия на изделие с момента первой эксплуатации.

Обслуживание и уход при эксплуатации:

При эксплуатации кресло-коляска требует определенного технического ухода. Обивку сиденья и спинки из нейлоновой ткани с водоотталкивающей пропиткой и подлокотники из искусственной кожи необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. При необходимости дезинфекции допустимо протирание поверхностей 1 % раствором хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Показания

Постоянные или временные нарушения опорно-двигательного аппарата:

- паралич;
- ампутации нижних конечностей;
- повреждения или деформация органов;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

При подборе кресла-коляски инвалидной необходимо учитывать:

- рост и вес пациента;
- физическое и психическое состояние;
- возраст;
- условия, в которых будет она использоваться.

Противопоказания

Использование кресла-коляски инвалидной противопоказано при:

- невозможности сохранять сидячее положение;
- тяжелых нарушениях вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности органов на обеих руках;
- психических расстройствах;
- ограниченной или недостаточной способности к ориентации;
- наркотическом или алкогольном воздействии.

Требования к безопасности

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Перед использованием необходима тренировка при сопровождающем лице на ровной площадке с хорошим обзором.
- Ознакомьтесь с режимами разгона, поворота и торможения;
- Стояночные тормоза используются только для стоянки. Использование стояночного тормоза для остановки кресла-коляски при движении может привести к опрокидыванию;
- Запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на инвалидную коляску повышается опасность опрокидывания;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы, если их нет, то необходимо воспользоваться помощью сопровождающего лица;
- При посадке и высадке с кресла-коляски инвалидной колеса необходимо поставить на тормоза;
- При посадке и высадке не наступайте на опоры для ног;

- При наклоне кресла-коляски на угол более 10 имеется опасность опрокидывания назад;
- При движении без торможения в направлении препятствия (ступенька, бордюр и т.п.) имеется опасность выпадения человека из коляски вперед;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.
- Кресло-коляска инвалидная выдерживает нагрузку до 150 кг, превышение грузоподъемности может привести к деформации рамы.

Эксплуатация

Посадка и высадка пациента

- Пересаживание спереди:

1. Расположите инвалидную коляску сиденье, с которого будет проводиться пересадка, максимально близко к месту куда будет пересаживаться пациент, под углом около 45 град.
2. Поставьте кресло на стояночный тормоз.
3. Поставьте ноги на пол.
4. Сложите обе опоры для стоп вверх.
5. Соскользните боком на сиденье.
6. Сядьте на сиденье максимально глубоко.
7. Опустите подножки в вниз.
8. Поставьте ноги на подножки.
9. Пристегните ремень безопасности.

Складывание и раскладывание:

Кресло-коляска инвалидная складывается и раскладывается без инструмента.

Для складывания кресла-коляски инвалидной следует:

Сложить рукоятку. Сдвиньте замок в сторону и надавите на рукоятки в сторону спинки.

Встаньте сбоку от кресла и, придерживая одной рукой за подлокотник с вашей стороны, другой рукой потянуть на себя противоположную сторону рамы. Так же легко можно сложить кресло-коляску, просто потянув сиденье вверх.

Раскладывание производится в обратной последовательности. При этом нажимают на боковые элементы конструкции, в месте прикрепления сиденья к раме.

Опоры для ног:

Кресло-коляска комплектуется съемными и поворотными подножками с упором для голени. Ножные опоры складные и регулируются по высоте. Для установки подножки на кресло-коляску необходимо надеть подножку на направляющие, находящиеся на раме и повернуть в сторону от колеса до срабатывания фиксатора.

Для снятия подножки необходимо нажать рычажок фиксатора по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.

Тормоза:

Кресло-коляска снабжена слева и справа рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага, можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования. Рукоятки можно убрать, сдвинув вверх и согнув сзади.

Колеса:

Кресло-коляска комплектуется колесами, имеющие пневматические задние и литые передние шины.

Подлокотники:

Подлокотники ступенчатые, съемные. Для снятия подлокотника нажать кнопку фиксатора, расположенную на подлокотнике спереди и вынуть подлокотник из пазов.

Кресло-коляска комплектуется складной спинкой. Для складывания отогните рычажки, которые расположены на спинке и потяните за рукоятки вниз.

Металлические части изготовлены из коррозионно-стойких материалов и имеют эмалевые лакокрасочные покрытия.

Приведение в движение и торможение:

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску инвалидную в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого рукояток. Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии тормозить кресло-коляску собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

При самостоятельной езде - кресло-коляска инвалидная приводится в движение и затормаживается с помощью обручей, закрепленных на больших колесах.

Транспортировка:

Для экономии места при транспортировке, снимите подножки с направляющих, откиньте спинку и сложите кресло-коляску инвалидную пополам. Кресло-коляска инвалидная удобно складывается и занимает мало места.

Не использовать кресло-коляску в качестве сиденья в автомобиле.

Рекомендации по уходу:

При эксплуатации, кресло-коляска инвалидная требует определенного технического ухода.

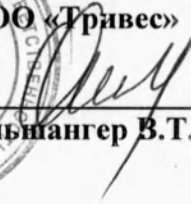
Обивку сиденья, спинки и подлокотники необходимо чистить теплой водой с применением мягких моющих средств. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) листа(ов)



Директор
ООО «Тривест»


Ольшангер В.Т.