

УТВЕРЖДЕНА

УТВЕРЖДАЮ

Приказом Росздравнадзора

Генеральный директор
ООО Пауль Хартманн

От _____ 2011 г. № _____

_____ Калабин Ю.В.
_____ 2011 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия из перевязочной марли и ваты стерильные, нестерильные
(наименование изделия медицинского назначения)

1. Изделия медицинские из марли и ваты

- 1. для лечения и ухода за ранами, в качестве вторичных повязок, в качестве подкладочного материала и для тампонирования глубоких ран и полостей

2. Технические характеристики

Материал	
1. Марля перевязочная	
Verbandmull Gelegt	100% хлопок, отбеленный
Verbandmull ZZ	100% хлопок, отбеленный
2. Салфетки: ES Nabelkompressen	100% хлопок, отбеленный
Medicomp	70% вискозное волокно, 30% полиэфир
Medicomp extra	70% вискозное волокно, 30% полиэфир
Medicomp drain	70% вискозное волокно, 30% полиэфир
Telatex	Марля – 100% хлопок, X-ray нить – Полипропилен с 60 % р-ром BaSO4.
3. Повязки сорбционные	
Eusorpad	100% хлопок
Zetuvit	покрытие: Полиамид/вискоза, нетканый, гидрофильный, - внутренний поглощающий слой: Сульфат целлюлозы, - ткань: Отбеленная без хлора целлюлоза, - соединение: Термоклей.
Zetuvit E	Материал: - покрытие: Впитывающий нетканый пропиленовый материал. - внутренний поглощающий слой: Небеленая сульфатная целлюлоза, - наружная сторона: Отбеленная без хлора целлюлоза, - влагозащищающий слой: Влагоотталкивающий нетканый

	полипропилен, голубой, - соединение: Термоклей.
etuvit Plus	Материал: Полиамид/вискоза, нетканый, гидрофильный Покрытие: Сульфат целлюлозы Внутренний поглощающий слой: Отбеленная без хлора целлюлоза в сочетании с суперабсорбентом Ткань: Отбеленная без хлора целлюлоза Соединение: Термоклей
il-Zellin	нетканый материал (вискоза/полиэстр) и сорбционная прокладка из нескольких слоев крепированной бумаги на основе высокоотбеленной целлюлозы
Тампоны	
agasling	100% хлопок, отбеленный
agalong	100% хлопок
ur-Zellin	Основа тампона: 100% крафт- целлюлоза , отбеленная без хлора.
amu-med	Материал: - Тканевая оболочка: 100% вискоза, - Вата: 50% хлопок/ 50% вискоза.
elluron	Впитывающий хлопок, целлюлозная прокладка
Бинты: ampograss	Материал :марля из 100% хлопка , плетение 24 нити на 1 кв.см., пропитанная нейтральной, физиологически индифферентной мазевой массой (глицериды жирных кислот, аморфная кремнекислота, вес мазевой массы 18 г)
amponadbinden	100% хлопок
tolta	100% полиэстер

Soft	100% полиэстер
Физические характеристики: Марля связочная bandmull Gelegt время впитывания: bandmull ZZ время впитывания: Салфетки: Nabelkompressen время впитывания: edicomp лагопоглощающая особность: edicomp extra лагопоглощающая особность: edicomp drain лагопоглощающая особность: elatex ес: Повязки гемостатические усорад ес: etuvit лагопоглощающая особность: etuvit E лагопоглощающая особность: etuvit Plus лагопоглощающая особность: fil-Zellin	2 сек. 2 сек. < 10 сек. примерно 30 г/м² примерно 30 г/м² примерно 30 г/м² 23 г\кв.м мин. 30 г/мл Мин. 9,5 г/г Мин. 9,5 г/г мин. 9,5 гр./ на 1 гр. сорбента

абсорбирующая способность:	9г/г
Тампоны gasling время впитывания:	< 10 сек.
galong время впитывания:	< 10 сек.
r-Zellin время абсорбции	Макс. 3,5 сек
nu-med густота:	1г.,2г.,4г.,6г.
lluron гидропоглощающая способность:	Минимум 6г/г
Бинты: mprograss плотность	24 нити на 1 кв.см.
mpronadbinden отношение массы к площади:	>= 36 гр./кв.м.
lta плотность	80 г/м2
lta Soft плотность	85 г/м2

3. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость.

4. Подготовка к работе:
Вскрыть стерильную упаковку, достать салфетку, наложить в качестве впитывающей повязки или тампонировать в рану. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

5. Правила хранения и использования:
Хранить в сухом месте.

6. Срок годности:

рок хранения etuvit Plus	3 года от даты производства
erbandmull Gelegt erbandmull ZZ Nabelkompressen edicomp edicomp extra edicomp drain latex copad tuvit tuvit E -Zellin gasling galong r-Zellin mu-med lluron mpogross mponadbinden	5 лет от даты производства, указанной на упаковке
та, Ролта Софт	неограничен

Руководство по эксплуатации

- **Изделия из перевязочной марли и ваты стерильные, нестерильные**

- Verbandmull Gelegt
- Verbandmull ZZ
- ES Nabelkompressen
- Medicomp
- Medicomp extra
- Medicomp drain
- Telatex
- Eycopad
- Zetuvit
- Zetuvit E
- Zetuvit Plus
- Fil-Zellin
- Pagasling
- Pagalong
- Pur-Zellin
- Samu-med
- Celluron
- Tampograss
- Tamponadbinden
- Rolta
- Rolta Soft

Использование:

Вскрыть стерильную упаковку, достать салфетку, наложить в качестве впитывающей повязки или тампонировать в рану. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

Хранение:

Хранить в сухом месте.

Транспортировка:

Транспортирование должно проводиться всеми видами закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, отапливаемых герметизированных отсеках, на самолетах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.) в соответствии правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида и условиями хранения по ГОСТ 15150-69

Утилизация:

Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам.

