


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Компания «Офталмикс-Нева»

 **Ведерников В.М.**

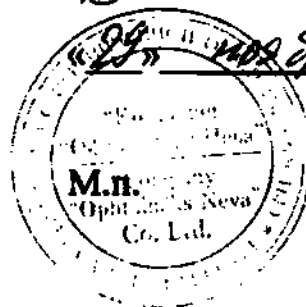

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**По применению изделия медицинского назначения
Мягкие контактные линзы: ILLUSION colors, ILLUSION fashion
производства фирмы «БЕЛМОРКОНТАКТ КО., ЛТД», Корея
(BELMORECONTACT CO, LTD, Korea)**

1. Назначение

ILLUSION colors, ILLUSION fashion – мягкие контактные линзы, предназначены для коррекции зрения в режиме ежедневного ношения.

2. Основные характеристики

ILLUSION colors, ILLUSION fashion - мягкие контактные линзы, 38%, 45% влагосодержания; задняя вершинная рефракция от - 10,00 до + 6,00; общий диаметр линзы 14,0; 14,7; базовый радиус 8,6; светопропускание – 95%.

3. Подготовка к работе изделия

Изделие полностью готово к применению и не требуют дополнительной подготовки.

4. Порядок работы изделия

Надевание контактных линз

Удобнее всего это делать перед зеркалом, наклонив голову вперед и глядя в зеркало вдаль.

Выньте линзу из контейнера.

Чтобы не путать линзы, всегда начинайте установку с одного и того же глаза. Осмотрите линзу и убедитесь в том, что она не повреждена.

Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки.

Оттяните верхнее веко к брови пальцем левой руки таким образом, чтобы оно не прикрывало глаз, даже если вы моргнете.

Оттяните нижнее веко средним пальцем правой руки.

Указательным пальцем наложите линзу на склеру ниже роговицы.

Убедившись в том, что линза разместилась на глазу, осторожно уберите палец.

Опустите глаза вниз для точного позиционирования линзы.

Закройте глаза и поворачивайте ими под закрытыми веками.

Повторите все действия для установки второй линзы.

Снятие контактных линз

Всегда снимайте первой ту линзу, с которой начинали установку.

При снятии линз соблюдайте те же правила гигиены, что и при их надевании.

Встаньте перед зеркалом так же, как при установке линз.

Глядя вверх, указательным пальцем сместите линзу вниз на склеру.

Осторожно сожмите линзу между указательным и большим пальцами в местах, соответствующих отметкам 3-х и 9-и часов на циферблате и снимите ее.

- При ощущении дискомфорта или раздражения немедленно обратитесь к офтальмологу.

- Обрабатывать линзы необходимо после каждого периода ношения.
- Линзы рекомендуются устанавливать до нанесения макияжа.
- Следует закрывать глаза при пользовании аэрозолями.
- Перед всеми действиями, совершаемыми с контактными линзами, необходимо тщательно вымыть руки.
- Для безопасного ношения контактных линз необходимо строгое соблюдение сроков их плановой замены.

5. Правила использования и хранения

Уход за контактными линзами

Механическая очистка. Положите линзу на ладонь и нанесите несколько капель очищающего раствора на Ваши линзы. Указательным пальцем аккуратно протрите поверхность линз.

Дезинфекция. Поместите каждую линзу в соответствующую ячейку контейнера. Убедитесь, что свежий раствор полностью покрывает линзы. Тщательно закройте крышки и оставьте линзы в нем минимум на 4 часа. Ни в коем случае не используйте дважды один и тот же раствор.

Хранение

Для хранения линз используют специальный контейнер. Мягкие контактные линзы содержат значительное количество воды, поэтому для сохранения своих параметров неизменными и для предотвращения заражения микроорганизмами должны храниться в специально предназначенном для этого растворе, когда не находятся на глазах. Эти же растворы применяют для чистки, дезинфекции и ополаскивания линз, для растворения ферментных таблеток и для смачивания линз.

Хранить при температуре не выше 30С

Хранить в защищенных от света местах.

Не замораживать.

Срок годности

Указан на упаковке.

Утилизация

Подлежит утилизации через бытовую сеть.

Использованные упаковки не бросать в канализацию.

Промышленности и
промышленности
3 листа



В