

Инструкция по использованию инструментов для проведения сердечно-сосудистой ангиографии

Стерильно. Апирогенно. Только для однократного применения! Не автоклавировать!

Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции.

Показания для применения

Ангиографические инструменты предназначены для проведения ангиографии сердца.

Предостережения

- Предназначены только для одноразового использования. НЕ РЕСТЕРИЛИЗОВАТЬ;
- до начала использования убедитесь в том, что упаковка не повреждена, не используйте пакет, если он открыт или если его упаковка повреждена;
- используйте инструменты только до даты, указанной на упаковке;
- неправильное применение может повлечь за собой травму пациента;
- используйте только жидкое контрастное вещество;
- диаметр катетера не должен превышать диаметра сосуда;
- инструменты могут быть использованы только врачом, специально обученным для проведения процедуры ангиографии;
- ангиография должна проводиться в стационаре, в котором, в случае осложнений, может быть осуществлена экстренная помощь;
- избегайте чрезмерного пережатия шахты катетера, так как это может привести к трудностям при введении;
- Biometrix не несет ответственности за любой прямой или косвенный вред, причиненный использованием рестерилизованных устройств.
- для снижения уровня риска заражения СПИДом или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Противопоказания

Отсутствуют.

Рекомендации.

- Проверьте пакет перед использованием. Перед использованием катетеры должны быть проверены на пропускную способность. Проверьте, соответствует ли выбранный катетер по размеру и по типу необходимому. Не используйте, если повреждена его внутренняя упаковка, так как это может привести к потере стерильности.
- Приготовьте катетер к введению. Максимально ближайшее промывочное отверстие находится в колпачке катетера. Зажим катетера – место, нуждающееся в осторожном обращении. Неосторожность приводит к разрушениям внешнего покрытия катетера.
- Приготовьте разбавленное контрастное вещество и стерильный физиологический раствор;
- Наберите в шприц 3 мл контрастного вещества;
- Продвижение катетера производится непрерывно, медленным движением вперед, постоянно контролируясь.
- Удержание в нужном положении обеспечивается продвижением катетера вперед.
- Введите контрастное вещество только при достижении цели.

Внимание:

- Не начинать инфузий до того, как ближайший просвет не будет обнаружен.
- Разбавленный препарат и не разбавленный препарат могут вводиться одновременно.
- Одновременное вливание двух неразбавленных препаратов не рекомендуется.

Рекомендации по хранению

Храните при комнатной температуре (<35о С) в сухом темном месте. Используйте только до даты, указанной на упаковке.