

1. Консоли настенные ЭЛЕМА-Н КМПЦ, Элема-Н КМПЦ-2
2. Консоль палатная напольная ЭЛЕМА-Н КМПН
3. Консоль реанимационная настенная ЭЛЕМА-Н КМР1
4. Шины (рельсы) для навески принадлежностей консоли Ш800-Ш2
5. Клапаны газовые стандарта DIN со штекерами на: O ₂ , CO ₂ , N ₂ O,
6. Модули газового клапана (коробка клапанная) Элема-Н МКГ1,
7. Увлажнитель кислорода с расходомером Элема-Н УК1-1000 на 1
8. Дополнительные принадлежности на шину: лампа, корзина, таз.
9. Клемма, штекер уравнивания потенциалов стандарта DIN
10. Регулятор-стабилизатор вакуума ЭЛЕМА-Н СДЗ
11. Банки аспирационные поликарбонатные автоклавируемые Э
12. Многоцветный пластиковый контейнер SEP-T-VAC для сбора
13. Пакет SEP-T-VAC для сбора экссудата одноразовый 1,2 л и 2л
14. Стойки аспирационные Элема-Н СА1- Элема-Н СА2И с регул
15. Трубка ПВХ, ТСА армированная полиамидной нитью на дав
16. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ1
17. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ1М
18. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ2 в корпусе из АБС пластика
19. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ2 на мобильной стойке с модул
20. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ2М в корпусе из АБС пластика
21. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ2М на мобильной стойке с мод
22. Отсасыватель Элема-Н АМ2М на тележке с емкостями на об
23. Аппарат для прерывания беременности Элема-Н АГ1 в корп
24. Аппарат Элема-Н АГ1 на мобильной стойке с модулем навес
25. Дымоотсасыватель Элема-Н АМ2ДО
26. Гинекологический комбайн Элема-Н УГ1
27. Отсасыватель для скорой помощи Элема-Н СП 1 (+ 12В/аккумулятор)
28. Отсасыватель послеоперационный носимый Элема-Н ПРО1
29. Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ4Т для послеоперационного периода на 4 пациента
30. Отсасыватель портативный Элема-Н СП1ДМ
31. Аппарат аспирационно-нагнетательный Элема-Н АМ4АН
32. Аппарат для розлива лекарственных жидкостей ЭЛЕМА-Н АМ2А
33. Отсасыватель ручной ОРП-01, отсасыватель ножной АПМ-МП-1
34. Аппарат Боброва Элема-Н АБ1Н для ирригоскопии и нагнетания на 1 л и 2,5 л
35. Аппарат Боброва Элема-Н АБ1Н для аспирации на 2,5 л с ручным или ножным отсасыв.
36. Аппарат Боброва Элема-Н АБ1Н-УК1000 для увлажнения кислорода
37. ЛОР-комбайн Элема-Н ЛК 1 трехсекционный
38. Кресло пациента оториноларингологическое Элема-Н КПО1, стул врача Элема-Н СВО1
39. Наконечники аспирационные многоцветный и одноразовые для гинекологии
40. Наконечники аспирационные многоцветные для липосакции
41. Ручка для наконечника аспирационного
42. Наконечники аспирационные многоцветные для хирургии
43. Катетеры отсасывающие Yankauer с вакуум-контролем для хирургии
44. Набор плевральный №20 (100 дренажей+стilet) Ø 6x4 (400) мм
45. Оливки для промывания носа и продувания слуховых труб
46. Трубка ПВХ, ПВХС, ТСМ
47. Мебель медицинская из ЛДСП

Копии верны
Много просят

Элема-Н

и прокурировано
13 листов

Копии верны


Регистратор ООО
Элема-Н



ООО "ЭЛЕМА-Н"

Отсасыватель хирургический жидкостей и
воздуха из ран и полостей
четырёхканальный ОХ-8/40-"Элема-Н"

Руководство по эксплуатации
ЭЛМН.941624.004РЭ

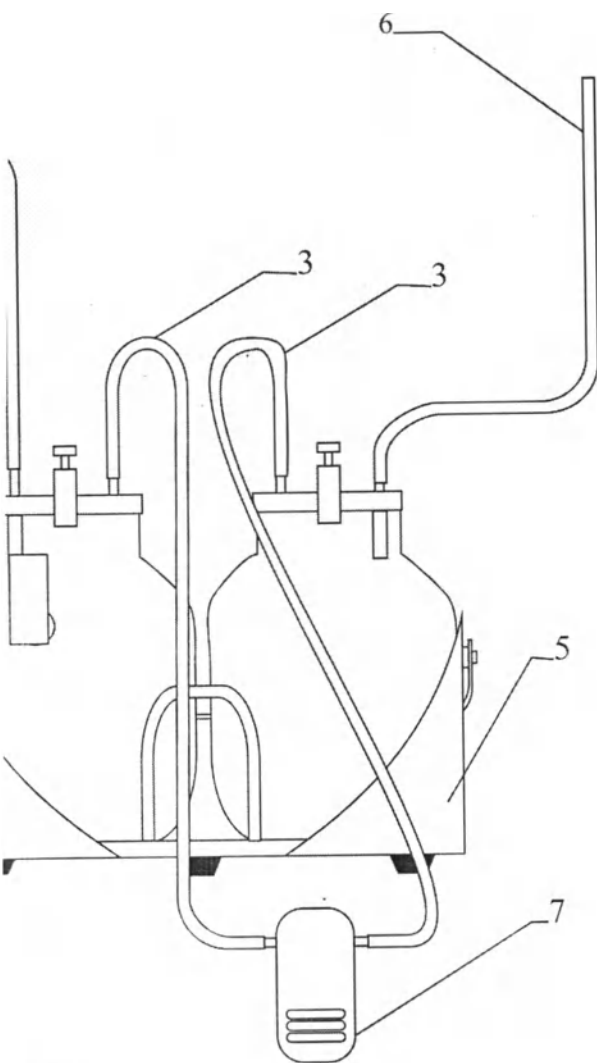

К-8/40
напом

Характерные неисправности и методы их устранения

10.1.Перечень неисправностей, устраняемых силами потребителя, иведён в табл.4.

Таблица 4

Вид неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
1	2	3
При включении сетевых переключателей индикаторы не загораются, характерного шума не появляется	Плохо вставлена сетевая вилка в розетку; Отсутствует напряжение в сети	Вставить вилку в розетку Проверить наличие напряжения в сети
При работе отсасывателя слышен характерный шум, на встроенных приборах визуального контроля на СД и отсасывателя нулевые, либо минимальные показания (ручки регуляторов вакуума на СД закручены по часовой стрелке до упора)	Неплотно одеты шланги на патрубки герметизирующих крышек емкостей контейнера, на входы отсасывателя и СД, на тройники Неплотно одеты герметизирующие крышки на емкости контейнера Неплотно одета крышка бактериального фильтра	Одеть плотнее шланги Одеть плотно герметизирующую крышку и затянуть зажимной винт Затянуть зажимные винты крышки бактериального фильтра