

Общество с ограниченной ответственностью «ЭХО Мед»

(ООО «ЭХО Мед»)

630105, Россия Новосибирская область г. Новосибирск ул. Кавалерийская д.2

тел. +7 913-922-95-37, ИНН 5402014884, КПП 540201001, ОГРН 1165476058197

Р.СЧ 40702810964240012601 в ПАО
«Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810250040000870
БИК 045004870
ИНН 8601000666
КПП 540643002

Инструкция по применению

медицинского изделия

**Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые по ТУ 9398-001-41365529-2016
следующих артикулов: 1; 2; 3; 4; 5**

Назначение: «Бахилы медицинские одноразовые, полиэтиленовые по ТУ 9398-001-41365529-2016 следующих артикулов: 1; 2; 3; 4; 5» (далее – бахилы) предназначены для защиты от загрязнения и предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Изделия нестерильные одноразовые.

Описание: Бахилы по внешнему виду представляют собой синего цвета с гладкой поверхностью защитные чехлы из пленки, изготовленной из полиэтилена (марки 277-85 (ПНД (HDPE) 100%), с добавлением суперконцентрата синий ТС F510.02-LDPE) прямоугольной формы с припаянной сверху резинкой (единичная латексная (Cariflex IR0307 KU) нить (0,8-1,0) мм в текстильной оплётке сверху – нить 8,4 текс из полиамида марки (РА 6) не окрашенная).

Бахилы могут быть упакованы в индивидуальную или групповую по 100 пар упаковку - пленку ПОФ (бесцветную по ТУ 2245-001-99977326-2009), края которой сварены термическим способом.

При покупке важно учитывать размер и предполагаемое время носки:

не менее 0,5 часа для бахил артикула 1 из полиэтилена (ПНД (HDPE) толщиной 10 мкм,
не менее 1,0 часа для бахил артикула 2 из полиэтилена (ПНД (HDPE) толщиной 20 мкм,
не менее 2,0 часов для бахил артикула 3 из полиэтилена (ПНД (HDPE) толщиной 30 мкм,
не менее 3,0 часов для бахил артикула 4 из полиэтилена (ПНД (HDPE) толщиной 40 мкм и
не менее 4,0 часов для бахил артикула 5 из полиэтилена (ПНД (HDPE) толщиной 50 мкм.

Комплект поставки:

- бахилы требуемого артикула – 1000 или 2000 или 2500 или 3500 или 4000 пар;
- инструкция по применению – 1 шт;
- упаковка – 1 шт.

Размеры: Ширина бахил: (15,0±1) см; длина бахил: (39,0±1) см для артикулов 1; 2; длина бахил: (40,0±1) см для артикулов 3; 4; 5.

Показания к применению

Бахилы применяются персоналом и пациентами любых возрастных категорий, без ограничения по состоянию здоровья для поддержания чистоты и соблюдения требований гигиены в условиях медицинских ЛПУ, а также в организациях общественного питания, косметических салонах и быту.

Порядок и условия применения: извлечь бахилы из первичной упаковки, растянуть резинку по ширине и надеть на уличную обувь, начиная с носка.

Применять в любых медицинских учреждениях и домашних условиях.

Побочное действие: Нет.

Противопоказания: Нет.

Меры предосторожности: Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Хранение и транспортирование: Транспортирование изделий должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования в ящиках – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, избегая сдавливания изделий.

Ящики хранят в штабеле высотой не более 2,5 м в крытых складских помещениях.

Запрещено хранить и транспортировать бахилы рядом с нагревательными приборами, в местах с повышенной температурой и рядом с предметами обладающими сильным запахом (бытовая химия). Расстояние от пола до нижней части штабеля, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между штабелями - не менее 0,7 м.

Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Не рекомендуется подвергать изделия длительному воздействию отрицательных температур, прямых солнечных лучей и чрезмерному физическому давлению.

Дезинфекция и утилизация

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

Использованные бахилы, в случае необходимости, дезинфицируют растворами перекиси водорода, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113).

Утилизацию бахил осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Гарантия изготовителя: Изготовитель ООО «ЭХО Мед», 630105 г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, д.2 (тел. 8-913-922-95-37) гарантирует соответствие Бахил медицинских одноразовых, полиэтиленовых по ТУ 9398-001-41365529-2016г заявленным свойствам в течение срока годности, при условии соблюдения правил хранения, применения и транспортирования.

Срок годности бахил - 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с момента приобретения.

Бахилы применяют одноразово, не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

Генеральный директор
МП



К.В. Щетков



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 2 листов
Подпись 

