

ОКП 93 9161

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Корпорация МЕДТОРГ»

В.И.Кукуев

« 16 » 12 2002 г.



НАБОР ПРИСПОСОБЛЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ НПС-«КОР-МЕД»

Этикетка
30.01 ЭТ

2002

Име. № подл	Подп. и дата	Взам инв. №	Име. № дубл	Подп. и дата

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор приспособлений стоматологических для моделирования пломб НПС-«Кор-Мед» (в дальнейшем - приспособления) предназначен для применения в стоматологических отделениях клиник, больниц, поликлиник и стоматологических кабинетах.

Приспособления (за исключением кольца фиксирующего, матрицедержателя, щипцов для установки кольца фиксирующего, матриц металлических контурных секционных малых и малых с выступом, матриц металлических контурных секционных больших и больших с выступом, матриц металлических форм 1 и 2) являются изделиями однократного применения.

Приспособления изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от 10 до 35 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Приспособления изготовлены из следующих материалов:

- матрицы контурные светопрозрачные для моляров и премоляров, пластины сепарационные прямоугольные прозрачные из пленки лавсановой полиэтилентерефталатной по ТУ 6-41-1576 и ТУ 2255-408-05761784;
- матрицы металлические контурные секционные малые и малые с выступом, матрицы металлические контурные секционные большие и большие с выступом, матрицы металлические форм 1 и 2 из стали коррозионностойкой марки 1Х18Н10Т, листовой толщиной 0,05 мм по ГОСТ 5632-72;
- фиксирующее устройство из фольги алюминиевой пищевой марки АМц или АМг по ГОСТ 13726-97;
- кольцо фиксирующее из стали коррозионностойкой марки 20Х13, проволоки диаметром 1,5±0,1 мм по ГОСТ 5632-72;
- щипцы для установки кольца фиксирующего, матрицедержатель из стали коррозионностойкой марки 20Х13, формата разного по ГОСТ 5632-72;
- клинья деревянные фиксирующие из древесины повышенной плотности (береза, дуб, клен);
- потребительская упаковка (тара) из пленки поливинилхлоридной по ГОСТ 25250-88, пленки виниловой каландрированной КПС по ГОСТ 16398-81.

Име. № подл.	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата				
Име. № подл.	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лит.	№ докум.	Дата
				Разраб.	Фирсов		
				Провер.	Кукуев	16.12.02	
				30.01 ЭТ			
				Набор приспособлений стоматологических для моделирования пломб НПС-«КОР-МЕД» ЭТИКЕТКА			
				Лит.	Лист	Листов	
					2	8	
				ООО «Корпорация МЕДТОРГ»			

2.2 Средний срок хранения приспособлений до начала использования – не более 1,5 лет.

2.3 Масса приспособлений не более, г:

- матрицы контурные светопрозрачные для моляров и премоляров – 0,05;
- матрицы контурные с фиксирующим устройством для моляров и премоляров – 0,35;
- матрицы металлические контурные секционные малые и малые с выступом, матрицы металлические контурные секционные большие и большие с выступом – 0,1;
- матрицы металлические форм 1 и 2 – 0,2;
- кольцо фиксирующее – 1,5;
- щипцы для установки кольца фиксирующего – 55;
- матрицедержатель – 10;
- клинья деревянные фиксирующие – 0,02;
- пластины сепарационные прямоугольные прозрачные – 0,07.

2.4 Приспособления устойчивы к дезинфекции в соответствии с ОСТ 42-21-2.

2.4.1 Матрицы контурные светопрозрачные для моляров и премоляров, матрицы контурные с фиксирующим устройством для моляров и премоляров, пластины сепарационные прямоугольные прозрачные устойчивы к дезинфекции химическим методом в среде перекиси водорода 3 %-ной концентрации при температуре не менее 18 °С и выдержке 80+5 мин или в 1%-ном растворе хлорамина в течение 30+5 мин.

2.4.2 Клинья деревянные фиксирующие устойчивы к дезинфекции воздушным методом.

2.4.3 Матрицы металлические контурные секционные малые и малые с выступом, матрицы металлические контурные секционные большие и большие с выступом, матрицы металлические форм 1 и 2, кольцо фиксирующее, щипцы для установки кольца фиксирующего, матрицедержатель устойчивы к дезинфекции в тройном растворе: 2 % формалина (по формальдегиду), 0,3 % фенола, 1,5 % натрия двууглекислого в течение 45+5 мин или в 3 % растворе хлорамина при температуре не менее 18 °С в течение 60+5 мин.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

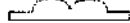
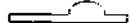
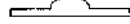
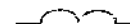
3.1 Комплект поставки приспособлений должен соответствовать следующим требованиям:

- приспособления одного или группы наименований, указанных в таблице 1, в количестве кратном 5 или 3, кольцо фиксирующее, щипцы для установки кольца фиксирующего или матрицедержатель;
- этикетка 30.01 ЭТ – 1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	30.01 ЭТ	Лист
						3

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Обозначение КД
Матрица контурная светопрозрачная для премоляров формы 1 	30.01	КМ 004.001.000ТР
То же формы 2 	30.02	
То же формы 3 	30.03	
То же формы 4 	30.04	
Матрица контурная светопрозрачная для моляров формы 1 	30.11	КМ 004.002.000ТР
То же формы 2 	30.12	
То же формы 3 	30.13	
То же формы 4 	30.14	
Матрица контурная светопрозрачная с фиксирующим устройством для премоляров формы 1 	31.01	КМ 004.003.000ТР
То же формы 2 	31.02	
То же формы 3 	31.03	
То же формы 4 	31.04	
Матрица контурная светопрозрачная с фиксирующим устройством для моляров формы 1 	31.11	КМ 004.004.000ТР
То же формы 2 	31.12	
То же формы 3 	31.13	
То же формы 4 	31.14	
Матрица металлическая контурная секционная малая с выступом	32.01	КМ 004.005.000ТР
Матрица металлическая контурная секционная малая	32.02	
Матрица металлическая контурная секционная большая с выступом	32.11	
Матрица металлическая контурная секционная большая	32.12	
Матрица металлическая формы 1	33.01	КМ 004.006.000ТР
То же формы 2	33.11	
Матрицедержатель универсальный	39.01	КМ 004.007.000ТР
Кольцо фиксирующее	39.02	КМ 004.009.000ТР
Щипцы для установки кольца фиксирующего	39.03	КМ 004.008.000ТР
Клин деревянный фиксирующий сечением 1,5x1,5 мм, длиной 13 мм	40.01	КМ 004.012.000ТР
То же 1,5x1,5 мм, ---//--- 16 мм	40.11	
То же 2,0x1,5 мм, ---//--- 13 мм	40.02	
То же 2,0x1,5 мм, ---//--- 16 мм	40.12	
То же 2,0x2,0 мм, ---//--- 13 мм	40.03	
То же 2,0x2,0 мм, ---//--- 16 мм	40.13	
Пластина сепарационная прямоугольная прозрачная, шириной 8 мм	50.08	КМ 004.011.000ТР
То же 10 мм	50.10	

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

30.01 ЭТ

Лист

4

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

3.2 Варианты рекомендуемой комплектации матриц контурных светопрозрачных для моляров и премоляров, матриц контурных с фиксирующим устройством для моляров и премоляров, матриц металлических контурных секционных малых и малых с выступом, матриц металлических контурных секционных больших и больших с выступом, колец фиксирующих, щипцов для установки колец фиксирующих, матрицедержателей, клиньев деревянных фиксирующих, пластин сепарационных прямоугольных прозрачных приведены в приложении. Изделия могут поставляться в розницу или в другой комплектации по требованию заказчика.

3.3 Приспособления поставляются в потребительской упаковке в ложемент-пеналах, уложенных в транспортную упаковку.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 После вскрытия упаковки провести дезинфекцию приспособлений, не использованных ранее, в соответствии с п. 2.4.

4.2 После санобработки приспособления хранить в стерильных коробках с закрытыми крышками, в стерилизаторах или в специально отведенном месте, сохраняющем стерильность. Время хранения дезинфицированных изделий в закрытых коробках не должно превышать 10 часов.

При несоблюдении этого условия приспособления перед использованием необходимо повторно дезинфицировать.

4.3 Использованные приспособления утилизируются.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Приспособления соответствуют техническим условиям ТУ 9437-001-57725639-2002 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись лиц, ответственных за приемку

М.П.

Примечание: Форму заполняет предприятие-изготовитель

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

6.1 Приспособления упакованы _____
(наименование или код предприятия, согласно требованиям, производившего упаковывание)
предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания _____

Упаковывание произвел _____

Примечание: Форму заполняет предприятие, производящее упаковывание

приспособлений

30.01 ЭТ

Лист

5

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие приспособлений требованиям технических условий ТУ 9437-001-57725639-2002 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения до начала использования – 1,5 года со дня изготовления.

8 ХРАНЕНИЕ

8.1 Матрицы контурные светопрозрачные для моляров и премоляров, матрицы контурные с фиксирующим устройством для моляров и премоляров, матрицы металлические контурные секционные малые и малые с выступом, матрицы металлические контурные секционные большие и большие с выступом, кольца фиксирующие, щипцы для установки колец фиксирующих, матрицедержатели, клинья деревянные фиксирующие, пластины сепарационные прямоугольные прозрачные следует хранить в помещении при температуре от –50 до 40 °С в транспортной упаковке предприятия-изготовителя, а в условиях эксплуатации – в потребительской упаковке.

Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1 В случае обнаружения дефектов на изделиях или некомплектности при первичной приемке владелец должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

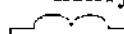
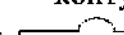
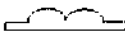
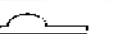
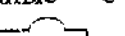
- 1) заявку на замену изделий с указанием адреса потребителя и номера телефона;
- 2) дефектную ведомость;
- 3) копию свидетельства о приемке и об упаковывании.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. име. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	30.01 ЭТ	Лист
						6

ПРИЛОЖЕНИЕ
(справочное)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ АССОРТИМЕНТНАЯ НОМЕНКЛАТУРА
ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ
НАБОРА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЛОМБ НПС-«КОР-МЕД»

Артикул (для заказа)	Наименование продукции	Кол-во, шт
30.01	Матрицы контурные светопрозрачные для премоляров формы 1 	30
30.02	Матрицы контурные светопрозрачные для премоляров формы 2 	30
30.03	Матрицы контурные светопрозрачные для премоляров формы 3 	30
30.04	Матрицы контурные светопрозрачные для премоляров формы 4 	30
30.11	Матрицы контурные светопрозрачные для моляров формы 1 	30
30.12	Матрицы контурные светопрозрачные для моляров формы 2 	30
30.13	Матрицы контурные светопрозрачные для моляров формы 3 	30
30.14	Матрицы контурные светопрозрачные для моляров формы 4 	30
30.50	Набор матриц контурных светопрозрачных для премоляров 4-х форм	4x15
30.51	Набор матрицы контурных светопрозрачных для моляров 4-х форм	4x15
30.60	Универсальный набор матриц контурных светопрозрачных 8-ми типов	8x15
31.01	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для премоляров формы 1 	10
31.02	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для премоляров формы 2 	10
31.03	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для премоляров формы 3 	10
31.04	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для премоляров формы 4 	10
31.11	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для моляров формы 1 	10
31.12	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для моляров формы 2 	10
31.13	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для моляров формы 3 	10
31.14	Матрицы контурные светопрозрачные с фиксирующим устройством для моляров формы 4 	10
31.50	Набор матриц контурных светопрозрачных с фиксирующим устройством для премоляров 4-х форм	16

30.01 ЭТ

Лист

7

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

31.51	Набор матриц контурных светопрозрачных с фиксирующим устройством для моляров 4-х форм	16
31.60	Универсальный набор матриц контурных светопрозрачных с фиксирующим устройством 8-ми типов	32
32.01	Матрицы металлические контурные секционные малые с выступом	10
32.02	Матрицы металлические контурные секционные малые	10
32.11	Матрицы металлические контурные секционные большие с выступом	10
32.12	Матрицы металлические контурные секционные большие	10
32.50	Набор матриц металлических контурных секционных (малые с выступом № 32.01, малые № 32.02)	(15) 5+10
32.51	Набор матриц металлических контурных секционных (малые с выступом № 32.01, большие с выступом № 32.11, большие № 32.12)	(25) 10+5+10
32.60	Набор матриц металлических контурных секционных (малые с выступом № 32.01, малые № 32.02, большие с выступом № 32.11, большие № 32.12, кольцо фиксирующее № 39.02)	(30) 5+10+5+10
33.01	Матрицы металлические для премоляров	12
33.11	Матрицы металлические для моляров	12
39.01	Матрицедержатель универсальный	1
39.02	Кольцо фиксирующее	1
39.03	Щипцы для установки кольца фиксирующего	1
40.50	Клинья деревянные фиксирующие длиной 13 мм и 16 мм, сечением 1,5х1,5 мм (№ 40.01 и № 40.11)	2х50
40.51	Клинья деревянные фиксирующие длиной 13 мм и 16 мм, сечением 1,5х1,5 мм и 1,5х2,0 мм (№ 40.01 и № 40.12)	2х50
40.52	Клинья деревянные фиксирующие длиной 13 мм и 16 мм, сечением 1,5х2,0 мм и 1,5х1,5 мм (№ 40.02 и № 40.11)	2х50
40.60	Клинья деревянные фиксирующие длиной 13 мм и 16 мм, сечением 1,5х1,5 мм и 1,5х2,0 мм (№ 40.01, № 40.02, № 40.11 и № 40.12)	4х50
50.08	Пластины сепарационные прямоугольные прозрачные 8 мм	100
50.10	Пластины сепарационные прямоугольные прозрачные 10 мм	100

Примечание: по требованию потребителя предусматриваются отдельные поставки по заказу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	30.01 ЭТ	Лист
						8