

ИНСТРУКЦИЯ

по применению катетеров (дренажей) одно- и многоканальных педиатрических для активного дренирования гнойных полостей с дренажным резервуаром помпой

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ.** Катетеры (дренажи) предназначены для активного дренирования гнойных полостей и используются в детских хирургических отделениях клиник и больниц.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.** Катетеры (дренажи) имеют общую длину не менее 650 мм. Катетеры (дренажи) многоканальные состоят из трубчатого многоканального элемента длиной 150...250 мм, объединенного 3, 5 и 8 дренажными трубками, отводной трубки длиной не менее 400 мм. В дренажных трубках имеются отверстия. Усилие разрыва трубчатого элемента одноканальных катетеров (дренажей) и усилие разрыва мест соединений многоканальных катетеров (дренажей) не менее 20 Н.

Маркоразмер	Количество каналов	Диаметр дренажной трубки $D \pm 0,5$	Диаметр отверстия $d \pm 0,5$	Количество отверстий, не менее	Масса, г, не более
ДП-1	1	5,0	3	10	10
ДП- 3	3	4,5	3	20	50
ДП- 5	5	4,5	3	40	60
ДП- 8	8	2,0	1	60	40

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- малигнизация ран
- несанированные очаги остеомиелита
- кровотечение в ране
- некротические раны и раны, представленные рубцовой тканью, кишечные и требующие обследования гнойные свищи, раны, частью которых являются стенки внутренних органов или сосуды
- неадекватность или наличие психического заболевания у пациента.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.

- болевой синдром

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

- обработать рану
- наложить катетер (дренаж) отверстиями на рану
- зафиксировать пленкой с липкой основой
- подсоединить катетер (дренаж) к резервуару и производить отсос жидкости (гноя).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование производится при температуре не ниже минус 10 и не выше плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 50 %.

6.2 Хранение производится при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 50 %. Катетеры (дренажи) должны храниться в закрытых помещениях в закрытых помещениях на стеллажах в первичной упаковке и защищены от прямого ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп. Открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Должны быть приняты меры защиты катетеров (дренажей) от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

7.2 При работе с катетером (дренажем) не следует подвергать ее кручениям и случайным изгибам, приводящим к остаточной деформации.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация катетеров (дренажей) должна проводиться по СанПин 2.1.7.2790, как отходы класса Б.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

катетер(дренаж)	- 1 шт
резервуар помпа для сбора жидкости объемом 250 мл	- 1 шт
переходник размером 2,5/4 мм	- 1 шт
зажим-клипса	- 1 шт.
инструкция по применению	- 1 экз.
этикетка	- 1 экз.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие катетеров (дренажей) требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

10.2 Срок годности 1 год с даты стерилизации.

Генеральный директор АО «МедСил»



Д.Ю.Зиненко

Пронумеровано
и прошнуровано 3 листа



Генеральный директор
АО «МедСил»
Д.Ю.Зиненко