

«Утверждаю»

Директор ООО «Медицинская
Компания «Камелот»



А.А. Назаров

Ирина 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ
По применению
**Комплект одежды защитной врача-инфекциониста
одноразовый, стерильный**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Назначение.

Комплект одежды защитной врача-инфекциониста одноразовый, стерильный (далее по тексту – «Комплект»), предназначен для применения взамен медицинской одежды из хлопчатобумажных тканей для профилактики инфицирования медицинского персонала при работе с больными с гнойно-воспалительными, инфекционными и вирусными заболеваниями, а также в условиях риска распространения патогенной микрофлоры.

Комплект может быть использован в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

В состав Комплекта входят:

1. Халат хирургический (противоэпидемиологический) – 1 шт.
2. Куртка хирургическая – 1 шт.
3. Брюки хирургические – 1 шт.
4. Фартук хирургический – 1 шт.
5. Нарукавники хирургические – 1 пара.
6. Бахилы хирургические (высокие) – 1 пара.
7. Шапочка-шлем хирургическая (противоэпидемиологическая) – 1 шт.
8. Маска хирургическая (трехслойная) – 1 шт.
9. Полотенце впитывающее – 1 шт.
10. Перчатки хирургические – 1 шт.

В состав комплекта входят изделия прямоугольной и контурной формы, изготовленные из нетканых материалов (спанбонд типа S, SS, SMS, SMMS; спанлейс), из ламинированных нетканых материалов (спанбонд типа S, SS, SMS, SMMS).

Комплект в стерильном исполнении.

Стерилизация радиационным способом. Стерилизующая доза от 15 кГр до 30 кГр. Газовым способом (окисью этилена).

3. Противопоказания к применению.

Не применять при нарушении целостности упаковки.

Комплект однократного применения.

4. Подготовка к работе изделия.

Перед применением необходимо проверить целостность упаковки.

5. Порядок работы изделия.

Вскрыть упаковку и выбрать необходимые для работы изделие.

6. Правила хранения и использования.

Комплекты транспортируются любым видом крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов на данном виде транспорта.

Условия транспортирования по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение комплектов должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 по ГОСТ 15150.

Комплекты должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом и неприятным вкусом, или должны храниться в таре, защищенной от этих паров.

Сшито и заверено печатью 3
(774) лист 9

Назаров А.А.

А.А.

