

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Испытательного
Центра медицинских изделий
ООО «Профессиональное
Сертификационное Агентство»

Л.Ю. Никифорова

«11» сентября 2009 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО НПО «Пульс+»

Л.М. Кузякова

«27» августа 2009 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению бинтов марлевых медицинские стерильных и нестерильных

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные предназначены для использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в качестве средства личной гигиены.

Бинты марлевые медицинские ГОСТ 1172-93 являются перевязочными средствами, которые применяются в качестве механического барьера, для фиксации перевязочных средств (компрессии), наложения и абсорбции экссудата. Бинты могут применяться в комплексе с другими медицинскими средствами. По функциональным свойствам соответствуют медицинским требованиям.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бинты марлевые медицинские микробиологически безопасны. Гигроскопичны, воздухопроницаемы. С лекарственными средствами не взаимодействует.

Бинты марлевые медицинские производятся в стерильном и нестерильном исполнениях, в плотных и неплотных рулонах, спрессованные в овальную или прямоугольную формы.

Стерильные — бинт завертывают в пергаментную оболочку в 1,5 оборота. Оба торцевых края оболочки загибают и накладывают на бинт, затем продолжают завертывать бинт до тех пор, пока оболочка составит не менее 2,0 оборота. На загнутые края оболочки по длине и ширине наносят равномерно слой клея.

Нестерильные — бинты одинаковых размеров упаковывают в пленочную оболочку, края которой сваривают термическим способом, индивидуально или в количестве, равном 5, но не более 30 шт или один слой оберточной бумаги, подпергамент или пергамент.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания и побочные действия не обнаружены.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием изделия необходимо вскрыть упаковку. На упаковке стерильных бинтов указано «Оболочку разорвать, перекрутив бинт».

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Применять для изготовления и наложения повязок на пораженные части тела, для нанесения и снятия косметических средств, для целей личной гигиены.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Упакованное изделие хранят согласно ГОСТ 7000-80 в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнения, механические повреждения и действия солнечных лучей.

Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Срок годности бинтов марлевых стерильных – 5 лет.

Условие отпуска из аптек – без рецепта врача.

Рекламации на качество изделия направлять в адрес предприятия-изготовителя (355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 72/1 ООО НПО «Пульс+», тел/факс: (865 2) 271-271).

