

Итого введено
ген. дир. Виноградов Д. В.



СОГЛАСОВАНО

Руководитель Испытательного
Центра медицинских изделий
ООО «Профессиональное
Сертификационное Агентство»

Л.Ю. Никифорова

«11» сентября 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НПО «Пулс+»

Л.М. Кузякова

«22» августа 2009 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению ваты медицинской гигроскопической хлопковой стерильной и
нестерильной

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Вата медицинская гигроскопическая хлопковая хирургическая, глазная и гигиеническая стерильная и нестерильная предназначена для использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, в качестве средства личной гигиены.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вата медицинская гигроскопическая, воздухопроницаемая выпускается стерильной и нестерильной. Вата выпускается массой от 25 до 250г. Стерильная вата выпускается в пергаментной упаковке. Нестерильная вата выпускается массой - в полиэтиленовой и/или подпергаментной упаковке. В зависимости от назначения медицинскую гигроскопическую вату подразделяется на следующие виды: глазная, хирургическая и гигиеническая вата. Медицинская гигроскопическая глазная и гигиеническая вата вырабатывается из хлопкового волокна. Медицинская гигроскопическая хирургическая вата вырабатывается из хлопкового волокна или смеси хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном. По физико-химическим и химическим показателям она должна соответствовать требованиям ГОСТ 5556-81. Стерилизуется вата в соответствии с правилами, утвержденными органами здравоохранения РФ.

Вата медицинская стерильная и нестерильная – микробиологически безопасная. Гигроскопична, воздухопроницаема. С лекарственными средствами не взаимодействует.

Рулоны ваты медицинской гигроскопической хлопковой стерильной упакованы во внутренний слой бумаги в 1,5 оборота, торцы заделаны конвертом без заклеивания с последующим тугим заворотом еще в 1,5 оборота пергамента. Рулон, упакованный в бумагу, заклеивают, а торцевые стороны заделывают

конвертом. По согласованию с потребителем выпуск рулонов стерильной ваты производится без обматывания ниткой. На упаковке стерильной ваты указано «Оболочку разорвать, перекрутив упаковку».

Рулоны ваты медицинской гигроскопической хлопковой нестерильной упакованы в полиэтиленовую пленку или один слой оберточной бумаги, подпергамент или пергамент. Вата 250г упаковывается в 2 слоя: внутренний - бумажный и внешний - полиэтиленовая упаковка.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания и побочные действия не обнаружены.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед использованием изделия необходимо вскрыть упаковку. На упаковке стерильной ваты указано «Оболочку разорвать, перекрутив упаковку».

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Применять для изготовления тампонов, при наложении повязок на пораженные части тела, для нанесения и снятия косметических средств, для целей личной гигиены.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Упакованное изделие хранят согласно ГОСТ 7000-80 в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности, в условиях, предотвращающих загрязнения, механические повреждения и действия солнечных лучей.

Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Срок годности ваты медицинской стерильной – 5 лет.

Условие отпуска из аптек – без рецепта врача.

Рекламации на качество изделия направлять в адрес предприятия-изготовителя (355000, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 72/1 ООО НПО «Пульс+», тел/факс: (865 2) 271-271).

Краснодарский край
Генеральный директор
ФГУ "УПС"
В.В. Виноградов

