

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_ г. № _____

Генеральный директор ООО

«Ардей-Импэкс»



Мирзоян О.И.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению одноразовой медицинской одежды

Комплект одноразовой медицинской одежды включает: бахилы – 1 пара, шапочка – 1 шт, маска лицевая – 1 шт.

Изделия предназначены для минимизации распространения возбудителей инфекций в помещениях ЛПУ.

Основные технические характеристики Размеры и применяемые материалы

Наименование	Размер (длина×ширина), см	Название материала и его содержание в %
1	2	3
1 Бахилы	36×16	спанбонд 100 %; спанлейс 100 %; мельтблаун 100 %; СМС 100 %; полиэтилен 100%
2 Шапочка	66×15;70×23	спанбонд 100 %; спанлейс 100 %; мельтблаун 100 %
3 Маска лицевая	17×9	СМС 100 %

Изделия изготовлены из нетканого материала с поверхностной плотностью от 40 до 100 г/м² и/или из полиэтиленовой плёнки толщиной от 0,02 до 0,03 мм.

Изделия из нетканого материала должны выдерживать разрывную нагрузку не менее 137 Н. Прочность соединений не менее 137 Н.

Изделия из полиэтиленовой плёнки должны иметь прочность при растяжении не менее 14,7 МПа.

Клеевые швы выполнены с использованием каучуковых и акриловых дисперсий.

Бахилы имеют резинку, вшитую по краю.

Изделия при эксплуатации устойчивы к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150 для исполнения УХЛ категории 4.2.

Методы стерилизации (для изделий, поставляемых стерильными) – радиационный по ГОСТ Р ИСО 11137-1, оксидом этилена по ГОСТ Р ИСО 11135.

Противопоказания к применению

Противопоказания отсутствуют.

Порядок использования и хранения

Перед использованием изделий необходимо убедиться в том, что срок хранения не закончился. Изделие можно использовать только один раз. Не допускается использовать стерильное изделие с повреждённой упаковкой. При вскрытии упаковки изделие должно быть немедленно использовано или утилизировано.

В операционном блоке при выполнении хирургических операций **одноразовая медицинская одежда** используются хирургами, операционными медсестрами, анестезиологами и медсестрами-анестезистами. В санпропускнике операционного блока персонал надевает бахилы, шапочку и входит непосредственно в операционный блок. После обработки рук в предоперационной, операционная сестра в операционной надевает маску.

После окончания операций использованная **одноразовая одежда** собирается в специальную емкость, где в случаях загрязнения биологическими жидкостями обеззараживается одним из регламентированных методов.

В акушерско-гинекологических отделениях **одноразовая медицинская одежда** применяется медицинским персоналом, принимающим роды в родильном зале, а также при выполнении гинекологических операций.

Одноразовая медицинская одежда и белье хранятся в герметичной упаковке в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря. Нарушение целостности упаковки свидетельствует о нарушении стерильности **одноразовой одежды**.

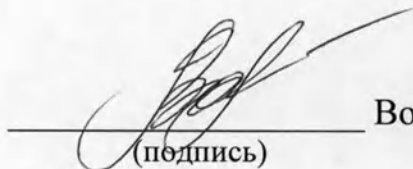
Одноразовая медицинская одежда и белье могут выпускаться в нестерильном варианте. В этом случае хранение осуществляется также в специально оборудованном помещении для хранения мягкого инвентаря.

Время использования **одноразовой одежды** медицинского предназначения составляет: - при проведении хирургических операций (стерильные комплекты) – в течение времени проведения оперативного вмешательства; - при обработке ран – в течение времени проведения обработки раны; - при приеме родов – в течение времени приема родов; - при выполнении гинекологических операций – в течение времени выполнения гинекологической операции; - при проведении интенсивной терапии и реанимации – в течение суток.

Одноразовая медицинская одежда должна храниться согласно требованиям ГОСТ 15150 в специально выделенных помещениях (бельевых). В отделениях должен храниться суточный запас **одноразовой одежды** в отдельных помещениях или в отдельных местах на постах медсестер и других помещениях с чистым режимом при наличии специально выделенных для этой цели встроенных или обычных шкафов.

Использованная **одноразовая медицинская одежда** и **одноразовая одежда** и белье собираются в отделениях в специальную непромокаемую тару (пластиковые или полиэтиленовые мешки, специально оборудованные бельевые тележки или другие аналогичные приспособления) с применением современных технических устройств и передаются в центральную грязную бельевую.

Директор по производству
ООО «Ардейл-Импэкс»


(подпись) Воронков В.Н.

реплено печатью

-Импэкс»

директор

-Импэкс»



О.И.Мирзоян