

«УТВЕРЖДАЮ»



Вуйкова Н.А.

2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии
MembraneBlue, MembraneBlue Dual, VisionBlue, ILMBlue
 (наименование изделия медицинского назначения)

Окрашивающее вещество – это стерильный, не раздражающий раствор.

Показания:

Предназначен для использования в области глазной хирургии переднего и заднего сегмента глаза при проведении витреоретинальных операций. Вещество используется для окрашивания и визуализации эпиретинальных мембран и внутренней предельной мембраны, передних капсул хрусталика облегчает удаление тканей и уменьшает риск повреждения сетчатки, уменьшает риск разрыва капсулорексиса.

Противопоказания:

При использовании раствора в соответствии с предписанием на данный момент противопоказания отсутствуют.

Состав:

Membrane Blue

Трепановый синий - 1,5 мг
 Моноводородный ортофосфат 1,9 мг
 Натриевый двухводородный ортофосфат – 0,3 мг
 Хлорид натрия – 8, 2 мг
 вода для инъекций

MembraneBlue Dual

Трепановый синий брильянтовый- 1,75 мг
 Моноводородный ортофосфат - 1,9 мг
 Натриевый двухводородный ортофосфат – 0,3 мг
 Хлорид натрия – 8, 2 мг
 вода для инъекций

VisionBlue

Трепановый синий - 0,6 мг
 Моноводородный ортофосфат - 1,9 мг
 Натриевый двухводородный ортофосфат – 0,3 мг
 Хлорид натрия – 8 мг
 вода для инъекций

ILM-Blue

Брильянтовый синий – 0,25 мг

Моноводородный ортофосфат - 1,9 мг
Натриевый двухводородный ортофосфат – 0,3 мг
Хлорид натрия – 8,2 мг
вода для инъекций

Применение:

Витреоретинальная хирургия, фактоэмульсификационная хирургия.

Раствор упаковывается в шприц 0,5 или 2,25 мл, к которому должна быть подсоединена тонкая, тупоконечная канюля.

Перед введением раствора, проведите воздушно-жидкостный обмен, т.е. наполните воздухом внешнюю полость стекловидного тела, чтобы избежать растворения раствора. Далее с помощью канюли подводится к мембране сетчатки. Канюля не должна касаться и повреждать сетчатку. Окрашивание произойдет, как только краситель придет в контакт с мембраной сетчатки. Далее удалите излишки красителя со стекловидного тела, чтобы предотвратить растекание раствора. Далее производится обычная процедура витрэктомии или фактоэмульсификации.

Побочные эффекты

- а) Раствор применяется в качестве инъекций в полость стекловидного тела во время процедур глазной хирургии. Рекомендуется немедленно удалять излишки раствора после инъекции.
- б) Особая осторожность должна быть соблюдена при применении раствора для лечения людей, особо чувствительных к каким-либо компонентам раствора.
- с) Не рекомендуется использовать раствор для лечения беременных и кормящих женщин, детей.

Упаковка:

Раствор в стерильном стеклянном шприце 0,5 мл или 2,25 мл.

Хранение:

Храните раствор при комнатной температуре.

Защищайте от мороза.

Не допускайте воздействия света.

Стерилизация:

Стерилизуется автоклавно.

Предупреждения:

- а) Соблюдайте меры предосторожности при работе.
- б) Не переполняйте полость стекловидного тела.
- с) Не допускайте попадания раствора под сетчатку.
- д) Не используйте раствор, если удалена внутренняя предельная мембрана.
- е) При проведении клинических исследований и апробации на животных не была выявлена токсичность препарата.

- f) Изменения в тканях сетчатки не являются последствиями использования раствора.
 - g) Несмотря на то, что аллергических реакций на данный препарат зарегистрировано не было, он может вызвать аллергию у сверхчувствительных людей.
 - h) Не используйте раствор по истечении срока годности, указанного на шприце и на упаковке.
 - i) Не применяйте для лечения беременных женщин и детей.
- Соблюдайте следующее:
- Не используйте препарат, если упаковка повреждена.
 - Шприцы предназначены для одноразового использования.
 - Используйте только прозрачный раствор.

ВСЕГО ПРОДУКТОВ
ПРОДУКЦИОННО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТА (ОВ)

