

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПКФ «МЕДФАРМ»

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Папанина, д. 7А

Web – страница www.medfarm-ural.ru

E-mail mail@medfarm.urf.ru

Тел/факс (343) 333-56-97, 333-56-98, 333-56-99

СПРАВКА

об изделии медицинского назначения

«Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов для лабораторных исследований и сбора острого инструментария и органических отходов многоразовые и одноразовые классов А, Б, В, Г – «МЕДФАРМ»

Емкости-контейнеры для сбора биоматериалов для лабораторных исследований и сбора острого инструментария и органических отходов многоразовые и одноразовые классов А, Б, В, Г – «МЕДФАРМ» предназначены для использования в лабораториях и отделениях лечебно-профилактических учреждений при обращении с медицинскими отходами.

Емкости-контейнеры изготавливаются следующих исполнений:

- КОбм-01-«Медфарм» - одноразовые емкости-контейнеры из композиции полиэтилена или пропилена предназначенные для сбора биоматериалов для лабораторных исследований.

- КОо-01-«Медфарм» - одноразовые емкости-контейнеры из композиции полиэтилена или пропилена предназначенные для сбора острого инструментария и органических отходов классов Б, В, Г.

- КОо-01к-«Медфарм» - одноразовые емкости-контейнеры из многослойного картона предназначенные для сбора острого инструментария и органических отходов классов Б, В

- КОм-02-«Медфарм» - многоразовые емкости-контейнеры из композиции полиэтилена или пропилена предназначенные для сбора острого инструментария и органических отходов классов А, Б, В, Г.

Одноразовые емкости-контейнеры для сбора биоматериалов для лабораторных исследований КОбм-01-«Медфарм» выпускаются объемами 0,005; 0,01; 0,015; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,4 л.

Одноразовые емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов КОо-01-«Медфарм» выпускаются объемами 0,25; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 2,5; 3,0; 3,6; 7,0; 10,0; 12,0; 20,0; 35,0; 50,0 л и предназначены для отходов классов Б, В, Г.

Одноразовые емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов КОо-01к-«Медфарм»

выпускаются объемами 0,25; 0,50; 1,0; 1,5; 2,5; 5,0; 6,0; 12,0; 25,0; 50,0; 80,0 л и предназначены для отходов классов Б, В.

Многоразовые емкости-контейнеры для сбора острого инструментария и органических отходов выпускаются объемами 0,3; 0,5; 0,75; 1,25; 1,5; 3,0; 5,0; 6,0; 7,0; 12,0; 18,0; 25,0; 30,0; 45,0; 50,0; 60,0; 80,0; 85,0; 95,0; 120,0; 240,0; 360,0; 660,0; 770,0; 1100 л и предназначены для отходов классов А, Б, В, Г.

Емкости-контейнеры белого цвета с этикеткой белого цвета используются для сбора и хранения неопасных медицинских отходов класса А.

Емкости-контейнеры желтого цвета с этикеткой желтого цвета используются для сбора и хранения опасных медицинских отходов класса Б.

Емкости-контейнеры с крышкой красного цвета с этикеткой красного цвета используются для сбора и хранения чрезвычайно опасных медицинских отходов класса В.

Емкости-контейнеры с крышкой черного цвета с этикеткой черного цвета используются для сбора и хранения медицинских отходов, близких по составу к промышленным класса Г.

Основные параметры и характеристики

Габаритные размеры емкостей-контейнеров соответствуют указанным в Приложении А.

Диаметр горловины емкости-контейнера объемом 50,0 не более 320 мм.

Емкости-контейнеры изготавливаются из композиции полиэтилена низкого давления или пропилена или из многослойного картона, плотностью не менее 1250 г/м².

Внутренняя поверхность контейнеров из многослойного картона защищена пленкой полиэтиленовой.

Емкости-контейнеры имеют гладкую однородную и одноцветную лицевую поверхность, без вздутий, расслоений, трещин, недоливов, раковин и сколов.

Емкости-контейнеры КОо-01к-«МЕДФАРМ» имеют гладкую однородную и одноцветную поверхность, без вздутий, расслоений, трещин, дырок, порезов.

Этикетка, наклеенная на емкость-контейнер закрывает весь периметр и прочно удерживаться на поверхности.

Цвет емкостей-контейнеров и этикеток соответствует образцу-эталоны.

Крышки емкостей-контейнеров имеют закрытую поверхность и плотно прилегают к горловине.

Крышки емкостей-контейнеров КОо-01к-«МЕДФАРМ» имеют антимикробный клапан, препятствующий аэробной контаминации воздушной среды

Крышки емкостей-контейнеров КОо-01-«МЕДФАРМ» объемом 0,5 и 1 л конструктивно изготавливаются в двух вариантах закрытые – для одновременного наполнения и герметизации емкости-контейнера и с устройством для снятия игл, съемных деталей инструментов и др. для постепенного наполнения и герметизации.

Крышки емкостей-контейнеров КОо-01к-«МЕДФАРМ» конструктивно изготавливаются с устройством для снятия игл, съемных деталей инструментов и др. для постепенного наполнения и герметизации.

Крышки емкостей-контейнеров для сбора отходов классов Б, В имеют запирающее устройство, предотвращающее открывание их после наполнения.

Крышки емкостей-контейнеров не открываются при приложении усилия для снятия игл со шприцев через прорезь в крышке.

Крышки емкостей-контейнеров, заполненных медицинскими отходами и герметично закрытые, не открываются при падении с высоты 1 м на твердую поверхность.

Емкости-контейнеры прочные

Ручки емкостей-контейнеров, имеющих ручки, не снимаются при переноске заполненной емкости.

Емкости контейнеры многоразовые, устойчивы к бытовым загрязнениям.

Емкости-контейнеры устойчивы к средствам дезинфекции, используемым при обращении с медицинскими отходами в учреждениях здравоохранения.

Емкости-контейнеры, упакованные в транспортную тару, обладают вибропрочностью при вибрационных нагрузках в диапазоне частот 10-55 Гц с амплитудой перемещения 0,15 мм.

Срок хранения емкостей-контейнеров в упаковке предприятия-изготовителя не менее 8 лет.

За критерий предельного состояния принимается состояние, при котором нарушается прочность соединения крышки с корпусом контейнера и маркировка.

Емкости-контейнеры КОо-01к-«МЕДФАРМ» объемом 1,0 л; 1,5 л; 2,5 л имеют устройство для крепления к устройству для разрушения шприцев и игл «УПИ-Медфарм»

Комплектность

Комплект поставки емкостей-контейнеров соответствует, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора биоматериалов для лабораторных исследований – КОБм-01-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических опасных медицинских отходов класса Б – КОо-01-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических чрезвычайно опасных медицинских отходов класса В – КОо-01-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических медицинских отходов близких по составу к промышленным класса Г – КОо-01-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических опасных медицинских отходов класса Б – КОо-01к-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер одноразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических чрезвычайно опасных медицинских отходов класса В – КОо-01к-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Количество, шт
Емкость-контейнер многоразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических неопасных медицинских отходов класса А – КОм-02-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер многоразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических опасных медицинских отходов класса Б – КОм-02-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Этикетка		1
Емкость-контейнер многоразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических чрезвычайно опасных медицинских отходов класса В – КОм-02-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1
Емкость-контейнер многоразовый объемом XX л для сбора острого инструментария органических медицинских отходов близких по составу к промышленным класса Г – КОм-02-«МЕДФАРМ»	ТУ 9398-001-27698081-2008	1

Примечание: XX – обозначает соответствующий объем контейнера.

**ЕМКОСТИ-КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА
ИЛИ ПРОПИЛЕНА
КОНТЕЙНЕРЫ ОДНОРАЗОВЫЕ**

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
1. Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»				
1.1	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,005	60×20	2,0
1.2	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,01	70×20	3,0
1.3	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,015	80×20	5,0
1.4	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,03	90×28	6,0
1.5	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,05	72×40	6,5
1.6	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0,1	50×60	20,0
1.7	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0.15	77*63	17
1.8	Контейнеры одноразовые для сбора биоматериалов КОбм-01-«Медфарм»	0.4	85*80	25
2. Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»				
2.1	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	0,25	130×80	20,0
2.2	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	0,3	90×85	40,0
2.3	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	0,5	90×110	40,0
2.4	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	0,8	105×125	60,0
2.5	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01-«Медфарм»	1,0	140×105	75,0

Продолжение Приложения А

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
2.6	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01-«Медфарм»	2,5	220×130	150,0
2.7	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	3,6	180×190	200,0
2.8	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	7,0	235×245	460,0
2.9	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	10,0	200×295	680,0
2.10	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	12,0	310×255	660,0
2.11	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	20,0	340×330	1500,0
2.12	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	35,0	450×380	2500
2.13	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01-«Медфарм»	50,0	470×430	3700
Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«МЕДФАРМ»				
3.1	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«МЕДФАРМ»	0,25	61×61×67	50
3.2	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	0,50	78×78×83	75
3.3	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01к-«Медфарм»	1,0	90×90×130	100

Продолжение Приложения А

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
3.4	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01к-«Медфарм»	1,5	113×113×118	130
3.5	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01к-«Медфарм»	2,5	115×115×200	180
3.6	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	5,0	140×140×250	300
3.7	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	6,0	150*150*265	360
3.8	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	12,0	200×200×300	720
3.9	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01к-«Медфарм»	25,0	240×240×440	1500
3.10	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	50,0	320×320×480	3000
3.11	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов с устройством для разрушения шприцев и игл КОо-01к-«Медфарм»	80,0	420*420*455	4800
3.12	Контейнеры одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов КОо-01к-«Медфарм»	120,0	480*480*520	7200

КОНТЕЙНЕРЫ МНОГОРАЗОВЫЕ

Продолжение Приложения А

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
4. Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»				
4.1	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	0,3	90*85	40
4.2	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	0,5	100*90	55
4.3	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	0,8	135×90	65
4.4	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	1,5	160×130	90
4.5	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	3	155×245	250
4.6	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	6	190×310	460
4.7	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	7	235×245	530
4.8	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	12	310×250	650
4.9	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	18	240×380	1200

Продолжение Приложения А

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
4.10	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	25	350×350	1620
4.11	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	35	500×350	2100
4.12	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	40	600×400	2250
4.13	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	50	700×500	2340
4.14	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	60	750×450	2500
4.15	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	80	780×480	3200
4.16	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	95	800×500	3750
4.17	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	120	850×560	5600
4.18	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОМ-02-«Медфарм»	240	1200×700	8300

Продолжение Приложения А

№	Наименование изделия	Объем, л	Габаритные размеры, мм (дл×ш)	Масса, г
4.19	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОм-02-«Медфарм»	360	1400*750	11000
4.20	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОм-02-«Медфарм»	660	1500*800	16000
4.21	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОм-02-«Медфарм»	770	1800*600	24000
4.22	Контейнеры многоразовые для временного хранения и удаления медицинских отходов КОм-02-«Медфарм»	1100	1800*700	35000

Директор

ЗАО «ПКФ «Медфарм»



Б. К. Гимадиев
Б. К. Гимадиев