

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Интер Лаб Сервис»**



Иванов Г.А.

2010 г.

Инструкция по применению

**Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и
транспортировки
биологических образцов для анализа**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки биологических образцов для анализа предназначен для взятия мочи, кала, мокроты, гнойного отделяемого, ликвора, лаважа, спермы и других биологических материалов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки биологических образцов для анализа, в шести исполнениях:

1. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 60 мл

2. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 60 мл, стерильный, в индивидуальной упаковке

3. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 60 мл с ложкой

4. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 60 мл с ложкой, в индивидуальной упаковке, стерильный

5. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 125 мл

6. Контейнер пластиковый "ИЛС" для взятия, хранения и транспортировки

биологических образцов для анализа 125 мл, стерильный, в индивидуальной упаковке.

Наименование показателя	Характеристика и нормы
1	2
1.1. Габаритные размеры (контейнер пластиковый)	Высота 64 мм, диаметр основания 38,8 мм.
1.2. Габаритные размеры (контейнер пластиковый с ложкой)	Высота 64 мм, диаметр основания 38,9 мм.

1.3 Масса контейнера 60 мл	0,015 кг ± 5%
1.4 Масса контейнера 125 мл	0,022 кг ± 5%
2.1. Внешний вид Контейнера	Соответствие утвержденному образцу-эталону
3.1. Вместимость изделия	Соответствие указанному объему.
3.1. Герметичность упорядивания	Отсутствие протечек жидкости за установленное время
4.1. Присутствие постороннего запаха	Отсутствие запаха в водном растворе после нагревания
7.1. Определение механической прочности	Устойчивость к механическим воздействиям

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к применению не имеет

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Следует вскрыть индивидуальную упаковку контейнеров пластиковых, в индивидуальной упаковке. Контейнеры пластиковые, без упаковки можно применять сразу, без предварительной подготовки.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- Открутить винтовую крышку контейнера.
- Поместить исследуемый биологический материал внутрь контейнера с помощью ложки, если используется модель контейнера с ложкой, либо другим способом, если используется модель без ложки.
- Закрутить крышку контейнера.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Контейнеры пластиковые хранят в закрытом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, свободном от паров летучих органических веществ, препаратов с резким запахом, при комнатной температуре, с соблюдением фармацевтических правил хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года.