

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации

_____ Г.Г. Онищенко

« ____ » _____ 200 ____ г.

№ _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора реагентов для иммуноферментного выявления антигена вируса гепатита А
(ВГА-антиген-ИФА-Бест)

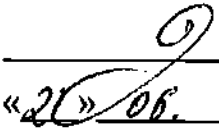
ВГА-антиген-ИФА-Бест представляет собой набор реагентов (далее – набор) для проведения иммуноферментного анализа (ИФА) на твердофазном носителе.

СОСТАВ НАБОРА

- моноклональные антитела к вирусу гепатита А (ВГА), иммобилизованные на 96-луночном разборном планшете;
- положительный контрольный образец (K^+) – буферный раствор, содержащий инактивированный антиген ВГА – прозрачная жидкость красного цвета;
- отрицательный контрольный образец (K^-) – буферный раствор, не содержащий антиген ВГА – прозрачная жидкость желтого цвета;
- конъюгат, концентрат ($\times 11$) – моноклональные антитела к ВГА, меченные пероксидазой хрена – прозрачная жидкость синего цвета;
- фосфатно-солевой буферный раствор с твином, концентрат ($\times 25$) – прозрачная бесцветная жидкость; возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40 °С в течение 20 мин;
- фосфатно-солевой буферный раствор, концентрат ($\times 25$) – прозрачная бесцветная жидкость; возможно выпадение осадка солей, растворяющегося при температуре от 30 до 40 °С в течение 20 мин;
- субстратный буферный раствор – прозрачная бесцветная жидкость;
- раствор для разведения конъюгата – прозрачная или с легкой опалесценцией бесцветная жидкость;
- тетраметилбензидин, концентрат ($\times 15$) – прозрачная бесцветная жидкость;

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ФГУН ЦСК
им. Л.А. Тарасевича
Роспотребнадзора

 Н.В. Медведь

«20» 06. 2007 г.

