



Рис. 2. Общая схема функционирования системы BD Focal Point GS Imaging.

Сведения, полученные с помощью обработчика микропрепаратов BD FocalPoint, координаты полей зрения и изображения клеток передаются из центральной базы данных на станцию проверки BD FocalPoint GS. Цитотехнолог использует возможность автоматического перемещения по полям зрения станции проверки BD FocalPoint GS для оценки предварительно выбранных полей зрения.

Примечание. Цифровые изображения, полученные с помощью обработчика микропрепаратов BD FocalPoint или дополнительной камеры, предназначены только для перемещения и калибровки, но не для интерпретации.

Обработчик микропрепаратов BD FocalPoint обрабатывает микропрепараты и передает данные на центральный сервер, с которого они становятся доступны для станции проверки BD FocalPoint GS. Информация о микропрепарате предоставляется, когда цитотехнолог просматривает микропрепарат на станции проверки BD FocalPoint GS. Важно понимать значение этих сведений в рабочем процессе.

Табл. 1. На таблице показаны данные микропрепарата в том виде, в каком они отображаются на станции проверки BD FocalPoint GS.

ШТРИХКОД	Инвентарный номер микропрепарата или уникальный идентификатор.
ДЕЙСТВИЕ FOCALPOINT	Указывает, успешно ли обработан микропрепарат.
КВИНТИЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ	Каждый набор печати делится на 5 групп в зависимости от индивидуальных рейтингов микропрепаратов. Квинтиль 1 имеет наибольшую вероятность патологии, квинтиль 2 — меньшую, квинтиль 3 — еще меньшую и т. д.