

**ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ИНФУЗИОННЫХ ФЛАКОНОВ
ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА
Модель L03-BM26-L03-BM/1**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**



ARREDI PER OSPEDALI E COMUNITÀ
FURNISHING FOR HOSPITALS AND COMMUNITY LIVING

УСТАНОВКА


- 1°) Перед тем как вынуть прибор из упаковки удостовериться в его целостности.
- 2°) Внимательно вынуть прибор и проверить состояние корпуса и панели управления.
- 3°) Если прибор установлен на тележке, снять блокировку роликов: будучи изготовлены из антистатического материала, они должны иметь непосредственный контакт с землей (создавать заземление). Содержать ролики в чистоте.
- 4°) Удостовериться, что сливной кран воды закрыт, и налить дистиллированную воду в нагревательный чан, обратив внимание, чтобы вода достигла обозначенного поверх решетки уровня. Во время использования прибора, уровень воды не должен опускаться ниже решетки.
- 5°) Очень важно чтобы заземление было хорошим и чтобы напряжение в сети соответствовало данным, указанным на расположенной над розеткой заводской табличке.
- 6°) При помощи ручки (2 фиг. 1) установить необходимую температуру: температурный режим охватывает от 35°C до 90°C.
- 7°) После присоединения сетевой розетки к штепсельной вилке с правой стороны прибора, вставить вилку в стенную розетку. При помощи воздействия на переключатель (1 фиг. 1) удостовериться что все сигнальные индикаторы горят.
- 8°) Когда температура достигнет заданных параметров, зеленая сигнальная (3 di fig. 1) погаснет и будет загораться каждый раз при включении нагревательного элемента. Оранжевая сигнальная лампочка будет постоянно гореть.
- 9°) Если оранжевая сигнальная лампочка (5 фиг. 1) погаснет, значит температура нагревательного элемента превысила 100°C, а прибор автоматически отключился благодаря вмешательству терморегулятора безопасности. Чтобы восстановить нормальный режим работы прибора, дождаться пока внутренняя температура опустится ниже заданных параметров, открутить колпачок (4 фиг.1) и нажать до конца на кнопку перезапуска а затем закрутить колпачок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- 1°) Внимание – температура прибора во время работы очень высокая! Во избежание получения ожогов, при работе с прибором, использовать соответствующие вспомогательные средства.
- 2°) Не разрешается использование прибора неопытным персоналом: пользователь должен быть соответствующе обучен.
- 3°) Помещение размещения прибора, обязательно должно быть отдельным от палат постельного режима. Не в коем случае не допускать прямую передачу пациенту жидкостей или других веществ на стадии подогрева.
- 4°) В нагревательный чан наливать только дистиллированную воду. Не в коем случае не допускается погружение в нагревательный контейнеров с токсичными или воспламеняющимися веществами, которые могут привести к образованию взрывоопасных смесей.
- 5°) Перед каждой процедурой технического обслуживания, удостовериться, что сетевая розетка разъединена от сети, а нагревательный чан опорожнен.
- 6°) Не использовать прибор для стерилизации, дезинфекции или промывки хирургических инструментов или другого.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1°) Постоянно проверять уровень дистиллированной воды в нагревательном чане.

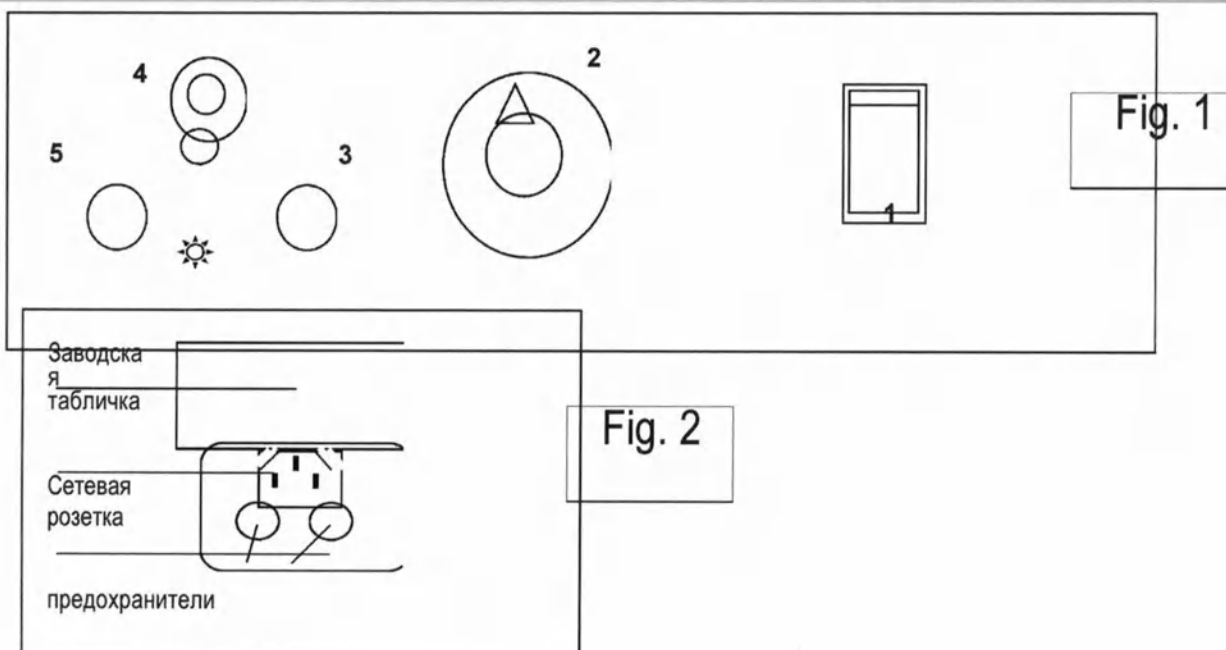

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


- 73/23 ЕС НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- 89/336 ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
- 93/42 ЕС МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ 1-го Класса

Полный контроль проведен в соответствии с действующими Европейскими нормами:

- НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: EN 60601-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность	1.200 W
Напряжение	220 V - 50/60 Hz
Ток	6,5 A
Электросоединение	Через электрический кабель
Слив воды	Через кран
Максимальный объем воды	16 литров
Внешние размеры L03-BM26 (mm)	550 x 450 x 350 высота
Внешние размеры L03-BM27 (mm)	550 x 450 x 910 высота
Внутренние полезные размеры (mm)	330 x 330 x 230 высота
Вес L03-BM26	Kg. 22
Вес L03-BM27	Kg. 27

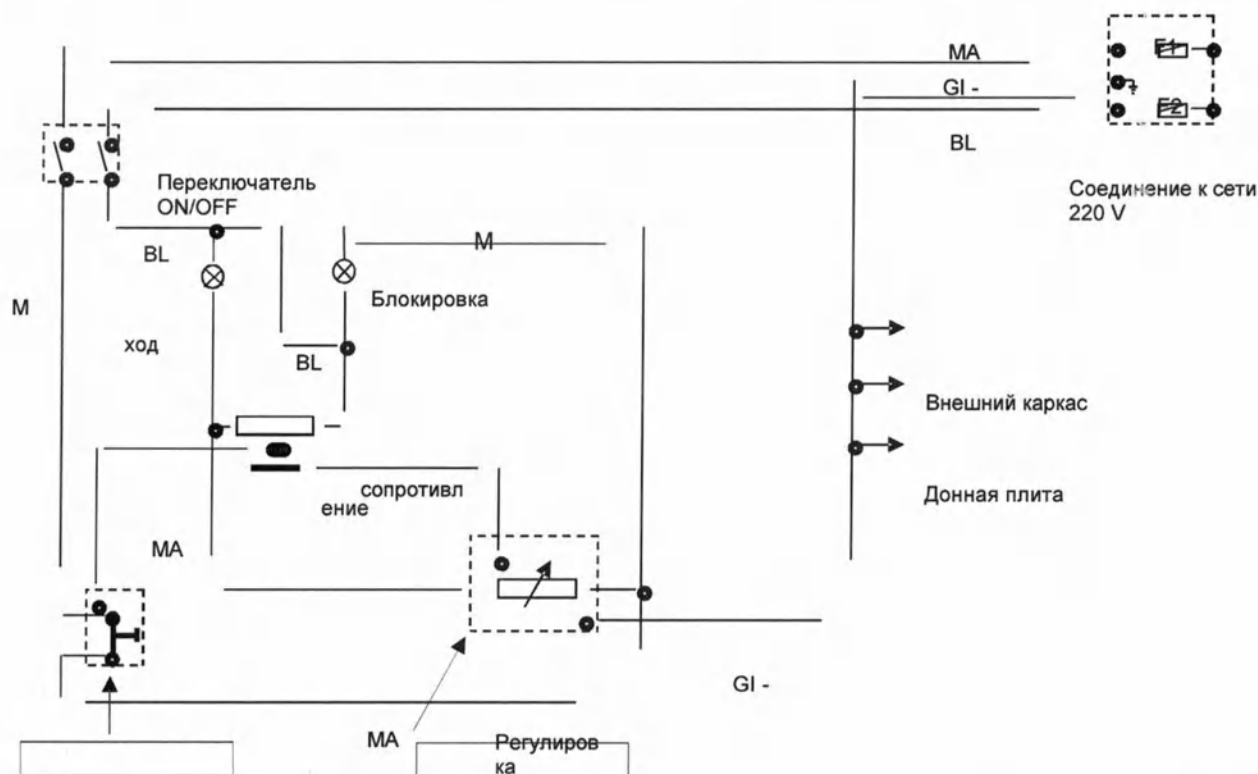

Термостат безопасности

Рабочий термостат

ARREDI PER OSPEDALI E COMUNITA
FURNISHING FOR HOSPITALS AND COMMUNITY LIVING



VERNIPOLL SRL
06031 Bevagna (PG) - ITALY
Voc. Renare - loc. Case Sparse
tel. +39 0742 360549
fax +39 0742 360043
vernipoll@vernipoll.com



VERNIPOLL
ARREDI PER OSPEDALI E COMUNITÀ

FURNISHING FOR HOSPITALS AND COMMUNITY LIVING



21-FP704



L03-COS



L03-COS335000106 + L03-BM26 + LM03-BM/1



L03-SD432



6904/M



21-FP534



320/RA



L03-SD4545/RA



VERNIPOLL SRL
06031 Bevagna (PG) - ITALY
Voc. Renare - Loc. Case Sparse
tel. +39 0742 360549
fax +39 0742 360043
vernipoll@vernipoll.com
www.vernipoll.com

New spaces to health care.