

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Шаклин»



Заборов А. В.

2012 г.

Инструкция по использованию медицинских диагностических перчаток

Медицинские диагностические перчатки производства компании Innovative Gloves Co., Ltd., Таиланд изготовлены из материалов, разрешенных для применения в клинической практике. Предварительно припудрены кукурузным крахмалом медицинского сорта (биоабсорбируемый порошок фармацевтической чистоты). Количество порошка на перчатках тщательно контролируется для обеспечения требуемой консистенции. Медицинские диагностические перчатки выпускаются в соответствии со стандартами:

- ISO 9001:2000
- ISO 13485:2003
- US FDA 510(K)
- ASTM
- CEN

Перчатки медицинские диагностические нестерильные латексные опудренные и неопудренные

Описание и состав изделия

Данные перчатки изготовлены из натурального латекса. Выпускаются неопудренными или припудренными кукурузным крахмалом. Перчатки имеют анатомическую форму и микротекстурированную поверхность.

Выпускаются следующих размеров XS, S, M, L, XL.

Перчатки используются однократно, их повторное использование запрещено.

Область применения

Перчатки используются во всех областях медицинской практики. Данные изделия предназначены для изоляции рук медицинского персонала при оперативном вмешательстве и других процедурах, требующих соблюдения асептики.

Способ применения

Надеть перчатки на руки. При необходимости избыток пудры может быть удален стерильной губкой, стерильной влажной салфеткой или другим эффективным способом. При надевании перчаток необходимо соблюдать осторожность во избежание их разрыва инородными предметами.

Противопоказания

Кожные аллергические заболевания, повышенную чувствительность к латексу.

Побочные действия

Возможно появление аллергической реакции на натуральный латекс.

Условия хранения

Хранить сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше 37°C. Вскрытая коробка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, флуоресцентного света, рентгеновских лучей, озона и влаги.

Срок годности

5 (пять) лет. Не применять по истечении срока годности.

***Перчатки медицинские диагностические нестерильные нитриловые
опудренные и неопудренные***

Описание и состав изделия

Данные перчатки изготовлены из нитрила, имеют анатомическую форму, микротекстурную поверхность. Обеспечивают высокую тактильную чувствительность и надежный захват инструментов. Выпускаются неопудренными или припудренными кукурузным крахмалом.

Выпускаемые размеры: XS, S, M, L, XL.

Перчатки используются однократно. Повторное использование запрещено.

Область применения

Перчатки предназначены для изоляции рук медицинского персонала. Используются в разных областях медицинской практики.

Способ применения

Надеть перчатки на руки. При необходимости избыток пудры может быть удален стерильной губкой, стерильной влажной салфеткой или другим эффективным способом.

При надевании перчаток необходимо соблюдать осторожность во избежание их разрыва.

Условия хранения

Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Не подвергать хранению при высоких температурах (более 37°C). Вскрытая коробка не должна подвергаться действию прямых солнечных лучей, флуоресцентного света, рентгеновских лучей, озона и влаги.

Срок годности

5 (пять) лет. Не применять после истечения срока годности.

Изготовитель:

Innovative Gloves Co., Ltd. 830 Moo 4 Sanambin-Ban Klang Road,
Kuanalang, Hatyai, Songkhla 90110, Thailand.

phone: +667 424 0199, fax: +667 424 0233

<http://www.innovativegloves.net> rsood@innovativegloves.net