



ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделия: «Расходные материалы для аппаратов Zirkonzahn для изготовления безметалловых стоматологических ортопедических реставраций моделей: циркограф 025 большой, циркограф 025 ЕСО «Volksfräser» малый», производства Zirkonzahn GmbH, Италия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ

Настоящая инструкция распространяется на -«Расходные материалы для аппаратов Zirkonzahn для изготовления безметалловых стоматологических ортопедических реставраций моделей: циркограф 025 большой, циркограф 025 ECO «Volksfräser» малый», далее «изделие», производства Zirkonzahn GmbH, Италия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Данное изделие предназначено для изготовления ортопедических реставраций, которые крепятся во рту у пациента.
- 1.2. Изделие предназначено для восстановления жевательных функций и эстетических дефектов.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Блоки Zirconia 1 er, 1 er high, 3 er, 3 er high, 5 er, 5 er high, 7er, 7 er high, 9 er, 9er high, 12 er, 12 er high, 16 er, 16 er high
2. Спрей для выпиливания
3. Светоотверждаемый композит опакový
4. Светоотверждаемый композит прозрачный
5. Изолятор для рамок
6. Гелевый клей Attak
7. Гелевый клей ZirkoFix
8. Адгезивный клей
9. Медная паста
10. Вставки пластиковые
11. Формирователи для рамок
12. Жидкости для окрашивания диоксида циркония
13. Разбавитель для жидкости для окрашивания
14. Стабилизатор для жидкости для окрашивания

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Блоки фиксируются с помощью гелевого клея ZirkoFix на держатели, и обрабатываются спреем для выпиливания, который служит для ускорения застывания клея.
- 3.2. Изолятор для рамок наносится на формователь для рамок, затем в него заливается 2-х компонентный материал, который застывает и в дальнейшем служит рамкой для реставраций из светоотверждаемого композита опакового и прозрачного, а в свою очередь гелевый клей Attak служит для закрепления его там.
- 3.3. Жидкости для окрашивания диоксида циркония, а также разбавитель и стабилизатор служат для выпиленного из блоков каркаса.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- 4.1. Противопоказаний к применению нет

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- 5.1. Перед фиксацией изделия во рту у пациента, изделие необходимо продезинфицировать.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 6.1. Функциональный, эстетический протез, который замещает дефект зубочелюстной системы.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 7.1. Изделие не имеет противопоказаний к хранению, защищено от влаги, пыли и света.
- 7.2. Изделие индивидуального применения. Изготовлено индивидуально.