

1 Основные сведения об изделии	3
2 Основные технические данные	3
3 Комплектность	4
4 Свидетельство о приемке	6
5 Свидетельство о консервации	7
6 Свидетельство об упаковывании	8
7 Гарантии изготовителя	9
8 Схема размещения вложений	10
9 Утилизация	12
10 Транспортирование и хранение	12
Лист регистрации изменений	13

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект дезинфекция КД (далее – комплект КД) предназначен для оснащения медицинских пунктов воинских частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских батальонов дивизий, медицинских отрядов специального назначения, отдельных медицинских отрядов соединений ВДВ, отдельных санитарно-эпидемиологических отрядов, отдельным медицинским отрядам, военных санитарных поездов, отрядов заготовки и переработки крови, медицинских складов, военных полевых госпиталей, кораблей и судов ВМФ.

Комплект КД рассчитан на санитарного инструктора-дезинфектора.

Комплект КД обеспечивает проведение дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий.

Область применения – весь спектр общевойсковых подразделений и подразделений ВДВ, ВВС, ВМФ и ВВ.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 В состав комплекта КД входит медицинское имущество, уложенное в чехлы медицинские защитные (далее - ЧМЗ) и сумку укладочную для КД, КСО и КЗО (далее – СУ).

2.1 Основные параметры и характеристики

2.2.1 Весь комплект укладывается в четыре ЧМЗ и одну СУ.

2.2.2 Масса комплекта КД, кг, не более – 30.

2.2.3 Габаритные размеры комплекта КД (ширина×длина×высота), мм, не более: 800х750х500 мм.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Единицы измерения	Количество
Клеенка подкладная медицинская	м	10
Нарукавники из полимерных материалов	пара	60
Фартук из полимерных материалов	шт.	30
Очки защитные из полимерных материалов	шт.	4
Щетка медицинская для рук	шт.	6
Перчатки резиновые хозяйственные (технические кислотощелочеустойчивые)	пар.	6
Респиратор типа «У2-К»	шт.	2
Респиратор типа РУ-60М	шт.	2
Бахилы ОЗК	пар.	4
Ведро оцинкованное вместимостью не менее 9 л	шт.	2
Воронка пластмассовая диаметром не менее 15 см	шт.	4
Кружка из нержавеющей стали	шт.	2
Нож садовый с изогнутым лезвием	шт.	1
Сапоги резиновые (размер не менее 43)	пар.	2
Щетка одежная	шт.	5
Мыльница с крышкой	шт.	1
Распылитель для жидкостей вместимостью не менее 6 л	шт.	2
Паспорт СМАН.059.000.000.000 ПС	шт.	1
Руководство по эксплуатации СМАН.059.000.000.000 РЭ	шт.	1
Чехол медицинский защитный № 12 СМАН.020.012.000.000	шт.	1
Чехол медицинский защитный № 21 СМАН.020.021.000.000	шт.	1

Продолжение таблицы 1

Наименование	Единицы измерения	Количество
Чехол медицинский защитный № 39 СМАН.020.039.000.000	шт.	2
Сумка укладочная для КД, КСО, КЗО СМАН.020.040.000.000	шт.	1
Транспортная тара 1/1 СМАН.020.040.600.000	шт.	1

Примечания.

- 1 Допускается замена комплектующих на аналогичные, разрешенные в установленном порядке к применению в медицинской практике.
- 2 Допускается в случае замены комплектующих по п.1 примечания изменение количества ЧМЗ.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект КД, заводской номер _____, изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Комплект КД, заводской номер _____, подвергнут консервации согласно требованиям действующей технической документации.

Консервацию произвел _____

личная подпись

расшифровка

подписи

год, месяц, число

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты при условии хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – три года.

Комплект после консервации принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Лист, примен.

Сторона №

Лист, примен.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект КД, заводской номер _____, упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Комплект после упаковывания принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта КД требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекта КД – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения комплекта КД – 6 месяцев с момента продажи.

П р и м е ч а н и е – Гарантийные сроки эксплуатации и хранения покупных изделий - в соответствии с документацией на эти изделия.

8 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЛОЖЕНИЙ

8.1 Каждый ЧМЗ имеет свой индивидуальный номер (далее ИН ЧМЗ).

8.2 Рекомендуемая схема укладки комплекта КД указана в таблицах 2-7.

Таблица 2 Комплектность вложений в ЧМЗ № 39 (ИН ЧМЗ №1)

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Распылитель для жидкостей вместимостью не менее 6 л	шт.	1	№1
Бахилы ОЗК	пар.	2	№1
Перчатки резиновые хозяйственные (технические кислотощелочеустойчивые)	пар.	3	№1
Чехол медицинский защитный № 39 (ИН ЧМЗ № 1)	шт.	1	

Таблица 3 Комплектность вложений в ЧМЗ № 39 (ИН ЧМЗ №2)

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Распылитель для жидкостей вместимостью не менее 6 л	шт.	1	№2
Бахилы ОЗК	пар.	2	№2
Перчатки резиновые хозяйственные (технические кислотощелочеустойчивые)	пар.	3	№2
Чехол медицинский защитный № 39 (ИН ЧМЗ № 2)	шт.	1	-

Таблица 4 Комплектность вложений в ЧМЗ № 21 (ИН ЧМЗ №3)

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Ведро оцинкованное вместимостью не менее 9 л	шт.	2	№3
Клеенка подкладная медицинская	м	10	№3
Очки защитные из полимерных материалов	шт.	4	№3
Щетка медицинская для рук	шт.	6	№3
Воронка пластмассовая диаметром не менее 15 см	шт.	4	№3
Кружка из нержавеющей стали	шт.	2	№3
Щетка одежная	шт.	5	№3
Чехол медицинский защитный № 21 (ИН ЧМЗ №3)	шт.	1	-

Таблица 5 Комплектность вложений в ЧМЗ № 12 (ИН ЧМЗ №4)

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Сапоги резиновые (размер не менее 43)	пар.	2	№4
Чехол медицинский защитный № 12 (ИН ЧМЗ № 4)	шт.	1	-

Таблица 6 Комплектность вложений в навесной карман №1 СУ

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Нарукавники полимерные из полимерных материалов	пара	60	-
Фартук из полимерных материалов	шт.	30	-

Таблица 7 Комплектность вложений в навесной карман №2 СУ

Наименование	Ед. изм.	Количество	ИН ЧМЗ
Респиратор типа «У2-К»	шт.	2	-
Респиратор типа РУ-60М	шт.	2	-
Нож садовый с изогнутым лезвием	шт.	1	-
Мыльница с крышкой	шт.	1	-

Примечания.

- 1. Все ЧМЗ укладываются в СУ.
- 2. СУ укладывается в транспортную тару
- 3. Паспорт и руководство по эксплуатации на комплект укладывается в карман с внутренней стороны откидного клапана СУ.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010

9.2 ЧМЗ и СУ вышедшие из строя, разбирают и утилизировать как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Транспортирование комплектов в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в соответствии с ГОСТ 15150 по условиям хранения 1.

10.2 Комплекты должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.

10.3 Периодичность переконсервации изделий должна составлять 3 года по ГОСТ 9.014.

перво примен.

compared to the

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14 лист(ов)

Руководитель организации



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

2016 г

КОМПЛЕКТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
КД

Руководство по эксплуатации
СМАН.059.000.000.000 РЭ

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения, правильной эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к применению комплекта дезинфекция КД (далее – комплект КД).

К работе с комплектом КД допускается персонал, изучивший данное руководство.

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, характеристиках комплекта КД, его составных частей и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

1 Описание и состав комплекта КД

1.1 Комплект дезинфекция КД (далее – комплект КД) предназначен для оснащения медицинских пунктов воинских частей, медицинских рот бригад, отдельных медицинских батальонов дивизий, медицинских отрядов специального назначения, отдельных медицинских отрядов соединений ВДВ, отдельных санитарно-эпидемиологических отрядов, отдельным медицинских отрядов, военных санитарных поездов, отрядов заготовки и переработки крови, медицинских складов, военных полевых госпиталей, кораблей и судов ВМФ.

Комплект КД рассчитан на санитарного инструктора-дезинфектора.

Комплект КД обеспечивает проведение дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий.

Область применения – весь спектр общевойсковых подразделений и подразделений ВДВ, ВВС, ВМФ и ВВ.

Общий вид комплекта в укладочной сумке показан на рисунке 1.



Рисунок 1

1.2 Состав комплекта КД

1.2.1 В состав комплекта КД входит медицинское имущество, уложенное в чехлы медицинские защитные (далее - ЧМЗ) и сумку укладочную для КД, КСО и КЗО (далее – СУ).

1.2.2 Полная комплектность указана в паспорте.

1.3 Основные параметры и характеристики

1.3.1 Весь комплект укладывается в четыре ЧМЗ и одну СУ.

1.3.2 Масса комплекта КД, кг, не более - 30.

1.3.3 Габаритные размеры комплекта КД (ширина×длина×высота), мм, не более: 800x750x500 мм.

2 Маркировка

2.1 Маркировка комплектов соответствует ГОСТ Р 50444-92 и ГОСТ 26332-84.

2.2 На внешней поверхности СУ нанесена эмблема Красного креста.

2.3 В конверте, закрепленном на передней стороне СУ снаружи, помещена этикетка, содержащая наименование и код изделия, номер технических условий, наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя, серийный номер и год выпуска.

2.4 Транспортная маркировка комплекта - по ГОСТ 14192-96.

2.4.1 На каждой транспортной таре нанесены:

- наименование, товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и код изделия;
- количество изделий;
- обозначение технических условий;
- год выпуска;
- эмблема Красного креста по ГОСТ 19715-74;
- "Законсервировано до";
- "Условия хранения 1";
- манипуляционный знак «ограничения температуры» с указанием требуемой температуры хранения (от 5°C до 40°C).

2.4.2 На каждой транспортной таре нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги", "Предел по количеству ярусов в штабеле – 3" по ГОСТ 14192-96.

3 Описание составных частей и правила эксплуатации

3.1 СУ и ЧМЗ, в которые укладываются комплекты КД, предназначены для защиты уложенного медицинского имущества при хранении и эксплуатации.

Транспортировка комплектов на незначительные расстояния, без консервации, в СУ и ЧМЗ является транспортировкой в потребительской таре.

3.2 Конструкция ЧМЗ:

- в режиме длительного хранения комплекта позволяет хранить элементы в заводской упаковке с соблюдением всех требований по гарантийному хранению вложения;

- в режиме хранения, эксплуатации и транспортировки в потребительской таре обеспечивает защиту вложений от воздействия внешней среды (вибрации, влажности, пыли, повышенной или пониженной температуры);

- обеспечивает возможность быстрой упаковки элементов комплекта и подготовки к транспортированию в потребительской таре, а также быстрой распаковки и подготовки к эксплуатации в условиях медицинских подразделений полевого или стационарного типа;

- при транспортировании в потребительской таре исключает возможность перемещения чехлов друг относительно друга в СУ, что предупреждает их повреждение.

3.3 ЧМЗ конструктивно имеют отделения для укладки более мелких составных частей комплекта. Застегиваются чехлы, в основном, на текстильные застежки типа “молния”.

На внешних сторонах чехлов установлены текстильные застежки типа “липучка”, которые обеспечивают дополнительное сцепление чехлов между собой. Указанный контакт между чехлами препятствует возможному перемещению чехлов с медицинским имуществом внутри сумки.

3.4 СУ конструктивно состоит из корпуса и двух навесных карманов, которые могут крепиться как снаружи, так и внутри корпуса. Навесные карманы затягиваются кулиской.

Сбоку корпуса имеются два вертикальных кармана.

Корпус опоясывается ременными лентами с застежками «фастекс».

Откидной клапан корпуса застегивается на «молнию».

Для переноски сумки имеются две ручки, для переноса ее двумя военнослужащими.

Внизу корпуса имеются рукоятки для опускания сумки в люк. В обычном состоянии они находятся в сложенном состоянии и зафиксированы.

Имеется ручка для переноса, которая позволяет носить корпус в руках, на плече, за спиной.

3.5 Если комплект поступил с длительного хранения или после транспортировки в транспортной таре, то необходимо выдержать комплект в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 не менее 12 часов.

Если комплект поступает после транспортирования в потребительской таре, то указанная выдержка не требуется, можно сразу приступить к подготовке к эксплуатации.

3.6 В зависимости от наличия свободного места в медицинских палатках и привлекаемого личного состава для развертывания комплект может подготавливаться к работе полностью или частично.

3.7 После транспортировки перед развертыванием необходимо очистить поверхности СУ и ЧМЗ от пыли и грязи, провести мероприятия по дезинфекции, согласно МУ 287-113.

3.8 Распылители после удаления заводской упаковки необходимо помыть и снова уложить в соответствующие чехлы.

4 Упаковка комплекта

4.1 Комплект, упакованный в ЧМЗ и СУ, снабжен этикеткой (см. п. 2.3), вложенной в конверт, который закрепляется на передней поверхности СУ снаружи.

4.2 В конверт, закрепленной на внутренней стороне СУ, вложен упаковочный лист, паспорт и данное руководство по эксплуатации.

Возможна упаковка эксплуатационной документации в отдельном полиэтиленовом конверте.

4.3 Комплекты подвергнуты временной противокоррозионной защите по ГОСТ 9.014-78 (группа III-1).

Вариант временной противокоррозионной защиты – ВЗ-10, вариант внутренней упаковки – ВУ-5.

Срок защиты без переконсервации—три года.

4.4 Эксплуатационная документация вкладывается в конверт или пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82.

4.5 В каждую транспортную тару вложен упаковочный лист, в котором указаны:

- наименование предприятия - изготовителя и его товарный знак;
- наименование и код изделия;
- условный номер упаковщика и контролера;
- дата изготовления.

4.6 Масса комплекта в транспортной таре, кг, не более: 50.

5 Размещение элементов комплекта в ЧМЗ

5.1 На каждом ЧМЗ с уложенным в него медицинским имуществом прикреплен ярлык с индивидуальным номером чехла. Сквозная нумерация чехлов в составе всего комплекта упрощает поиск нужных изделий и обеспечивает однотипную укладку комплекта.

5.2 Рекомендуемый порядок размещения элементов комплекта указан в паспорте на комплект КД.

Примечание. Допускается замена комплектующих на аналогичные, разрешенные в установленном порядке к применению в медицинской практике.

6 Техническое обслуживание комплекта

Техническое обслуживание комплекта заключается в периодической санитарно-гигиенической обработке, в основном наружных и внутренних поверхностей СУ.

Обработка заключается в протирании салфеткой из бязи или марли, смоченной в 3 % растворе перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % универсального моющего средства ГОСТ 25644-96 или в 1 % растворе хлорамина ГОСТ 14193-78.

При сильном загрязнении, возможно, потребуется очистка наружной поверхности ЧМЗ щеткой, в особенности текстильных застежек, протирании внутренней поверхности чехла вышеуказанными растворами.

7 Меры безопасности

7.1 К работе с допускается персонал, ознакомленный с настоящим руководством.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование комплектов в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в соответствии с ГОСТ 15150-69 по условиям хранения 1.

8.2 Комплекты должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.

8.3 Периодичность переконсервации комплектов должна составлять 3 года по ГОСТ 9.014-78.

9 Утилизация

9.1 Образующиеся при эксплуатации отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

9.2 СУ, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

Лист регистрации изменений

[illegible]

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 лист(ов)

Руководитель организации

