



551

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ФСР 2007/00287

от 10 июля 2007 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

Закрытое акционерное общество "Завод металлической и медицинской мебели", Россия, 127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.8
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ в следующей комплектации:

- дуга с держателем; кассета мочеприемника;
- держатель для судна;
- боковины;
- держатель капельницы;
- матрац

производства

Закрытое акционерное общество "Завод металлической и медицинской мебели", Россия, 127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.8
класс потенциального риска 1

ОКП 94 5200

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 16303 от 25.05.2007

приказом Росздравнадзора от 10 июля 2007 года № 1477-Пр/07

разрешено к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Н.В. Юргель

Заключение по вопросу о внесении изменений в регистрационную документацию на изделия медицинского назначения

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-3МММ в следующей комплектации: - дуга с держателем; кассета мочеприемника; - держатель для судна; - боковины; - держатель капельницы; - матрас

наименование изделия медицинского назначения

Закрытое акционерное общество "Завод металлической и медицинской мебели", 127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.8

фирма-заявитель

проверено:

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 30.10.2006 № 735

1. Комплектность представленных материалов	Соответствует
1) заявление о регистрации изделия медицинского назначения;	Имеется вх. №НЮ-16303 от 25.05.07
2) документ, свидетельствующий об оплате государственной пошлины;	от 27.03.07 № 211
3) справка об изделии медицинского назначения;	Имеется
4) документы, подтверждающие регистрацию организации-заявителя в качестве юридического лица на территории Российской Федерации;	Имеется
5) доверенность или заверенную копию договора в том случае, если заявителем не является изготовитель изделия;	Не требуется
6) документы, подтверждающие соответствие условий производства изделия медицинского назначения требованиям законодательства Российской Федерации;	Не требуется
7) проект нормативного документа вместе с документами, подтверждающими соответствие изделия медицинского назначения его требованиям, либо требованиям технических условий, либо стандартов;	Имеется
8) руководство по эксплуатации изделия медицинского назначения;	Имеется
9) проект инструкции по медицинскому применению при регистрации физиотерапевтических аппаратов и реагентов (наборов) для диагностики (in vitro), самостоятельно используемых конечным потребителем;	Не требуется
2. Материалы проведенных испытаний и экспертиз качества, эффективности и безопасности изделия медицинского назначения	
1) технические испытания	от 07.05.07 № 0689
2) токсикологические испытания	Не требуется
3) медицинские испытания	Не требуется
3. Экспертные заключения	Не требуется
4. Дополнительные материалы	Не требуется
5. Соответствие данных	Соответствуют
6. Заключение: по результатам проверки документов и данных, изделие медицинского назначения	Подготовлено для внесения изменений, класс риска 1

Начальник отдела регистрации отечественной медицинской техники и изделий медицинского назначения

Эксперт

Т.Г. Крылова


Ю.Н. Горявина

Сведения об исполнении регламента
с 25.05.07 по 21.06.07

1	2	3	4		5		6		7		8	9
№, дата	Входящий №	Ответственный исполнитель (дата назначения)	Проверка комплекта документов		Классификация		Принятие (непринятие) решения об ускоренной процедуре регистрации		Решение о получении доп. сведений и проведение экспертизы		Подготовка заключения по регистрации	Подготовка проекта приказа
			Начало	Окончание	Начало	Окончание	Принято	Не принято	Принято	Не принято		
25.05.07	Н10-16303	Горелица 10.н. 29.05	29.05	8.06	8.06	13.06	-	-	-	-	21.06.07	24.06.07

Ответственный исполнитель

Начальник отдела регистрации отечественной
медицинской техники и изделий медицинского

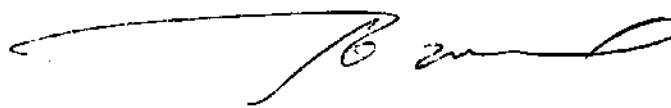Ю.Н.Горявина

Т.Г.Крылова

ЗАВОД

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, 8

Тел (495)619-2638 Факс:(495)618-5131

Руководителю Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития
Н.В. Юргелю

Исх. № _____ от 25.05.07

109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Прошу произвести регистрацию изделия медицинского назначения (далее – ИМН)

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КФ-4-01-ЗМММ в комплекте с: дугой с держателем, кассетой мочеприемника, держателем для судна, боковинами, держателем для капельницы, матрасом.
(наименование изделия медицинского назначения с указанием комплектации)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «МетМедМебель», РФ, г.Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д.8;
тел.618-90-76, 618-51-31, E-mail:

(наименование заявителя, страна, юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, E-mail)

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМН

ЗАО «МетМедМебель», РФ, г.Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д.8;
тел.618-90-76, 618-51-31, E-mail:

(наименование, страна, юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ИМН

Кровать предназначена для оснащения лечебно-профилактических учреждений.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КЛАСС ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РИСКА ПРИМЕНЕНИЯ

Класс потенциального риска - 1
(по ГОСТ Р 51609-2000)

Подтверждаю ответственность за возможные негативные последствия правильного применения изделия медицинского назначения.

Подтверждаю ответственность за нарушение прав иных лиц при производстве, импорте и продаже изделия медицинского назначения на территории Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ ОБ АНАЛОГАХ ИМН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регистрационное удостоверение №29/16060797/0306-03 от 24 сентября 2003 г.ТУ 9452-017-32466639-97
(при наличии в виде таблицы)

Ген.директор
(должность)



Зинин А.Е.
(И.О.Фамилия)

Опись документов

Настоящим удостоверяется, что Шандова Н.П.,
(ФИО)

заявитель ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели»
(наименование предприятия-заявителя)

представил, а представитель Росздравнадзора принял нижеследующие документы для
регистрации изделия медицинского назначения:

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-3МММ в комплекте с: дугой с
держателем, кассетой мочеприемника, держателем для судна, боковинами, держателем
для капельницы, матрасом.
(наименование изделия)

№ пп	Наименование документа	Количество экз.	Количество листов	Отметка о наличии
1	Заявление	1	1	+
2	Платежное поручение	1	1	+
3	Справка	1	1	+
4	Регистрационное свидетельство	1	1	+
5	Акт технических испытаний	1		+
6	Нормативный документ	1	4	+
7	Технические условия с изменениями	1		+
8	Отзывы мед. учреждений	1	5	+
9	Регистрационное удостоверение <i>доверенность</i>	1	1	+
10	Санитарно-эпидемиологическое закл.	1	1	+



Подпись и печать заявителя

Документы сдал: Вас. Васильева

по доверенности
(ФИО, подпись)

А.Е.Зинин

Документы принял:

Н.Ф.А. Водяева Н.А.
(ФИО, подпись)

«25» 05 2007г.

ЗАВОД

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, 8 Тел (495)619-2638 Факс:(495)618-5131

Исх. № 118/15
от 14.05.04

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 08-10 от «14» мая 2000 7 г.

ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» (адрес: Москва, 12-ый пр-д Марьиной Рощи, д.8) в лице генерального директора Зинина Алексея Евгеньевича (паспорт 45 00 522279 выдан 03.03.2001 г. ОВД «Нагатинский Затон», г.Москва) проживающего по адресу: г.Москва, Судоситроительная ул. д.30, к.3, кв.28 действующего на основании Устава,

Настоящим доверяет Шандовой Надежде Павловне (паспорт серии 4604, №887936, выдан 17 июня 2003 года Костинским отделом милиции УВД г.Королева, Московской области)

Представлять ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» в Департаменте Здравоохранения России при подаче всех справок и документов, необходимых для регистрации изделий: кровать медицинская функциональная в комплекте КФ-4-01-3МММ, столики прикроватные медицинские СП-01-3 МММ, штативы для капельниц ШК-01-3МММ, биксодержатель БД-01-3МММ, подставка для тазов ПТ-01-3МММ, ширма медицинская ШМП-01-3МММ, тележка для перевозки больных ТПБ-01-3МММ, получение регистрационных удостоверений, с этой целью предъявлять и получать все необходимые документы, заключать и подписывать соглашения для проведения консультационных и экспертных работ, связанных с лицензированием, производить оплату этих работ, подписывать и выполнять все другие действия, связанные с настоящей доверенностью.

Доверенность действительна до 14.08.04

Генеральный директор



А.Е.Зинин

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, 8 Тел (495)619-2638 Факс:(495)618-5131

Исх. № 118/15
от 14.05.04

ДОВЕРЕННОСТЬ

№ 08-10 от «14» мая 2000 7 г.

ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» (адрес: Москва, 12-ый пр-д Марьиной Рощи, д.8) в лице генерального директора Зинина Алексея Евгеньевича (паспорт 45 00 522279 выдан 03.03.2001 г. ОВД «Нагатинский Затон», г. Москва) проживающего по адресу: г. Москва, Судоситроительная ул. д.30, к.3, кв.28 действующего на основании Устава,

Настоящим доверяет Шандовой Надежде Павловне (паспорт серии 4604, №887936, выдан 17 июня 2003 года Костинским отделом милиции УВД г. Королева, Московской области)

Представлять ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» в Департаменте Здравоохранения России при подаче всех справок и документов, необходимых для регистрации изделий: кровать медицинская функциональная в комплекте КФ-4-01-3МММ, столики прикроватные медицинские СП-01-3 МММ, штативы для капельниц ШК-01-3МММ, биксодержатель БД-01-3МММ, подставка для тазов ПТ-01-3МММ, ширма медицинская ШМП-01-3МММ, тележка для перевозки больных ТПБ-01-3МММ, получение регистрационных удостоверений, с этой целью предъявлять и получать все необходимые документы, заключать и подписывать соглашения для проведения консультационных и экспертных работ, связанных с лицензированием, производить оплату этих работ, подписывать и выполнять все другие действия, связанные с настоящей доверенностью.

Доверенность действительна до 14.08.04

Генеральный директор



А.Е.Зинин

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ и МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ

127521, Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, 8

Тел (495)619-2638 Факс:(495)618-5131

СПРАВКА

На кровать медицинскую функциональную КФ-4-01-ЗМММ
в комплекте с: дугой с держателем, кассетой мочеприемника,
держателем для судна, боковинами, держателем для капельницы,
матрацем

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ предназначена для применения в лечебных учреждениях для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, травматологических больных. Конструкция кровати в виде металлического каркаса, установленного на колесные опоры с тормозным устройством. Колесные опоры имеют шинку из белой резины, что является большим преимуществом, т.к. колеса не оставляют черного следа и не портят полы.

Ложё кровати из решетчатых панелей рамной конструкции, которые могут трансформироваться под различным углом:

угол подъема спинной секции от 0 до 34 по отношению к горизонтальной плоскости;

угол подъема ножной секции от 0 до 45 по отношению к горизонтальной плоскости;

угол подъема тазобедренной секции от 0 до 45 по отношению к горизонтальной плоскости.

Регулировка нужного угла наклона панели производится подъемом ее за ручку с последующей фиксацией упором в зуб рейки.

Усилие, прилагаемое к рукоятке механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой должно быть не более кг /н/5 /50/.

Кровать должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг.

Масса кровати с принадлежностями должна быть не более, кг-100

Спинки кровати съемные, изготовлены из металлической трубы.

Кровать функциональная укомплектована дугой с держателем, кассетой мочеприемника, держателем для судна, боковинами, держателем для капельницы, матрацем.

Кровать окрашена полимерным покрытием, что дает преимущество внешнего вида, высокую устойчивость покрытия к механическим воздействиям и санитарной обработке дезинфицирующими растворами.


Габаритные размеры, мм:

длина	2170
ширина	965
высота до ложа	550
высота с дугой	1880

Применяемые материалы и комплектующие изделия.

Для изготовления кроватей применяются трубы стальные электросварные прямоугольного и круглого сечения, сталь круглого проката, сталь листовая, проволока стальная пружинистая, стальная полоса, проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения следующих марок: ст.08 ПС, ст.2 ПС, ст.10, ст.20, ст.45, ст.08 Ю, ст.3С11, ст.У 8А, ст.нерж.08Х18Н10Т, ст.нерж.08Х18Н10, производства Россия. Комплектующие изделия - колеса диаметром не менее 125мм, пластмассовые наконечники.

Генеральный директор

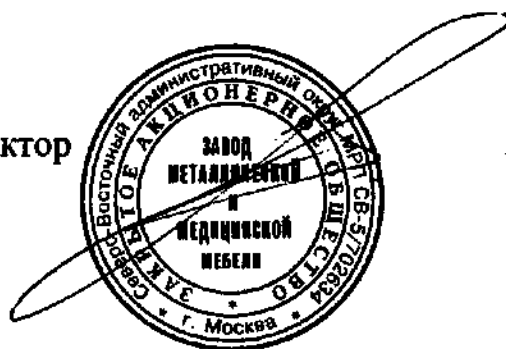

А.Е.Зинин

ПРАВИТЕЛЬСТВО



МОСКВЫ

КОПИЯ

МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 702.634

29 декабря 1993 г. ОКПО 32466639

Закрытое акционерное общество

"Завод металлической и медицинской мебели"

Настоящее свидетельство дает право осуществлять хозяйственную деятельность
в соответствии с учредительными документами
в рамках действующего законодательства Российской Федерации



Председатель Палаты

В.И. Соболев

Серия АК

№ 005497

127521, г. Москва, 12-й пр. Марьиной рощи, д. 8

КВ "МОНТАЖСПЕЦБАНК" р/с 600467238

Государственная налоговая инспекция № 17 Северо-Восточного округа

Наименование изменено 18.10.95г.



Представитель палаты

Деменок Т.И.

(ф.и.о.)

(подпись)

23.11.95г.

(дата выдачи)

Изготовлено МТ Гознака с фотоформ в/ч 33825. (Лицензия № 2)

29 МАР 2007 199__ года Я, Ильина
Ольга Львовна, нотариус г. Москвы, свидетельствую
верность этой копии с подлинником документа,
в последнем подчисток, приписок, зачёркнутых
слов и иных неоговорённых исправлений
или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за № 1К-8224
Взыскано по тарифам 20р
Нотариус



Ильина

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения



Код формы по ОКД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

Центр государственного надзора в г. Москва

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.08.945.П.12496.05.30Т от 23.05.03

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции;
продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Кровать медицинская функциональная КБ-4-01-ЭММ

изготовленная в соответствии

ТУ 9452-017-32466639-97 "Кровать медицинская функциональная КБ-4-01-ЭММ"

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,
указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.695-98. "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 42-46-87 "По спектральным
методам определения микроэлементов в объектах окружающей среды и
биоматериалах при гигиенических исследованиях"

Организация — изготовитель

ЗАО "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ"

(Россия)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕД. МЕБЕЛИ", г.Москва, 12 пр-д Мар. Рощи, д.8

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения,
проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

сан.-эпид. заключения ЦГСЭН в г. Москве № 77.01.03.232.П.06530.03.2 от
12.03.02г. (протокол ИЦ ЦГСЭН в г. Москве № 629 от 01.03.02г.),
77.01.12.250.П.01180.01.3 от 24.01.03г. (протокол № 76/10 от 22.01.03г.),
77.01.03.562.П.29178.10.2 от 08.10.02г.

№ 0670840

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)

На основании результатов исследований ИИ ЦГСЭН в г. Москва (протокол № 629 от 01.03.02г.) порошковой краски Savipol:

Эмиссия вредных хим. вещ-в в моделируемую среду (воздух, вода) не превышает ПДК ГН 2.1.6.695-98, МУ 42-46-87, МУ 942-72. Свойство - порошок на основе полиэфирной карбоксимовой смолы. Вещ-е входящие в состав продук-и относятся к 3-4 кл. опасности.

(протокол № 76/10 от 22.01.03г.) клеи "Йоватах" по органолептическим и сан.-хим. показателям соответствует сан.-гиг. требованиям. Эмиссия формальдегида, органических растворителей не превышает ПДКсс.

Матрацы для мед. кроватей и талматки для перемещения инвалидов:

Эмиссия вредных химических веществ (формальдегид, фенол, толуол, псевдокумол, циклогексанон) не превышает предельно допустимых значений.

Область применения:

в медицинской практике

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

согласно требованиям производителя

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование, страна-производитель, фирма-изготовитель, назначение, правила использования

Заклчение действительно до

25.05.2008г.




Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Глиненко В.М.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Завод металлической и
медцинской мебели»
А.Е.Зинин.
2007г.

АКТ №

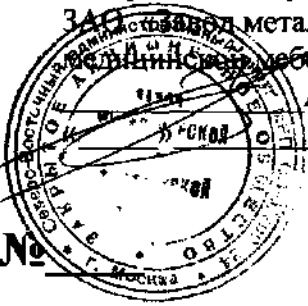

периодических испытаний медицинского изделия

В соответствии с приказом от 25.12.2006г. № 06 о проведении периодических испытаний установочной серии кровати медицинской функциональной КФ-4-01-3МММ в комплектации

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Главный инженер

В.А.Черных

Члены комиссии:

Начальник БТК

Л.Ю.Акинчиц

Зам.нач. цеха металлокаркасов

М.А.Иванов

Инженер-технолог

А.М.Лушникова

составила настоящий акт в том, что, в соответствии с установленным порядком проверки медицинских изделий на производство, в период с 22.01. по 24.01.2007г. заводом организованы и проведены периодические испытания образцов указанного медицинского изделия, выпускаемого в соответствии с ТУ 9452-017-32466639-97 «Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-3МММ» в комплектации

Отбор образцов для испытаний произведен в присутствии представителей комиссии ответственным за качество готовой продукции на предприятии начальником БТК Акинчиц Л.Ю.

Образцы в количестве 3 шт, отобраны из установочной серии (первой промышленной партии) медицинских изделий со склада готовой продукции.

Испытания отобранных образцов медицинского изделия проведены в объеме периодических испытаний (см. таблицу).

Комиссия подтверждает положительные результаты проведенных испытаний, соответствие характеристик испытанных образцов требованиям нормативного документа на медицинское изделие, наличие и законность использования предприятием-производителем конструкторской и технологической документации, полноту и стабильность технологического процесса, необходимое качество выполнения всех технологических операций, наличие системы качества производства.

ТАБЛИЦА
периодических испытаний


№№ п.п.	Наименование контролируемой технической характеристики	№№ позиций нормативного документа, устанавливающих		№№ и даты протокола испытаний	Результаты испытаний (+) положит. (-) отрицат.
		Технические требования	Методы испытаний		
1	2	3	4	5	6
1	Проверка соответствия: -комплекту документации	1.1	3.2		+
	-комплектности	1.4.1	3.3		+
	-маркировки	1.5.1	3.3		+
	-упаковке	1.6.1	3.3		+
2	Проверка габаритных размеров	1.2.1	3.4	2170x970x1880	+
3	Проверка массы	1.2.2	3.5	70	+
4	Проверка статической прочности	1.3.1	3.6		+
5	Проверка углов подъема	1.3.2 1.3.3 1.3.4	3.7	От 0 до 45°	+
6	Проверка усилий: -перемещения кровати	1.3.6 1.3.8	3.9	100 Н	+
	-прилагаемых к механизмам изменения угла наклона головной секции	1.3.7	3.9	50 Н	+
7	Проверка самопроизвольного опускания секций ложа	1.3.5	3.8	соотв.	+
8	Проверка устойчивости кровати	1.3.9	3.10	2 мм	+
9	Проверка диаметра колес	1.3.10	3.11	Ø 125	+
10	Проверка усилий торможения колес	1.3.11	3.12	300 Н	+
11	Проверка удобства фиксация съемных приспособлений	1.3.12	3.13		+
12	Проверка лакокрасочных покрытий	1.3.19 1.3.20	3.19 3.20		+
13	Проверка устойчивости дезинфекции	1.3.18	3.18		+
14	Проверка устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации	1.3.14 1.3.15	3.14 3.15		+

Замечания и предложения комиссии по результатам испытаний:

Комиссия подтверждает положительные результаты проведённых испытаний, соответствие характеристик испытанных образцов требованиям нормативного документа на медицинские изделия.

Председатель комиссии

Члены комиссии

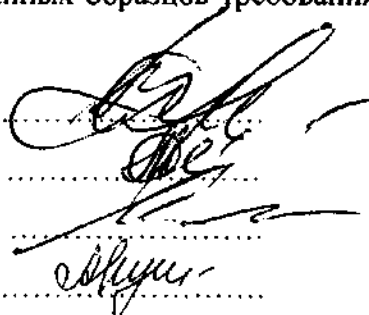The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is the largest and most stylized, followed by a smaller one, and then a third, more compact one.

В.А. Черных

Л.Ю. Акинчиц

М.А. Иванов

А.М. Лушникова

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Московской регистрационной
палатой
отделение СВ-5


“ ” 2002 г.

Рег. № _____

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ЗАО «Завод металлической и
медицинской мебели»

Протокол № 4 от 14 мая 2002 г.
Председатель общего собрания акционеров

КОПИЯ

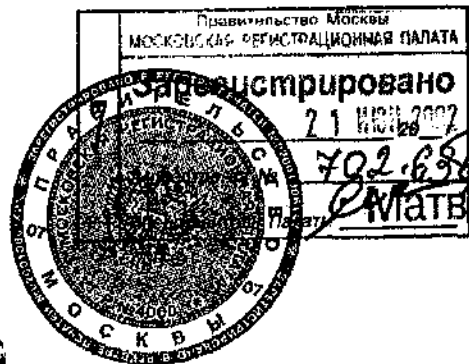

Матвеев А.Б.



УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Завод металлической и медицинской мебели»

(новая редакция)

г. Москва
2002 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным Московской регистрационной палатой 29 декабря 1993 года, регистрационный № 702.634.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, и настоящим Уставом.

1.3. Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 7 августа 2001 года № 120-ФЗ.

Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Закрытое акционерное общество «Завод металлической и медицинской мебели».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ЗАО «МетМедМебель».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Closed Joint Stock Company «MetMedMebel».

2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127521, город Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 8.

Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора: Российская Федерация, 127521, город Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 8.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 127521, город Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, дом 8.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество создано путем учреждения. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.5. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.13. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

3.14. Общество в процессе своей деятельности ведет работу по учету и бронированию военнообязанных и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Персональная ответственность за проведение этой работы возлагается на Генерального директора Общества.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и разделен на 25 000 (двадцать пять тысяч) обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Все акции Общества являются именными.

Форма выпуска акций Общества - бездокументарная в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

25 000 (двадцать пять тысяч) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

4 000 (четыре тысячи) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Дополнительные акции Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом, размещаются посредством закрытой подписки. Цена размещения дополнительных акций Общества и форма их оплаты определяется решением об их размещении.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Устава, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.5. Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала путем погашения акций Общества, которые находятся в собственности Общества более одного года.

Статья 5. Акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

5.1. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Общество размещает обыкновенные акции, каждая из которых предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала Общества.

5.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4 настоящего Устава. Облигации Общества могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.4. Размещение Обществом дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством закрытой подписки и конвертации.

Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:

- 1) Уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций;
- 2) решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции. Размещенные Обществом акции могут быть приобретены Обществом на основании решения:

- 1) общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
- 2) Совета директоров Общества о приобретении акций Общества с целью их последующей реализации.

5.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.8. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Совета директоров Общества решения о приобретении акций Общества с целью их последующей реализации, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения.

В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.9. Общество является держателем реестра акционеров Общества. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.

5.10. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 6. Дивиденды Общества

6.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

6.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

6.3. Владелцам привилегированных акций Общества типа "А" выплачивается годовой дивиденд в размере 100 (сто) рублей на одну привилегированную акцию. Дивиденды по привилегированным акциям типа "А" могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

6.4. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества.

6.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

6.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества.

6.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- 1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены у акционеров Общества, в случае, предусмотренным пунктом 7.4 настоящего Устава;

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплачивать акционерам объявленные дивиденды.

Статья 7. Права акционеров Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя;

2) на получение дивидендов;

3) на получение части имущества Общества случае его ликвидации.

7.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Устава.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" участвуют в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа.

Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа "А" участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7.4. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- 1) реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- 2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций Общества.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

7.5. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых

посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

7.6. Акционеры Общества вправе вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизоры Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.16 настоящего Устава.

7.7. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе обратиться в Совет директоров Общества с требованием о созыве внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 10.18 настоящего Устава.

7.8. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

7.9. Акционер вправе потребовать у Общества предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные о включении его в список, или справку о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе потребовать у Общества предоставить ему копии документов, содержащих информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.10. Акционер вправе требовать доступа к документам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 16.4 настоящего Устава.

7.11. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

7.12. Акционер имеет право продать все или часть принадлежащих ему акций Общества. В случае если акционер намерен продать акции лицу, которое не является акционером Общества, акционер обязан совершить продажу с соблюдением порядка, предусмотренного статьей 8 настоящего Устава.

7.13. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества по рыночной цене.

Статья 8. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций Общества

8.1. Акционер Общества, намеренный продать (или иным образом возмездно переуступить) свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

8.2. Акционер обязан известить Общество путем отправления заказного письма на имя Генерального директора Общества с сообщением о намерении продать принадлежащие ему акции с указанием предполагаемого покупателя, количества предлагаемых к продаже акций, цены за одну акцию и других условий, на которых акции предлагаются к продаже.

8.3. В десятидневный срок с момента получения заказного письма, содержащего все указанные в пункте 8.2 настоящей статьи сведения, Общество обязано направить письменное предложение всем акционерам Общества о возможности и сроках осуществления преимущественного права приобретения акций по цене предложения третьему лицу.

Направление письменного предложения акционерам Общества может осуществляться в двух формах:

- 1) вручение акционеру Общества письменного предложения лично под роспись;
- 2) отправление за счет акционера, намеренного продать свои акции, письменного предложения заказным письмом.

8.4. В течение тридцати дней с момента получения Обществом извещения акционера о намерении продать свои акции каждый акционер Общества вправе заключить с продавцом акций письменный договор купли-продажи на приобретение акций в количестве пропорциональном количеству принадлежащих ему акций Общества. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.5. Продавец акций обязан заключить договоры купли-продажи со всеми акционерами, выразившими намерение приобрести уступаемые им акции Общества. При этом количество акций Общества, приобретаемых каждым покупателем пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества.

Если приобретение акционером Общества целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.6. В случае если в течение тридцати дней с момента получения Обществом извещения акционера о намерении продать свои акции, акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, акции могут быть проданы Обществу.

Совет директоров Общества вправе в течение последующих десяти дней принять решение о покупке Обществом всех акций, предлагаемых для продажи, по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. В этом случае продавец акций обязан заключить договор купли-продажи с Обществом, выразившим намерение приобрести все уступаемые им акции Общества.

8.7. По истечении последнего срока, установленного пунктом 8.6 настоящей статьи, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

8.8. При продаже акций Общества с нарушением преимущественного права приобретения, установленного настоящей статьей, любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Статья 9. Фонды Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

9.3. В Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.

9.4. Порядок формирования специального фонда акционирования работников Общества и расходования его средств определяется решением Совета директоров Общества.

9.5. В Обществе может быть сформирован из чистой прибыли специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. Его средства расходуются исключительно на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества.

Статья 10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества; утверждении аудитора Общества; утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках Общества; утверждении распределения прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом общем собрании акционеров Общества могут решаться иные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

10.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых лицам, имеющим право участия в общем собрании акционеров, материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.12 настоящей статьи;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также утверждение распределения прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 13 настоящего Устава;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных пунктом 10.11 настоящей статьи;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизоре, Положения о счетной комиссии Общества;
- 20) принятие решения о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 21) принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению общего собрания акционеров за счет средств Общества органам и лицам, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров, в случае, предусмотренном пунктом 10.19 настоящей статьи.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу - Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции». Федеральным законом «Об акционерных обществах

10.7. Решения на общем собрании акционеров Общества принимаются путем голосования. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- 1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Устава.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

Дробная голосующая акция предоставляет акционеру - ее владельцу соответствующую часть одного голоса.

10.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3, 10.9 и 10.11 настоящей статьи.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 и 20 пункта 10.4 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принятие общим собранием акционеров Общества решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 13 Настоящего Устава, осуществляется большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 20 пункта 10.4 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение вопроса о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

10.11. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В случае если по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, вынесен на решение общего собрания акционеров Общества, решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения статьи 13 настоящего Устава.

10.12. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

10.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

10.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосо-

Также предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть получено не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Одновременно, должны быть направлены или вручены бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать следующие сведения:

- 1) наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- 2) цену и порядок осуществления выкупа.

10.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть не более трех кандидатов в Совет директоров Общества, одного кандидата в Ревизоры Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или Положением об общем собрании акционеров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.16 настоящей статьи.

...принятое решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложения в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от сообщения могут быть обжалованы в суд.

В случае отсутствия вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия достаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- 3) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае, если заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
- 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 8) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.18. Все общие собрания акционеров Общества, помимо годовых, являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- 1) собственной инициативы Совета директоров Общества;
- 2) требования Ревизора Общества;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение пяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не содержится формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.7 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.19. В случае если в течение установленного пунктом 10.18 настоящей статьи срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, приобретают предусмотренные настоящим Уставом полномочия Совета директоров Общества, необходимые для созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

10.20. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10.21. Общее собрание акционеров ведет Председатель собрания, которым, по должности, является Генеральный директор Общества.

В случае его отсутствия или отказа председательствовать на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

10.22. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются пред-

судящим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционе-

10.13. Порядок ведения общего собрания акционеров Общества устанавливается Положением об общем собрании акционеров, утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 11. Совет директоров Общества

11.1. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.19 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.19 настоящего Устава;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.19 настоящего Устава;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций с целью их последующей реализации, приобретение облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) утверждение договора (контракта), заключаемого Обществом с Генеральным директором Общества;
- 9) утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;
- 13) одобрение крупных сделок в случае, предусмотренном пунктом 11.7 настоящей статьи;

- 14) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном статьей 13 настоящего Устава;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) принятие решения о согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 17) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) избрание Председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров Общества и определение размера выплачиваемых ему вознаграждения и компенсаций;
- 19) утверждение проектов документов, выносимых Советом директоров на решение общего собрания акционеров Общества;
- 20) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

11.3. Совет директоров Общества состоит из трех человек. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Голосование по каждой кандидатуре в члены Совета директоров Общества проводится раздельно. В случае если в списке кандидатов в Совет директоров Общества, предложенного на голосование общему собранию акционеров находится более трех кандидатов, каждый акционер Общества вправе голосовать не более чем за трех кандидатов в члены Совета директоров. Считаются лица набравшие большинство голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Порядок принятия решений общим собранием акционеров, устанавливаемый настоящим Уставом.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия членов (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

11.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества или Генерального директора.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании двух членов Совета директоров Общества. Если для решения вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров требуется единогласное решение, кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании всех членов Совета директоров Общества, исключая выбывших.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее двух, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшийся член Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.6. Решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.4 и 11.7 настоящей статьи. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки, и иные ее существенные условия.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобре-

нии крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 11.2 настоящей статьи, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора принимается членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Представленные членами Совета директоров Общества письменные мнения хранятся вместе с протоколом заседания Совета директоров.

11.9. Выполнение решений Совета директоров Общества организует Генеральный директор.

11.10. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

11.11. Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11.12. Совет директоров Общества действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

Статья 12. Генеральный директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор является Председателем общего собрания акционеров Общества.

12.2. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, подписывает все документы от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

12.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

12.4. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава и договора (контракта), заключаемого им с Обществом, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

12.5. Генеральный директор Общества назначается общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет и может быть в любое время досрочно освобожден решением общего собрания акционеров Общества от занимаемой должности в соответствии с заключенным договором (контрактом) и настоящим Уставом.

12.6. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за деятельность Общества.

Статья 13. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

13.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- 1) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 3) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.2. Лица, указанные в пункте 13.1 настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизора Общества и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

13.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, за исключением сделок, предусмотренных пунктом 13.4 настоящей статьи, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 13.4 настоящей статьи.

13.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- 1) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- 3) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

13.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 13.4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо

признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.

13.6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки, и иные ее существенные условия.

Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.7. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

При этом в решении общего собрания акционеров Общества должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

13.8. Положения настоящей статьи не применяются:

- 1) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- 2) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- 3) при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций Общества.

Статья 14. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества сроком на один год.

Ревизор действует на основании Положения о Ревизоре, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

14.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.3. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.4. Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора.

14.5. Общее собрание акционеров своим решением по представлению Совета директоров может утвердить аудитора Общества (гражданина или аудиторскую организацию), который проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется решением Совета директоров.

14.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор Общества и аудитор Общества составляют свои заключения.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

15.4. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- 1) добровольно, по решению общего собрания акционеров Общества;
- 2) по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Статья 16. Учет и отчетность, документы Общества

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в соот-

ветствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам

Достоверность данных, , кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества. содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизором Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.3. По месту нахождения своих исполнительных органов Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 3) внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- 4) положения о филиалах, представительствах и структурных подразделениях Общества;
- 5) уставы дочерних обществ;
- 6) годовые отчеты;
- 7) документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих собраний акционеров Общества и заседаний Совета директоров Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров Общества;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

15) иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество несет ответственность за сохранность вышеперечисленных документов Общества.

При реорганизации Общества все документы передаются правопреемнику. В ином случае документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу передаются в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 16.3 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, документов по учету кадров.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Копии указанных документов могут быть предоставлены акционеру за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление соответствующих копий.

Статья 17. Прочие положения

17.1. Положения внутренних нормативных документов Общества действуют в части, не противоречащей настоящему Уставу.

17.2. Если одно из положений настоящего Устава окажется впоследствии недействительным, это не повлечет за собой недействительности других положений.


Недействительное положение должно быть заменено другим положением, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации, в порядке установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Всего пронумеровано и скреплено
30 листов



О. Ильина

7	Правительство Москвы МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА
1	Всего прошнуровано и пронумеровано 80 стр. - 21 КОМПЕТЕНЦИЯ

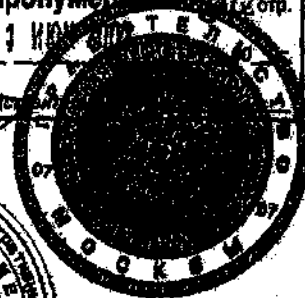

Матвиец А.Б.

29 МАР 2007

199__ года Я. Ильина
Сделана одна копия с подлинником документа,
в последнем подлинник, приписок, зачеркнутых
слов и иных противоречивых исправлений
или каких-либо особенностей не оказалось.
Серия регистрационного номера № 1К-8131
Взыскано по тарифам 300р




Ильина

ОКП 94 5200

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «МедМобель»

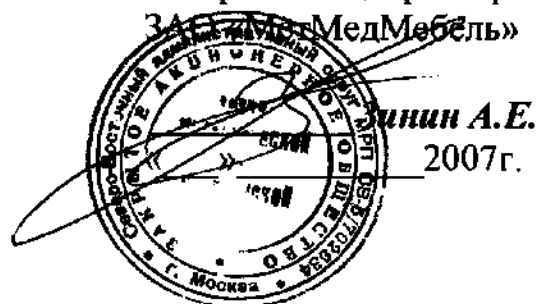

**НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**« Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ
в комплекте с: дугой с держателем, кассетой мочеприемника,
держателем для судна, боковинами, держателем для капельницы,
матрацем.»**

ТУ 9452-017-32466639-97

2007

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-3МММ предназначена для применения в лечебных учреждениях для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, травматологических больных. Конструкция кровати в виде металлического каркаса, установленного на колесные опоры с тормозным устройством. Колесные опоры имеют шину из белой резины, что является большим преимуществом, т.к. колеса не оставляют черного следа и не портят полы.

Ложё кровати из металлических панелей рамной конструкции, которые могут трансформироваться под различным углом:

Регулировка нужного угла наклона панели производится подъемом ее за ручку с последующей фиксацией упором в зуб рейки.

Спинки кровати съемные, изготовлены из металлической трубы.

Кровать окрашена полимерным покрытием, что дает преимущество внешнего вида, высокую устойчивость покрытия к механическим воздействиям и санитарной обработке дезинфицирующими растворами.

Класс в зависимости от потенциального риска применения - I по ГОСТ Р 51609-2000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кровать должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, техническим условиям и комплекту конструкторской документации.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Габаритные размеры кроватей приведены на рис. 1.

1.2.2. Масса кроватей с принадлежностями должна быть не более, кг. - 100.

1.3. Характеристики

1.3.1. Кровать должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг.

1.3.2. Угол подъема спинной секции должен быть от 0 до 34 по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.3. Угол подъема тазобедренной секции должен быть от 0 до 45 по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.4. Угол подъема ножной секции ложа кроватей должен быть от 0 до 45 по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.5. Самопроизвольное изменение углов наклона секций ложа кровати с размещенной на ложе номинальной нагрузкой не допускается.


1.3.6. Усилие перемещения кроватей без нагрузки должно быть не более кг/н/10/100/.

1.3.7. Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой должно быть не более кг/н/5/50/.

1.3.8. Кровать с номинальной нагрузкой в затарможенном положении не должна передвигаться ни в каком направлении при приложении к ней усилия не менее кг/н/30/300/.

1.3.9. Кровать должна стоять на поверхности пола устойчиво.

Рис. 1.

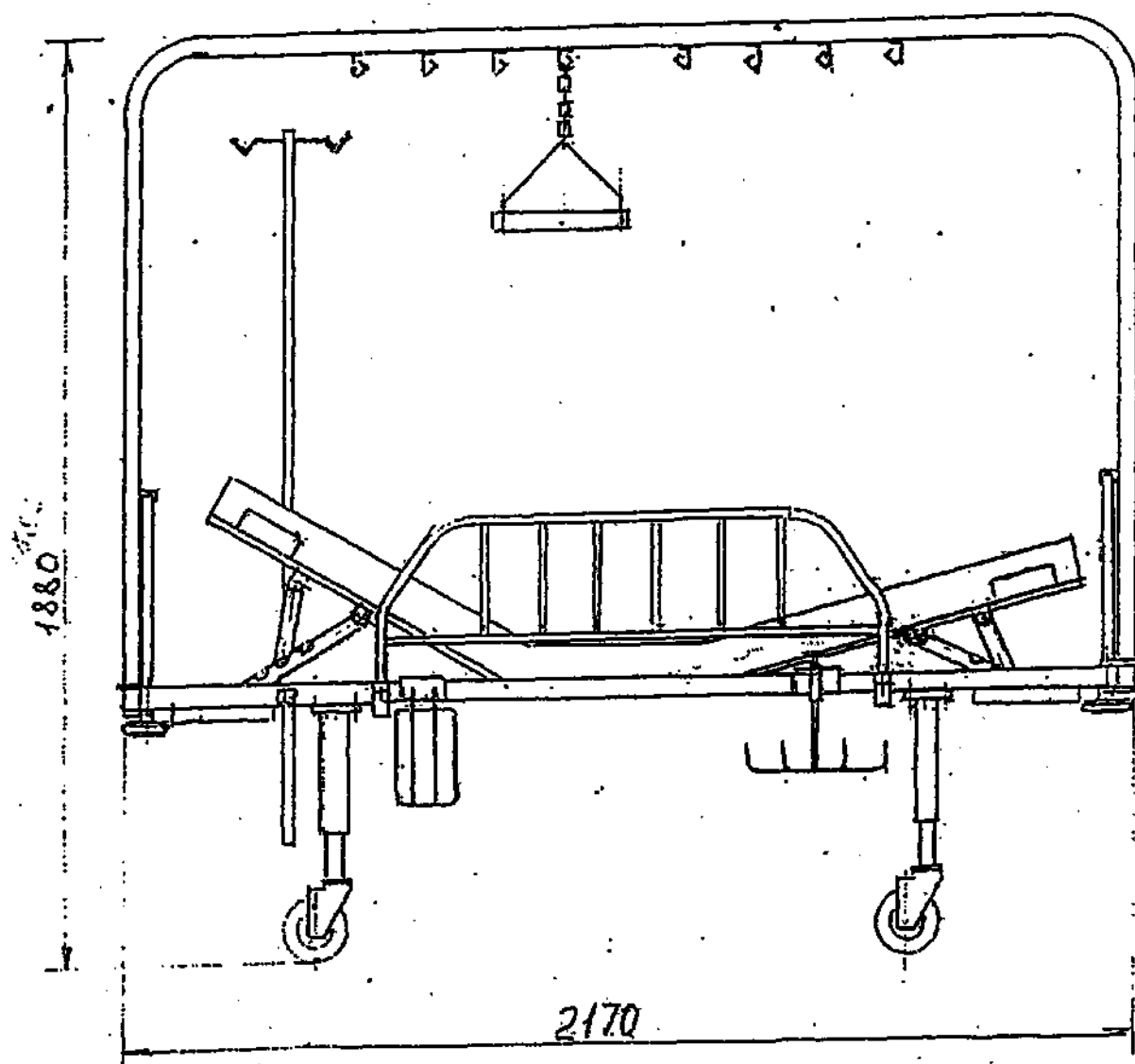

1.3.10. Усилие, прилагаемое к тормозному устройству должно быть, не более кг/н/10/100/.

1.3.11. Усилия фиксации съемных приспособлений не более кг/н/-10/100/.

1.3.12. Съемные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента.

1.3.13. Кровать при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.3.14. Кровать при транспортировании должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444.

1.3.15. Кровать при эксплуатации должна быть обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444 для группы 3.

1.3.16. Кровать упакованная в транспортную тару ,должна обладать вибропрочностью и ударопрочностью по ГОСТ Р 50444.

1.3.17. Кровать должна быть устойчива к дезинфекции по МУ 287-114 раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1%раствором хлорамина по ОСТ 6-01-76.

1.3.18. Металлические и неметаллические неорганические покрытия кровати по ГОСТ 9.301,ГОСТ 9.303,ГОСТ 9.306 для условий эксплуатации 1 климатического исполнения УХЛ 4.2.

1.3.19. Лакокрасочные покрытия кроватей по ГОСТ 9.032 для групп условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104 для климатического исполнения УХЛ 4.2 наружные поверхности кровати должны иметь покрытия на ниже III класса.

1.3.20. Средний срок службы кровати должен быть не менее 3 лет.

За предельное состояние принимается такое состояние изделия при котором стоимость восстановления работоспособного состояния или внешнего вида достигает половины стоимости нового изделия.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Кровать транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование кроватей морским транспортом производится в соответствии с « Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Вид отправки - контейнерами и мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

Условия транспортирования кроватей вида климатического исполнения УХЛ 4.2 – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения кроватей вида климатического исполнения УХЛ 4.2 – по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГИЯ ПЛЮС»**

УТВЕРЖДАЮ



**Руководитель
ИИ «Энергия плюс»**

Н.П. Шандова

2007 г.

АКТ

№ 0689ПТИ/2007 от 07.05.2007 г.

**Май 2007 г.
г. Королев**

**Проведение приемочных технических
испытаний кровати медицинской функ-
циональной КФ-4-01-3МММ изготов-
ленной ЗАО «Завод металлической и
медицинской мебели» в соответствии с
ТУ 9452-017-32466639-97**

Составлен испытательным центром «Энергия плюс»
Аттестат аккредитации № ФС 29-ПТИ-06 от 06.09.2006 г.

Председатель комиссии
Члены испытательной группы

Н.П. Шандова
С.И. Панюков
В.А. Шандов

1 В период с 16.04.2007 г. по 07.05.2007 г. на основании заявки ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» испытательным центром «Энергия плюс» были проведены приемочные технические испытания кровати медицинской функциональной КФ-4-01-ЗМММ изготовленной в соответствии с ТУ 9452-017-32466639-97.

2 Для проведения испытаний были предъявлены:

1) Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ.

2) Техническая документация:

- технические условия ТУ 9452-017-32466639-97;
- паспорт на изделие;
- справка о медицинском изделии;
- фотография общего вида.

3 Краткая техническая характеристика изделия и его назначение.

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ (далее – кровать) предназначена для применения в лечебных учреждениях для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и травматологических больных. Кровать комплектуется дугой с держателем, кассетой мочеприемника, держателем для судна, держателем для капельницы, боковинами, матрацем.

Кровать выполнена в виде металлического каркаса, установленного на колесные опоры с тормозным устройством. Ложе кровати состоит из решетчатых панелей рамной конструкции, которые могут трансформироваться под различными углами.

Кровать окрашена полимерным покрытием, устойчивым к механическим воздействиям и к санитарной обработке дезинфицирующими растворами.

4 Код ОКП 94 5200.

5 В зависимости от степени потенциального риска применения кровать относится к классу 1 по ГОСТ Р 51609-2000.

6 Испытательный центр «Энергия плюс» провел приемочные технические испытания образца кровати в соответствии с требованиями ТУ 9452-017-32466639-97.

7 Кровать приемочные технические испытания выдержала. Технические характеристики испытанного образца соответствуют требованиям ТУ 9452-017-32466639-97 по пунктам, применимым к изделиям данного вида.

8 При получении положительных результатов медицинских испытаний, кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ производства ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» может быть рекомендована для применения в медицинской практике лечебных учреждений Российской Федерации.


9 Техническая и эксплуатационная документация откорректированы по результатам экспертизы и испытаний.

Технические условия ТУ 9452-017-32466639-97 могут быть рекомендованы к утверждению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Приложения:

- 1) фотография общего вида;
- 2) протокол экспертизы технической документации;
- 3) протокол технических испытаний.

Председатель комиссии

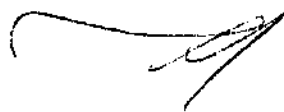

Н.П. Шандова

Члены комиссии




С.И. Панюков



В.А. Шандов

КРОВАТИ МЕДИЦИНСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КФ-4-01-3МММ

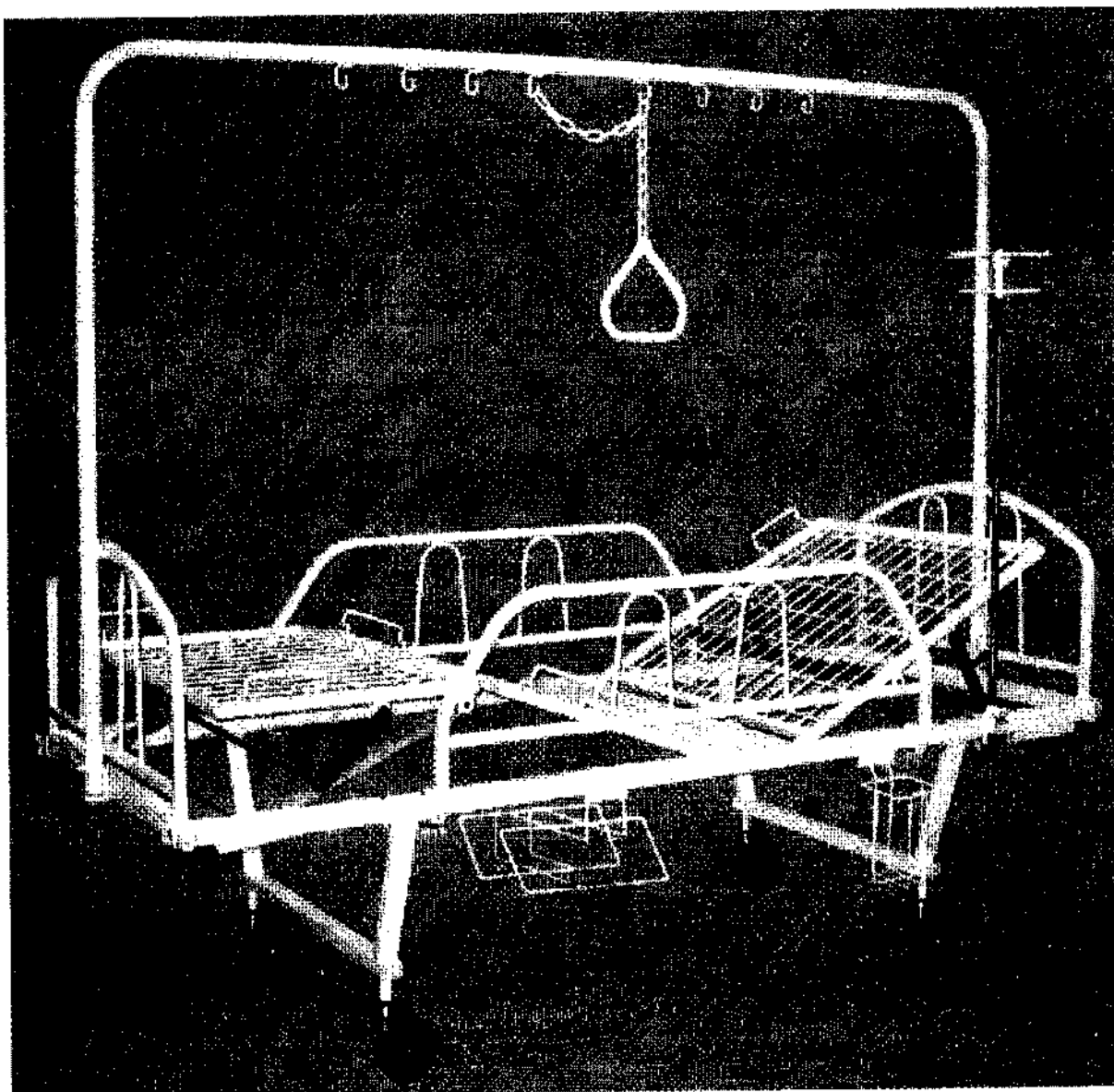

ПРОТОКОЛ № 0689/1
экспертизы технической документации

- 1 Объект экспертизы:** Техническая и эксплуатационная документация на кровать медицинскую функциональную КФ-4-01-ЗМММ производства ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели»
- 2 Дата экспертизы:** Начало 17.04.2007 г.
Окончание 17.04.2007 г.
- 3 Цель экспертизы:** Рассмотрение и оценка технической и эксплуатационной документации на соответствие требованиям нормативных документов
- 4 Методика экспертизы:** В соответствии с ГОСТ Р 15.013-94
- 5 Результаты экспертизы:**
- 5.1 На приемочные технические испытания представлен комплект технической и эксплуатационной документации на кровать медицинскую функциональную КФ-4-01-ЗМММ производства ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели», включающий в себя:
- технические условия ТУ 9452-017-32466639-97;
 - паспорт на изделие;
 - справку о медицинском изделии.
- 5.2 Техническая и эксплуатационная документация в основном оформлена в соответствии с требованиями нормативных документов.
- технические условия – в соответствии с ГОСТ 2.114-95;
 - паспорт – в соответствии с ГОСТ 2.601-95.
- Отступлений от требований нормативных документов, распространяющихся на изделия, в объеме рассматриваемой документации не обнаружено.
- 5.3 Единицы физических величин, пронормированные в эксплуатационной документации, соответствуют по наименованию и обозначению требованиям ГОСТ 8.417-2002.
- 5.4 Нормируемые параметры и технические характеристики кровати соответствуют требованиям действующих нормативных документов.
- 5.5 Методы контроля технических характеристик изделия, указанные в технических условиях, отвечают требованиям действующих нормативных документов. Средства контроля гарантируют проверку технических характеристик изделия с необходимой точностью.
- 5.6 Эксплуатационная документация содержит разделы, необходимые для работы с изделием.

Ведущий по испытаниям



С.И. Панюков

ПРОТОКОЛ № 0689/2

технических испытаний кровати медицинской функциональной

- 1 Объект испытаний:** Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ производства ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели»
- 2 Дата испытаний:** Начало 18.04.2007 г.
Окончание 07.05.2007 г.
- 3 Место испытаний:** ИЦ «Композит-Тест», г. Королев
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ48
- 4 Цель испытаний:** Проверка соответствия технических характеристик кровати требованиям ТУ 9452-017-32466639-97
- 5 Методика испытаний:** В соответствии с ТУ 9452-017-32466639-97 и ГОСТ Р 50444-92

6 Испытательное оборудование, средства измерений и реактивы

Динамометр электронный «ИНСТРОН», зав. № 001.
Испытательная машина «PSB-100», зав. № PMB-3026
Климатическая камера «КПК 630.V 3626/1», зав. № 029/90
Весы электронные универсальные «ВУ-3/150», зав. № 1369.
Набор тарированных грузов общей массой 200 кг.
Рулетка измерительная РФ 2-2-16.
Линейка металлическая – 1000, ГОСТ 427-75.
Штангенциркуль «ШЦ-III-200», зав. № 0120903.
Набор щупов 3, класс точности 2.
Часы наручные механические, ГОСТ 10733-98.
Монохлорамин ХБ технический, ГОСТ 14193-78.
Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72.

7 Результаты испытаний

7.1 Испытания проводились на одном образце кровати медицинской функциональной КФ-4-01-ЗМММ.

7.2 Кровать поставляется в разобранном виде упакованной в потребительскую тару. К кровати прикреплена этикетка, на которой указана следующая информация:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение изделия;
- обозначение технических условий;
- дата изготовления.

7.3 В комплект поставки кровати входят:

- кровать – 1 шт.;
- дуга с держателем – 1 шт.;
- кассета мочеприемника – 1 шт.;
- держатель для судна – 1 шт.;
- держатель капельницы – 1 шт.;
- боковина – 2 шт.;
- матрац – 1 шт.;
- этикетка – 1 экз.;
- паспорт – 1 экз.

7.4 Кровать изготовлена в соответствии с представленной документацией. Отступлений от документации не выявлено.

7.5 Материалы, применяемые для изготовления кровати, соответствуют требованиям стандартов и технических условий, указанных в комплекте документации. Металлические детали имеют защитные и защитно-декоративные покрытия.

7.6 Результаты проверки основных технических характеристик кровати и их соответствие требованиям ТУ 9452-017-32466639-97 приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п по ТУ	Наименование параметра	Требования по ТУ	Результаты испытаний	Вывод
1.2.1	Габаритные размеры	Габаритные размеры кровати приведены на рис. 1: - длина – 2170 мм; - высота – 1880 мм	Длина – 2172 мм; Высота – 1877 мм	С С
1.2.2	Масса	Масса кровати с принадлежностями должна быть не более 100 кг	Масса кровати 92 кг	С
1.3.1	Статическая прочность	Кровать должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг	Кровать 1,5-кратную номинальную нагрузку (180 кг), равномерно распределенную по панелям, выдержала в течение 7 часов без остаточных деформаций и других дефектов	С
1.3.2	Угол подъема спинной секции	Угол подъема спинной секции должен быть от 0 до 34° по отношению к горизонтальной плоскости	Угол подъема спинной секции по отношению к горизонтальной плоскости от 0 до 35°	С
1.3.3	Угол подъема тазобедренной секции	Угол подъема тазобедренной секции должен быть от 0 до 45° по отношению к горизонтальной плоскости	Угол подъема тазобедренной секции по отношению к горизонтальной плоскости от 0 до 45°	С

Продолжение таблицы 1

№ п/п по ТУ	Наименование параметра	Требования по НД	Результаты испытаний	Вывод
1.3.4	Угол подъема ножной секции	Угол подъема ножной секции ложа кровати должен быть от 0 до 45° по отношению к горизонтальной плоскости	Угол подъема ножной секции ложа кровати по отношению к горизонтальной плоскости от 0 до 45°	С
1.3.5	Самопроизвольное изменение углов	Самопроизвольное изменение углов наклона секций ложа кровати с размещенной на ложе номинальной нагрузкой не допускается	Самопроизвольного изменения углов наклона секций ложа кровати с размещенной на ложе номинальной нагрузкой в течение 1 часа не отмечено	С
1.3.6	Усилие перемещения	Усилие перемещения кровати без нагрузки должно быть не более 100 Н	Усилие, необходимое для перемещения кровати без нагрузки по ровному полу, не превышает 84 Н	С
1.3.7	Усилие на рукоятках	Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой, должно быть не более 50 Н	Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой, не превышает 50 Н	С
1.3.8	Надежность тормозной системы	Кровать с номинальной нагрузкой в заторможенном положении не должна перемещаться при приложении усилия 300 Н	Кровать с номинальной нагрузкой в заторможенном положении при приложении усилия 300 Н не перемещается	С
1.3.9	Устойчивость	Кровать должна стоять на поверхности пола устойчиво. При этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм	Кровать на горизонтальной поверхности стоит устойчиво. Зазор между полом и одним из колес не превышает 3 мм	С
1.3.10	Диаметр колес и наличие тормозов	Диаметр колес кровати должен быть не менее 100 мм. Два самоориентирующихся колеса должны быть оснащены тормозными устройствами	Диаметр колес кровати 125 мм. Два самоориентирующихся колеса оснащены тормозными устройствами	С
1.3.11	Усилие включения тормозов	Усилие, прилагаемое тормозному устройству, должно быть не более 100 Н	Усилие включения тормозов колес не превышает 82 Н	С
1.3.12	Усилие фиксации съемных приспособлений	Усилие фиксации съемных приспособлений, должно быть не более 100 Н	Усилие фиксации съемных приспособлений от 45 до 75 Н	С

Продолжение таблицы 1

№ п/п по ТУ	Наименование параметра	Требования по НД	Результаты испытаний	Вывод
1.3.13	Крепление съемных приспособлений	Съемные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента	Съемные приспособления крепятся к кровати без применения специального инструмента	С
1.3.14	Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации	Кровать при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов для исполнения УХЛ категории 4.2	Кровать к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ категории 4.2 устойчива, изменений внешнего вида, коррозии на металлических частях и других дефектов после испытаний не отмечено	С
1.3.16	Устойчивость к механическим воздействиям при эксплуатации	Кровать при эксплуатации должна обладать виброустойчивостью в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92	После испытаний на устойчивость к механическим воздействиям, возникающим при эксплуатации (режимы для изделий группы 3 по ГОСТ Р 50444-92), механических повреждений и нарушений работоспособности кровати не отмечено	С
1.3.18	Устойчивость к дезинфекции	Кровать должна быть устойчива к дезинфекции химическим способом в соответствии с требованиями МУ 287-111	После пятикратного протирания наружных поверхностей 1 % раствором монохлорамина, изменений внешнего вида и следов коррозии на металлических частях кровати не отмечено	С

Условные обозначения:

«С» – соответствует требованиям НД

«Н» – не соответствует требованиям НД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ производства ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели» приемочные технические испытания выдержала. Технические характеристики испытанного образца кровати соответствуют требованиям ТУ 9452-017-32466639-97.

Ведущий по испытаниям



С.И. Панюков

Регулировка нужного угла наклона головной панели производится подъемом ее за ручку с последующей фиксацией упором(поз.2).

Поднимая упор(поз.2) производится плавное опускание головной панели в горизонтальное положение.

Периодически, один раз в шесть месяцев эксплуатации, проверить крепление колес и ножек к раме.

Перемещение кровати внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенными тормозами.

Хранение:

Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С и относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части изделия имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости изделие подвергают дезинфекции 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа "Лотос" или тампоном смоченным 1% раствором хлорамида по ТУ6-014689387-1689(тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Все претензии предъявляются продавцу только при наличии паспорта на изделие.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Закрытое Акционерное Общество
" Завод Металлической и Медицинской Мебели"

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д.8
тел. 619-26-38
факс 618-51-31

ПАСПОРТ
КРОВАТЬ
медицинская функциональная

КФ-4-01-ЗМММ
ТУ-9452-017-32466639-97

Назначение:

Кровать медицинская функциональная предназначена для больных с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечной и травматологических больных. Применяется для оснащения лечебно-профилактических медицинских учреждений.



Технические данные:

Габариты:

длина	2130 мм
ширина	900 мм
высота с дугой	1880 мм
высота со спинкой	960 мм
масса не более	100 кг
допустимая нагрузка	120 кг
Размеры подматрачной рамы(мм)	2058x900

	спинной	тазобедренной
длина	750	1055
ширина	810	810
Угол наклона:		
Спинной рамы	45°	
Тазобедренной рамы	25°	

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет.

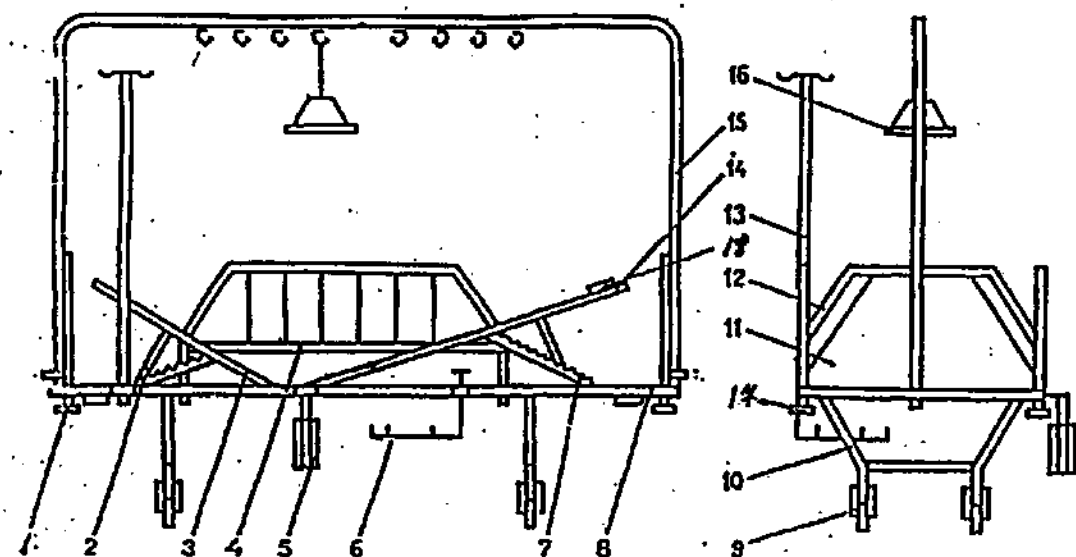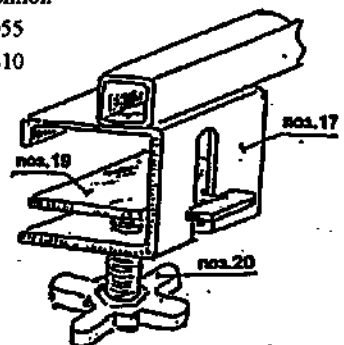

Комплект поставки:

Ролик-отбойник(поз.1) - 4 шт.

Узел упорный(поз.2)-2шт

Рама подъемная(поз.3)-1шт

*Боковое ограждение(съёмное)(поз.4)-2шт

*Кассета мочеприемника(поз.5) - 1 шт

*Держательсудна(поз.6) - 1шт

Рама подъемная спинная(поз.8) с упорным узлом(поз.2;7) - 1шт

Рама тазобедренная и ножная(поз.14) с упорным узлом(поз.2;7) - 1шт

Рама(поз.8) - 1шт

Колеса $\varnothing 125\text{мм}$ (поз.9) - 4 шт (2шт с тормозом)

Ножки(поз.10) - 2шт

*Щит ДСП для спинки(поз.11) - 2шт

Спинка(поз.12) - 2шт

*Стойка для капельницы(поз.13) - 1шт

*Дуга для подвешивания вытяжных устройств(поз.15) - 1шт

*Рукоятка с цепью(поз.16) - 1шт

*Зажим М8(поз.17) - 4шт

Болт М8х55 с гайками - 8шт

Болты М10х30 - 4шт

Шайбы 10.65Г.2,5 - 4шт

Болты М8х25 - 2шт

Позиции отмеченные *, а также матрас с наматращиком поставляются по желанию Заказчика, за отдельную плату.

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

1.Привернуть колеса(поз.9) к ножкам(поз.10) болтами М10х30 через шайбу 10.65Г.2,5. Усилие зажима болтов для крепления опоры колесной(поз.9) - не менее 52Нм.

2.Собрать раму(поз.8) с двумя ножками(поз.10) при помощи восьми болтов М8х55.56.039 ГОСТ 7802-81 и восьми гаек М8.5.05 ГОСТ 5915-70.

3.Установить две спинки(поз.12) на раму(поз.8), вставить деревянные щиты(поз.11), зафиксировать концы спинки(поз.12) в квадратных отверстиях. Закрепить спинки четырьмя зажимами(поз.17)

4.Установить дугу(поз.15) на кровать и закрепить двумя болтами М8х25.56.039 ГОСТ 7802-81

5. Навесить на крючок дуги(поз.15) рукоятки с цепью(поз.16)

6. Установить две боковины(поз.4) и закрепить четырьмя зажимами(поз.17). Перед установкой боковин необходимо вставить пластины(поз.19) в зажим(поз.17), для чего пластину(поз.19) предварительно развернуть на 90°, вставить язычок в паз до упора и развернуть на 90° в положение указанное на рисунке.

ВНИМАНИЕ! перед установкой пластины(поз.19) и зажима(поз.17) на раму кровати, винт(поз.20) вывернуть максимально.

7. Установить стойку капельницы(поз.13) на раму(поз.8) и закрепить зажим(поз.17). Перед установкой боковин необходимо вставить пластины(поз.19) в зажим(поз.17)

8.Навесить на раму(поз.8) кассету(поз.5) и держатель(поз.6)

ЗАО «ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ»



Кровать
функциональная 2-х секционная
ММК-10003

Кровать медицинская функциональная 2-х секционная

Изменение положения секций реечное.

Колеса фирмы "TENTE" обеспечивают плавное перемещение кровати.

Кровать окрашена надежным полимерным покрытием.

Габариты, мм:

длина	- 2158
ширина	- 965
высота до ложа	- 550
высота с дугой	- 1880

Адрес: 127521, г. Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, 8. **Отдел сбыта:** тел.: (095) 219-03-03; факс: (095) 219-36-90

ЗАО "Завод металлической и медицинской мебели"

Код ОКП 945200

Группа Р28

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АООП НПО "Экран"

Б.И. Леонов

"25" 1997 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО "Завод
металлической и
медицинской мебели"

В.А. Кацман

1997 г.

медицинская (2)
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КФ-4-01-3МММ

Технические условия
ТУ 9452-017-32466639-97

Срок введения с 01.01.98

до 31.12.99
06.07.2004
до 06.07.2012

1997

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
ВНЕСЕН В РЕЕСТР
ЗА № 200/016948

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. к дубл.	Подп. и дата

Page 2

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кровать должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 настоящим техническим условиям и комплекту конструкторской документации КМ-1.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Габаритные размеры кроватей приведены на рис. 1

1.2.2. Масса кровати с принадлежностями ^{дальше 5 кг} не более, кг - 100

1.3. Характеристики

1.3.1. Кровать должна выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг.

1.3.2. Угол подъема спинной секции должен быть от 0 до 34° по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.3. Угол подъема тазобедренной секции должен быть от 0° до 45° по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.4. Угол подъема ножной секции ложа кроватей должен быть от 0° до 45° по отношению к горизонтальной плоскости.

1.3.5. Самопроизвольное изменение углов наклона секций ложа кровати с размещенной на ложе номинальной нагрузкой не допускается.

1.3.6. Усилие перемещения кроватей без нагрузки должно быть не более кг /н/ 10 /100/.


1.3.7. Усилие, прилагаемое к рукояткам механизмов для изменения углов наклона секций ложа с номинальной нагрузкой должно быть не более кг /н/ 5 /50/.

1.3.8. Кровать с номинальной нагрузкой в заторможенном положении не должна передвигаться ни в каком направлении при приложении к ней усилия не менее кг /н/ 30 /300/.

1.3.9. Кровать должна стоять на поверхности пола устойчиво.

Д 5143-1

рис 1. Габаритные размеры кровати.

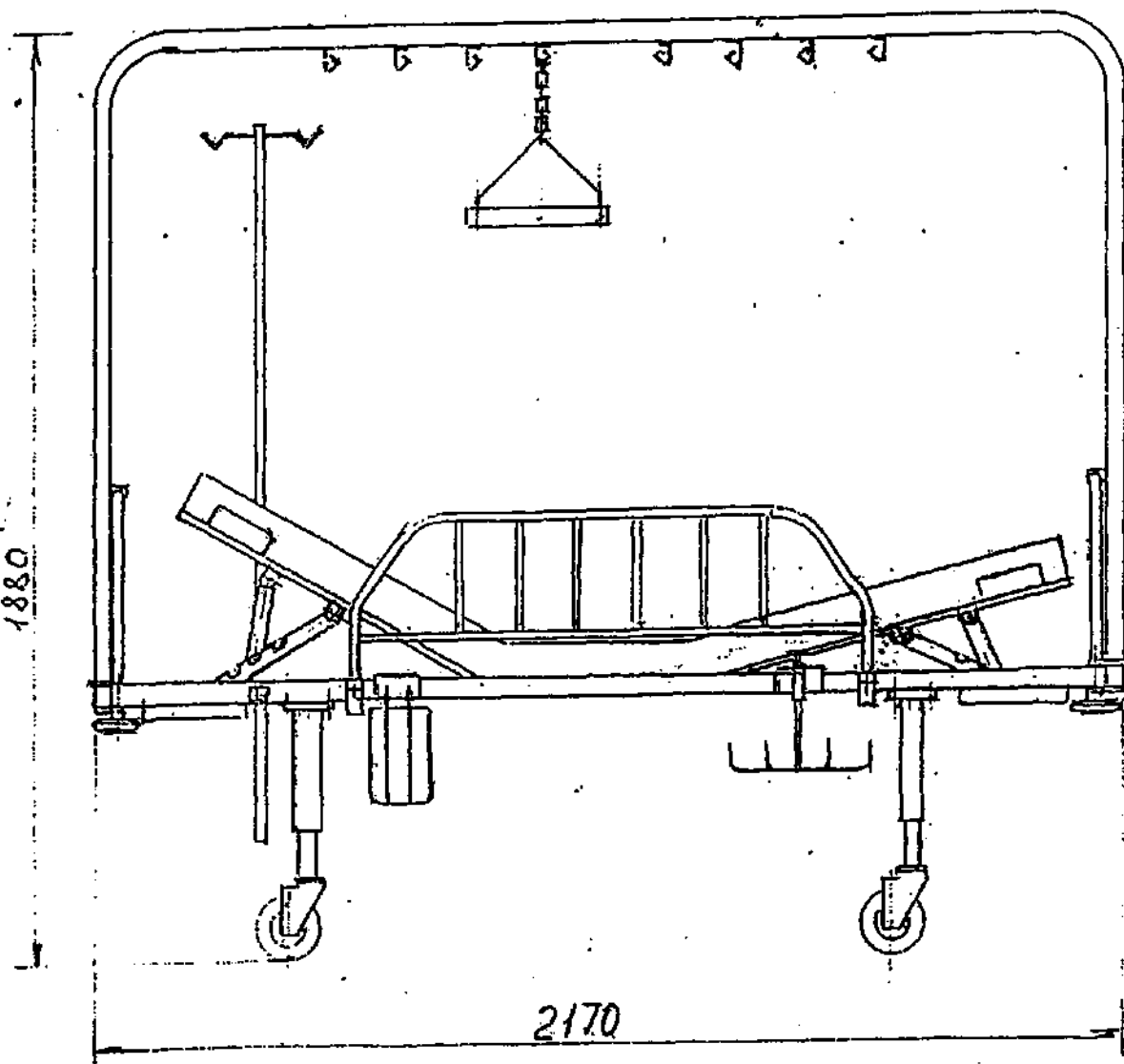

Т.У 9452-014-32466639-07

Лист

4

При этом зазор между полом и одним из колес должен быть не более 3 мм.

Диаметр колес кровати должен быть не менее 100 мм, 2 самоориентирующихся колеса должны быть оснащены тормозными устройствами, оснащенными тормозными устройствами ②
I.3.10. Колеса кровати должны быть диаметром не менее 100 мм, 2 самоориентирующихся колеса должны быть оснащены тормозными устройствами, оснащенными тормозными устройствами ②

I.3.11. Усилие, прилагаемое к тормозному устройству, должно быть, не более кг/н/ - 10 /100/.

I.3.12. Усилия фиксации съемных приспособлений не более кг/н/ - 10 /100/.

I.3.13. Съемные приспособления должны крепиться к кровати без применения специального инструмента.

I.3.14. Кровать при эксплуатации должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2. ^{15150 ②}

I.3.15. Кровать при транспортировании и хранении ^① должна быть устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444.

I.3.16. Кровать при эксплуатации должна обладать виброустойчивостью по ГОСТ Р 50444 для группы 3.

I.3.17. Кровать упакованная в транспортную тару, должна обладать вибропрочностью и ударпрочностью по ГОСТ Р 50444 для группы 3. ②

I.3.18. Кровать должна быть устойчива к дезинфекции по ^{149 287-113 ③} ОСТ 42-21-2 - 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина по ОСТ 6-01-76.

I.3.19. Металлические и неметаллические неорганические покрытия кровати по ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303, ГОСТ 9.306 для условий эксплуатации I климатического исполнения УХЛ 4.2

Д 5143-1

1.3.20. Лакокрасочные покрытия кроватей по ГОСТ 9.032 для групп условий эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104 для климатического исполнения УХЛ 4.2 наружные поверхности кровати должны иметь покрытия на ниже III класса.

1.3.21. Средний срок службы кровати ~~до списания~~ ^{должен быть} не менее 6 лет. 3^х лет. (2)

За предельное состояние принимается такое состояние изделия, при котором стоимость восстановления работоспособного состояния или внешнего вида достигает половины стоимости нового изделия.

1.4. Комплектность

1.4.1. Комплект поставки кровати должен соответствовать указанному в табл. I.

Таблица I

№ пп	Наименование изделия	Обозначение документа	К-во
1.	Кровать КФ-4-01-ЗМММ	ТУ 9452-017-32466639-96	1
2.	Эксплуатационная документация	ПС-паспорт	1
3.	ПО согласованию с заказчиком		
	Дуга с держателем	МИК-10013	1
4.	Кассета мочеприёмника	МИК-10011	1
5.	Держатель для судна	МИК-10016	1
6.	Боковина	МИК-10010	2
7.	Держатель капельницы	МИК-10012	1
8.	Матрац	МИК-10016	1

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 8452-017-32466639-96 94	Лист
						6

1.5. Маркировка

1.5.1. Маркировка по ГОСТ Р 50444.

1.5.2. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

1.5.3. Допускается маркировку проводить в паспорте, прилагаемом в каждой кровати.

1.6. Упаковка

1.6.1. Упаковка кровати должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 50444.

1.6.2. Допускается упаковку кровати производить в транспортную тару завода-изготовителя.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Испытания и приемку кроватей производят по настоящим техническим условиям и в соответствии с ГОСТ Р 50444, ^{проверка} а в части ~~среднего срока службы (п. 1.3.2.1) проводится на образцах серийного производства по МД 50-707. Производитель не несет ответственности за выпуск и в дальнейшем не несет ответственности за брак в 3 года. ②~~ надежности по МД 50-707. ~~Контроль безопасности проводят на стадии установочной серии.~~

~~Контроль долговечности проводят по результатам обработки статистических данных.~~

2.2. Кровати должны подвергаться следующим видам испытаний:

- приемо-сдаточным;
- периодическим.

2.3. Объем и последовательность проведения приемо-сдаточных и периодических испытаний должны соответствовать указанному в табл. 2.

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	и.	Дата

ТУ 9452-017-32466639-9691

Лист
7

Таблица 2

Наименование испытаний	Номер пункта		Необходимость проведения испытаний	
	Технических требований	Методов испытаний	при прием-мо-сда-точных испытан.	при периодич. испытан.
I. Проверка соответствия:				
- комплекту документации	I.1	3.2	+	+
- комплектности	I.4.I	3.3	+	+
- маркировке	I.5.I	3.3	+	+
- упаковке	I.6.I	3.3	+	+
2. Проверка габаритных размеров	I.2.I	3.4	+	+
3. Проверка массы	I.2.2	3.5	+	+
4. Проверка статической прочности	I.3.I	3.6	+	+
5. Проверка углов подъема секций кровати	I.3.2 I.3.3 I.3.4	3.7	+	+
6. Проверка самопроизвольного опускания секций ложа	I.3.5	3.8	+	+
7. Проверка усилий:				
- перемещения кровати	I.3.6 I.3.8	3.9	+	+
- прилагаемых к механизмам изменения углов наклона секций	I.3.7	3.9	+	+
8. Проверка устойчивости кровати на горизонтальной поверхности	I.3.9	3.10	+	+
9. Проверка диаметра колес	I.3.10	3.11	+	+
10. Проверка усилий торможения колес	I.3.11	3.12	+	+

Д 0143-1

Наименование испытаний	Номер пункта		Необходимость проведения испытаний	
	тени- ческих требо- ваний	методов испыта- ний	при прие- мо-ода- точных испытан.	при пе- риодич. испытан.
II. Проверка удобства фиксаци съемных приспособлений	I.3.I2	3.I3	+ -	+
I2. Проверка устойчивости к климатическим воздействиям				
при эксплуатации, транс- портировании и хранении	I.3.I4	3.I4	+ -	+
	I.3.I5	3.I5		
I3. Проверка устойчивости к механическим воздействиям				
при эксплуатации и транспо- ртировании	I.3.I6	3.I6	+ -	+
	I.3.I7	3.I7		
I4. Проверка защитных и защит- но-декоративных покрытий	I.3.I9	3.I9	+	+
	I.3.20	3.20		
I5. Проверка долговечности	I.3.2I	3.2I	+ -	+
I6. Проверка устойчивости к дезинфекционной обработке	I.3.I8	3.I8	+ -	+

Примечание: I. Знак "+" - испытания проводят,
знак "-" - испытания не проводят.

2. За партию принимают изделия, предъявляемые для
контроля по одному сопроводительному документу.

Д 5143-1

2.4. Приемо-сдаточные испытания

2.4.1. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждое изделие. Если в процессе приемо-сдаточных испытаний будет установлено несоответствие кровати, хотя бы одному из указанных в табл. 2 требований, то результаты испытаний считаются неудовлетворительными и изделие бракуют.

После устранения дефектов кровать повторно предъявляют техническому контролю. В зависимости от характера дефекта допускается проводить повторные испытания только по пунктам несоответствия и пунктам, по которым приемо-сдаточные испытания не проводились.

При несоответствии кровати требованиям п.1.3.1-1.3.12 проверку проводят на удвоенном количестве образцов. Если изделие будет забраковано при повторных испытаниях, то третьему предъявлению оно не подлежит.

Вопрос о возможности использования годных составных частей кровати решается руководством предприятия-изготовителя.

2.5. Периодические испытания

2.5.1. Периодическим испытаниям подвергаются кровати, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. Объем выборки - по ГОСТ 50444.

2.5.2. Результаты периодических испытаний считаются удовлетворительными, если отобранные кровати соответствуют требованиям, указанным в табл. 2. В случае проведения повторных испытаний и их неудовлетворительных результатов кровати считают не выдержавшими испытания и их отгрузка и приемка должны быть приостановлены. Возобновлению приемки и отгрузки должны предшествовать новые испытания, подтверждающие устранение дефектов и соответствие кровати требованиям настоящих технических условий.

Д 5143-1

Подп. и дата	
Исп. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
№ подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	п.	Дата

ТУ 9452-017-32466639-9697

Лист

10

2.5.2. Периодические испытания проводятся не реже одного раза в 3 года, ^{по п. 3} кроме испытаний по п.п. 1.3.14 - 1.3.17 которые проводятся на образцах усматриваемой серии и в дальнейшем при изменении материалов или технологии изготовления ²

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Испытания кроватей проводят при нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ Р 50444, за исключением особо указанных в настоящем разделе.

Перечень оборудования, необходимого для контроля кроватей приведен в приложении 2.

3.2. Проверку соответствия кроватей документации (п.1.1) проводить:

1) при операционном контроле - путем сличения с документацией и проверкой измерительными средствами, обеспечивающими требуемую точность измерения;

2) при входном контроле составных частей и покупных изделий путем сличения с требованиями документации и контроля отметок ОТК о приемке изделий предприятием-изготовителем.

3.3. Проверку комплектности (п.1.4.1), маркировки (п.1.5.1), упаковки (п.1.6.1) проводить визуально и сличением с конструкторской документацией.

3.4. Проверку габаритных размеров (п.1.2.1) проводят линейкой - 1000 по ГОСТ 427 и рулеткой ЭПК2-ЗАНТ/1 по ГОСТ 7502 или другими средствами измерений, обеспечивающими требуемую точность измерений.

3.5. Проверку массы (п.1.2.2) проводят взвешиванием на весах в наибольшем пределе взвешивания 500 кг, ценой деления 0,5 кг обычного класса точности по ГОСТ 23676.

3.6. Проверку статической прочности (п.1.3.1) проводят размещением полуторакратной нагрузки массой 180 кг и выдержи-

Д 5143-1

Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	В. № подл.

ТУ 9452-017-32466639-96 94

Лист
II

нием ее в течение 7 часов.

После снятия нагрузки кровать должна соответствовать требованиям пп. I.3.1-I.3.7.

Время проверяется по часам с погрешностью суточного хода ± 1 мин по ГОСТ 10733.

3.7. Проверку углов наклона (подъема) секций (пп. I.3.2-I.3.4) проводят угловым маятниковым прибором для измерения наклона панели с пределом измерения от 0 до 180° и погрешностью измерения ± 10 или другими средствами, обеспечивающими требуемую точность измерения.

3.8. Проверку самопроизвольного опускания секций дивана кровати (п. I.3.5) проводят следующим образом. Устанавливают углы наклона секций (пп. I.3.2-I.3.4) размещают нагрузку (п. I.3.1) и через 1 час повторяют измерения углов наклона. Значения самопроизвольного опускания секций дивана кровати определяют как разность результатов измерения.

Погрешность средств измерений не должно превышать:

0,5 мм при измерении линейных размеров;

15° при измерении угловых размеров.

3.9. Проверку усилий (пп. I.3.6-I.3.8) проводят динамометром ДПУ-0,1-2-УХЛ 4.2 или ДПУ - 0,5-2-УХЛ 4.2 по ГОСТ 13837, при этом усилия должны быть приложены:

1) усилие перемещения кровати пп. I.3.6-I.3.8 - в заданном направлении по плоскости плиточного или асфальтированного пола;

2) усилие изменения углов наклона секций панели (п. I.3.7 - по касательной к концам рукояток (ручек) механизмов;

Направления приложения усилий должно совпадать с эксплуатационным.

3.10. Проверку устойчивости кроватей на поверхности пола

на. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
2				

ТУ 9452-017-32466639-96 РК

Лист

12

Д 5143-1

(п.1.3.9) проводят шупом по ТУ 2-084-225 класса точности 2 на поверочной плите 2-3-2000х1000 ГОСТ 10905.

3.11. Проверку диаметра колес (п.1.3.10) проводят линейкой 1000 по ГОСТ 427 или другими средствами измерений, обеспечивающими требуемую точность измерения.

3.12. Проверку усилий торможения колес (п.1.3.11) проводят динамометром ДПУ-0,1-2-УХЛ 4.2 по ГОСТ 13837. Направление приложения усилий должно совпадать с эксплуатационным.

3.13. Проверку удобства фиксации съемных приспособлений (п.1.3.12) проводят экспертным методом.

3.14. Методы проверки к воздействию климатических факторов при эксплуатации (п.1.3.14) - по ГОСТ Р 50444.

После испытаний кровати проверяют на соответствие требованиям пп. 1.3.1-1.3.6, 1.3.8, 1.3.9.

3.15. Методы испытаний к воздействию климатических факторов при транспортировании и ²хранении (п.1.3.15) по ГОСТ Р 50444.

После испытаний кровати проверяют на соответствие требованиям пп. 1.3.1-1.3.6, 1.3.8-1.3.10, на отсутствие механических дефектов кроватей.

3.16. Методы испытаний виброустойчивости и удароустойчивости при эксплуатации (п.1.3.16) по ГОСТ Р 50444, при этом кровати проверяют на соответствие требованиям п.п. 1.3.1-1.3.6, 1.3.8 - 1.3.10) в части внешнего вида и на отсутствие механических повреждений.

3.17. Проверка вибропрочности и ударопрочности при транспортировании (п.1.3.17) - по ГОСТ Р 50444, при этом кровати проверяют на соответствие требованиям п.п.1.3.1-1.3.6, 1.3.8-1.3.10 (в части внешнего вида) и на отсутствие механических дефектов кровати и упаковки.

Д 5143-1

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
2				

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	п.	Дата
-----------	---------------	-----------------------	----	------

ТУ 9452-017-32466639-96-94

Лист

13

Формат 11

3.18. Испытания устойчивости к дезинфекции (п.1.3.18) - по ^{МУ 287-113 Д} ~~ОСТ 12-31-2~~ 2-кратным протираанием поверхностей кроватей салфеткой смоченной дезинфицирующим агентом, указанным в п.1.3.18 с интервалом между протирааниями 10-15 мин. Салфетка должна быть отжата. После 5 циклов испытаний кровати должны соответствовать требованиям п.п. 1.3.19, 1.3.20.

3.19. Методы проверки металлических и неметаллических неорганических покрытий (п.1.3.19 - по ГОСТ 9.302 и ГОСТ 9.306).

3.20. Методы проверки лакокрасочных покрытий (п.1.3.20 - по ГОСТ 9.032.

Класс лакокрасочных покрытий проверяется по ГОСТ 9.032.

3.21. Проверку долговечности (п.1.3.21) проводят путем сбора статистических данных.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Кровать транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование кроватей морским транспортом производится в соответствии с "Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов".

Вид отправки - контейнерами и мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

4.2. Условия транспортирования кроватей вида климатического исполнения УХЛ 4.2 - по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.3. Условия хранения кроватей вида климатического исполнения УХЛ 4.2 - по группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Д 5143-1

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3					Дата
---	--	--	--	--	------

ТУ 9452-017-32466639-96 97

Лист
14

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

5.2. Гарантийный срок ^{испыт} эксплуатации ⁹ - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

~~5.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.~~ ²

Д 5143-1

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инс. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата

2					
000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	п.	Дата	

ТУ 9452-017-32466639-9697

Лист
15

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, на которые даны ссылки в технических условиях (за исключением указанных в приложении 2)

Обозначение	Наименование
ГОСТ 9.014-78	ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
ГОСТ 9.032-74	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначение
ГОСТ 9.104-79	ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ 9.301-86	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования
ГОСТ 9.302-88	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Правила приемки и методы контроля
ГОСТ 9.303-84	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 9.306-85	ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения
ГОСТ 12969-67	Таблички для машин и приборов. Технические требования
ГОСТ 14192-77 96 ²	Маркировка грузов

Д 5143-1

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
РД 50-707-89 ^② МУ-287-113 ^③ ОСТ 42-21-2-85	Изделия медицинской техники. Требования к надежности и методы испытаний
ГОСТ Р 51600-2000 ^③	<i>Методические указания по стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы стерилизации изделий медицинского назначения. Классификация изделий медицинского назначения. Общие требования.</i>

Д 5143-1

в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
3				
2				

3				
2				
ООО ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	11.	Дата

ТУ 9452-017-32466639-9697

Лист
17

ПЕРЕЧЕНЬ

приборов, оборудования и материалов,
необходимых для контроля изделий

Наименование	Основные характеристики или обозначение документа
Линейка-1000	ГОСТ 427-75
Рулетка ЭПК2-ЗАНТ/1	ГОСТ 7502-89, предел измерения не менее 2 м, класс точности 2
Весы	ГОСТ 23676-79, пределы взвешивания 200 и 500 кг, цена деления 0,1 кг и 0,5 кг класс точности обычный
Прибор маятниковый угловой	Предел измерения от 0° до 180°, погрешность измерения $\pm 1^\circ$. Аттестован в установленном порядке
Набор грузов массой 18 $\pm$ 1 кг 45 $\pm$ 1 кг 75 $\pm$ 1 кг 90 $\pm$ 1 кг 120 $\pm$ 2 кг 180 $\pm$ 2 кг	Аттестован в установленном порядке
Часы	ГОСТ 10733-79, погрешность суточного хода ± 1 мин
Динамометры растяжения ДПУ-0,1-2-УХЛ 4.2 ДПУ-0,5-2-УХЛ 4.2	ГОСТ 13837-79
Щуп № 3	ТУ 2-034-225-87, класс точности 2
Плита, поверочная 2-3-2000-1000	ГОСТ 20805-86

Д 5143-1



Наименование	Основные характеристики или обозначение документа
Образцы лакокрасочных покрытий	Аттестованные в установленном порядке
Образцы гальванических покрытий	Аттестованные в установленном порядке
Толщиномер покрытий	Погрешность измерения +10%
Мощные средства	ГОСТ 25644-88
Хлорамин Б технический	ТУ 6-01-4689387-16-89
Водорода перекись	ГОСТ 177-88
Камера тепла и холода	Диапазон устанавливаемых температур от минус 50° до +50°С, погрешность поддержания температуры +3°С
Камера влажности	Диапазон устанавливаемых значений относительной влажности от 80 до 100% при температуре +40°С, погрешность поддержания температуры +3°С, влажности +3%
Стенд имитации транспортирования	Погрешность воспроизведения перегрузок от минус 10 до +25%

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Камеры и стенды должны быть аттестованы в установленном порядке.

2. Допускается проводить испытания при помощи других измерительных средств, обеспечивающих ту же точность измерения, при этом арбитражными средствами измерений являются указанные в настоящем перечне.

Д 5143-1



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	использованных					
№1. <i>Титул-лист</i>	—	—	—	—	20		№1. <i>Исходный</i>	<i>ИИ</i>	28.01.1998г.
№2. <i>1-20</i>	—	—	—	—	20		№2. <i>ИИ №2</i>	<i>ИИ</i>	08.06.2005г.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					20

ТУ 9452-017-32466639-9697

"Согласовано"


Генеральный директор
ФГУ "ВНИИИМТ"
Росздравнадзора



Б.И. Ионов
2007 г.

" Утверждаю "

Генеральный директор
ЗАО "МетМедМебель"

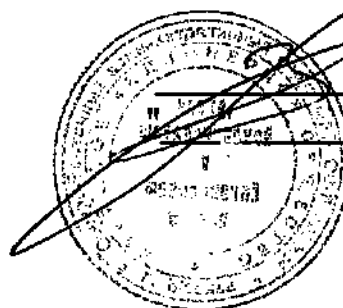

А.Е. Зинин
2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
об изменении ТУ 9452-017-32466639-97
Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ

2007

ЗАО "МетМедМебель"		ИЗВЕЩЕНИЕ 3		ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 9452-017-32466639-97	
ДАТА ВЫПУСКА				Лист 2	Листов 2
ПРИЧИНА		продление срока действия ТУ			КОД 6
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		на заделе не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		с момента регистрации			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		ТУ 9452-017-32466639-97			
РАЗОСЛАТЬ		ФГУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзор			
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
3	1. Титульный лист продлить срок действия ТУ до 02.07.2012 г. 2. Лист 2 дополнить отдельным абзацем в редакции: "Класс в зависимости от потенциального риска применения -1 по ГОСТ Р 51609". 3. Приложение А дополнить : ГОСТ Р 51609-2000 "Изделия медицинские. Классификация зависимости от потенциального риска применения. Общие требования " 4. По тексту заменить: ОСТ 42-2-21 на МУ 287-113 5. Приложение А : исключить ссылку на ОСТ 42-21-85, дополнить ссылкой : МУ-287-113 от 30.12.1998г. "Методические указания по дезинфекции перед стерилизационной очисткой и стерилизации изделий медицинского назначения". 6. Лист2, вводная часть, 4 абзац" приложение 1" заменить на " приложение А", аналогично лист 16. "Приложение2"на "приложение"Б". Аналогично лист 18.				
СОСТАВИЛ Лушникова				Н. КОНТР. ПР. ЗАК.	
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС Лушникова					

ОКП 945200

группа Р 28

Согласовано

Генеральный директор
АООТ "НПО Экран"



Изменение N1

Технические условия
ТУ 9452-017-32466639-97

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КФ-4-0-3ММ

Утверждаю

Генеральный директор
ЗАО "Завод металлопластиковой
и медицинской мебели"
Я. Кацман
1998г.

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
ВНИИстандарт
ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ
ВНЕСЕН В РЕЕСТР 02.06.98
ЗА № 200/016948/04

ОКП 94 5200

Группа Р 28

"Согласовано"

Директор

Г У Н ВНИИИМТ МЗ РФ

В.И. Леонов
22.06.2003



"Утверждаю"

Директор

340 "МетМедМасель"

В.Я. Кацман




ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

об изменении ТУ 9452-017-32466639-97

"Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ"

2003

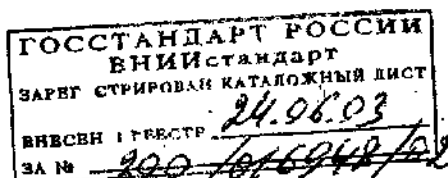

ИАО "МетМед Мебель"		ИЗВЕЩЕНИЕ №2		ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ9452-017-32466639-97	
ДАТА ВЫПУСКА		СРОК ИЗМ.		Лист 2	
				Лис- тов 3	
ПРИЧИНА		продление срока действия ТУ			КОД 6
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		на заделе не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		с момента регистрации			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗММ			
РАЗОСЛАТЬ		ГУН ВНИИИМТ МЗ РФ			
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
2	Титульный лист на листах с Зло20 и в табл. I вводная часть лист 4 п. I.2.2. п. I.3.10. п. п. I.3.14., I.3.15 п. I.3.15 п. I.3.17. п. I.3.21. продлить срок действия ТУ до 02.07.2007г. исправить ТУ 9452-017-32466639-9687 абзацы 4,5,6 исключить; подписать "рис. I Габаритные размеры кровати"; написать "должна быть не более"; изложить в редакции "диаметр колёс кровати должен быть не менее 100мм, 2 самоориентирующ- ихся колеса должны быть оснащены тормозными устройствами"; ГОСТ Р 50444 заменить на ГОСТ 15150; "и хранения" исключить; "для группы 3" исключить; "до списания" исключить, написать "должен быть не менее 3лет"				
СОСТАВИЛ Лушникова		Н. КОНТР ПР. ЗАК.			
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС Лушникова					

ИЗВЕЩЕНИЕ		2	ЛИСТ
			3
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ		
2			

- п.2.1. после ГОСТ Р 50444 поставить точку, остальное исключить, написать "Проверка среднего срока службы(п.1.3.21.) проводится на образцах серийного производства не позднее первого года выпуска и в дальнейшем не реже 1 раза в 3 года";
- табл.2 в колонке 4 п.п.2,3,7,9,10,11,12,13,15,16 поставить "-", в колонке для III везде поставить "+", в поз.12 " и хранения" исключить;
- п.2.5.2. написать " не реже 1 раза в год , кроме испытаний по п.п.1.3.14.-1.3.17., которые проводятся на образцах установочной серии и в дальнейшем при изменении материалов или технологии изготовления";
- п.3.15. "и хранения" исключить;
- п.5.2. "эксплуатации" заменить на "службы";
- п.5.3. исключить;
- приложение I ГОСТ 14192-77 96, РД 50-707 исключить.

- п.1.2.1. изложить в редакции "Табаритные размеры кроватей должны быть не более указанных на рис.1"

Титульный лист наименование изделия изложить в редакции:
"Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗММ"


"Согласовано"

" Утверждаю"


Генеральный директор
ФГУ "ВНИИИМТ"
Росздравнадзора

Генеральный директор

ЗАО "МетМедМебель"

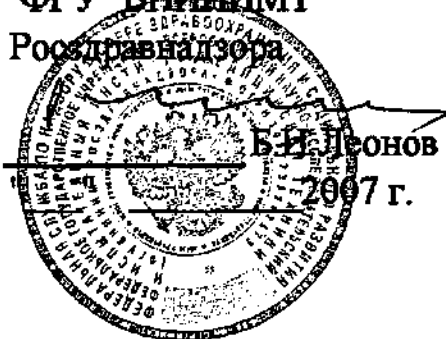

Б.И. Леонов
2007 г.

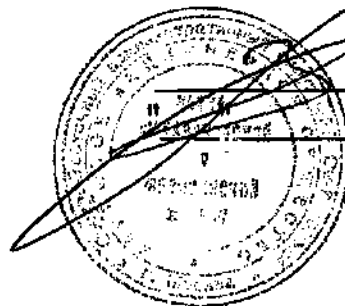

А.Е. Зинин
2007 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №3
об изменении ТУ 9452-017-32466639-97
Кровать медицинская функциональная КФ-4-01-ЗМММ

2007

ЗАО "МетМедМебель"		ИЗВЕЩЕНИЕ 3		ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУ 9452-017-32466639-97	
ДАТА ВЫПУСКА				Лист 2	Листов 2
ПРИЧИНА		продление срока действия ТУ			КОД 6
УКАЗАНИЕ О ЗАДЕЛЕ		на заделе не отражается			
УКАЗАНИЕ О ВНЕДРЕНИИ		с момента регистрации			
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ		ТУ 9452-017-32466639-97			
РАЗОСЛАТЬ		ФГУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзор			
ПРИЛОЖЕНИЕ					
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ				
3	1. Титульный лист продлить срок действия ТУ до 02.07.2012 г. 2. Лист 2 дополнить отдельным абзацем в редакции: "Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по ГОСТ Р 51609". 3. Приложение А дополнить : ГОСТ Р 51609-2000 "Изделия медицинские. Классификация зависимости от потенциального риска применения. Общие требования " 4. По тексту заменить: ОСТ 42-2-21 на МУ 287-113 5. Приложение А : исключить ссылку на ОСТ 42-21-85, дополнить ссылкой : МУ-287-113 от 30.12.1998г. "Методические указания по дезинфекции перед стерилизационной очисткой и стерилизации изделий медицинского назначения". 6. Лист 2, вводная часть, 4 абзац "приложение 1" заменить на " приложение А", аналогично лист 16. "Приложение 2" на "приложение Б". Аналогично лист 18.				
СОСТАВИЛ Лушникова				Н. КОНТР. ПР. ЗАК.	
ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕС Лушникова					



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

620102, г. Екатеринбург,

ул. Ясная, 35

ИНН 6658126476

№ 394

«21» марта 2007 г.

Тел. (343) 231-80-13;

факс (343) 231-80-21

E-mail: omt@ural.ru

ЗАО «Завод металлической и медицинской
мебели»

г. Москва

Тел./факс: (495) 619-03-03; 619-36-90

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

ООО «Отдел медицинской техники», г. Екатеринбург выражает Вам свою благодарность за долгое и плодотворное сотрудничество. Медицинская мебель выпускаемая Вашим предприятием пользуется хорошим и устойчивым спросом среди наших клиентов.

Желаем Вашему заводу дальнейшего развития и процветания.

Начальник
Медицинской мебели

В.Ю.Пригожев

С уважением,
Отв. исполнитель
Титова О.Г.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
№ 16

125080 Москва, ул. Березовая, д. 7
тел./факс 198-21-21


22.08.04. № _____
от _____

Генеральному директору:
ЗАО «Завод металлической и
медицинской мебели
Зинину А.Е.

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Администрация Родильного дома №16 Управления здравоохранения
САО г. Москвы благодарит Вас за длительное сотрудничество. Ваша мебель
устраивает нас по всем параметрам. Радует взаимопонимание и отклик на
наши пожелания.

Главный врач
Родильного дома №16

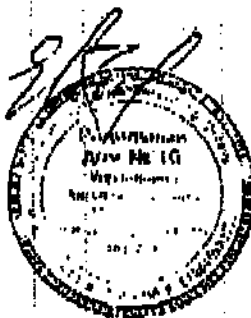

С.Ф. Торубаров

**ООО "МЕДЭК"**поставки, гарантийное
и сервисное обслуживание
медицинского оборудования

121170, Россия, г.Москва, ул.Кульнева, д.1, стр.3

Тел./факс: (095) 933-50-41, 933-50-42, 933-50-43

E-Mail: medeq@co.ru <http://www.ros-expo.ru/medeq>

« 26 » января 2005 г.

ОТЗЫВ

Компания ООО «МЕДЭК» занимающаяся комплексным оснащением медицинских учреждений на протяжении длительного времени плодотворно сотрудничает с ЗАО «Завод металлической и медицинской мебели». Конструкция производимой медицинской и офисной мебели обеспечивает удобство в работе. За время эксплуатации претензий к качеству производимой мебели не отмечалось.

Следует отметить надежность производимой продукции.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С Уважением
Директор
Днега С.С.



Уважаемый Алексей Евгеньевич!

ООО «ПромСтройСервис» благодарит возглавляемое Вами предприятие за плодотворное сотрудничество в 2005-2007 годах. На протяжении всего срока совместной работы нами не получено от наших покупателей ни одной рекламации на качество продукции. Хочу также поблагодарить Вас за исключительно аккуратное исполнение срока поставок.

Желаем вверенному Вам предприятию дальнейшего процветания и стабильности.

С уважением,
Директор ООО «ПромСтройСервис»



А. С. Лебедев
22.03.2007г.

Общество с ограниченной ответственностью

"Снабжение Регион"

129090, г. Москва ул. Щепкина, д. 25/20,
(495) 731-75-26, 321-54-17
Филiaal в г. Курган, (3522) 46-59-45
region_snab50@mail.ru

Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810400000000575
ЗАО «Банк долгосрочного
кредитования» г. Москва,
к/с 30101810600000000546,
БИК 044583546, ИНН 7702562758,
КПП 770201001 ОКНО 77322228

Иск. № 110/22

ООО «Снабжение Регион», г. Курган благодарит Ваше предприятие за сотрудничество. За все время работы в отношении изготавливаемой Вашим предприятием медицинской мебели от наших клиентов не получено ни одной претензии на качество продукции.

Прошу Вас на 2007 год заключить договор с 5 % скидкой.
Желаем Вашему заводу дальнейшего развития и процветания.

С уважением,

Ген. Директор



С.И.Каширин

27.03.2007 16:26:23

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 211

27.03.2007

01

Сумма
прописью

Одна тысяча пятьсот рублей

Дата

Вид платежа

ИНН 7717006834	КПП 771701001	Сумма	1500=		
ЗАО "Завод металлической и медицинской мебели"			Сч. №	40702810638090103881	
Платательщик		БИК		044525225	
СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Г.МОСКВА			Сч. №	30101810400000000225	
Банк плательщика		БИК		044583001	
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ Г.МОСКВА 705			Сч. №		
Банк получателя		Сч. №		40101810800000010041	
ИНН 7710537160	КПП 771001001		Вид оп.	01	Срок плат.
УФК по г.Москве (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития)		Очер. плат.			
Получатель		Наз. пл.	Рез. поле		
06010807081011000110	45286585000	Код		27.03.2007	ГП

Госпошлина за регистрацию мед.техники (Кровать медицинская функциональная).
Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

ЭЦП № 1507758257 Зинин А. Е.

М. П.

с одной подписью

МЕЩАНСКОЕ ОСБ 7811/01709 МЕЩАНСКОЕ ОСБ 7811/01709
БИК 044525225 БИК 044525225
ЛЕВАШОВА Г.Н. ЛЕВАШОВА Г.Н.
27 MAR 2007 27 MAR 2007