

Общество с ограниченной ответственностью
< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г.Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка-кровать для новорожденных
передвижная

ТКНм-01-ЗМММ
ТУ-9451-002-32466639-2002

Назначение

Тележка-кровать для новорожденных передвижная ТКНм-01-ЗМММ предназначена для ухода за грудными детьми.


Применяется как для оснащения родильных домов, так и для лечебно-профилактических детских медицинских учреждений.

Технические данные:

Габариты:

длина	720мм
ширина	492мм
высота	975мм
масса не более	15кг
допустимая нагрузка не более	10кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

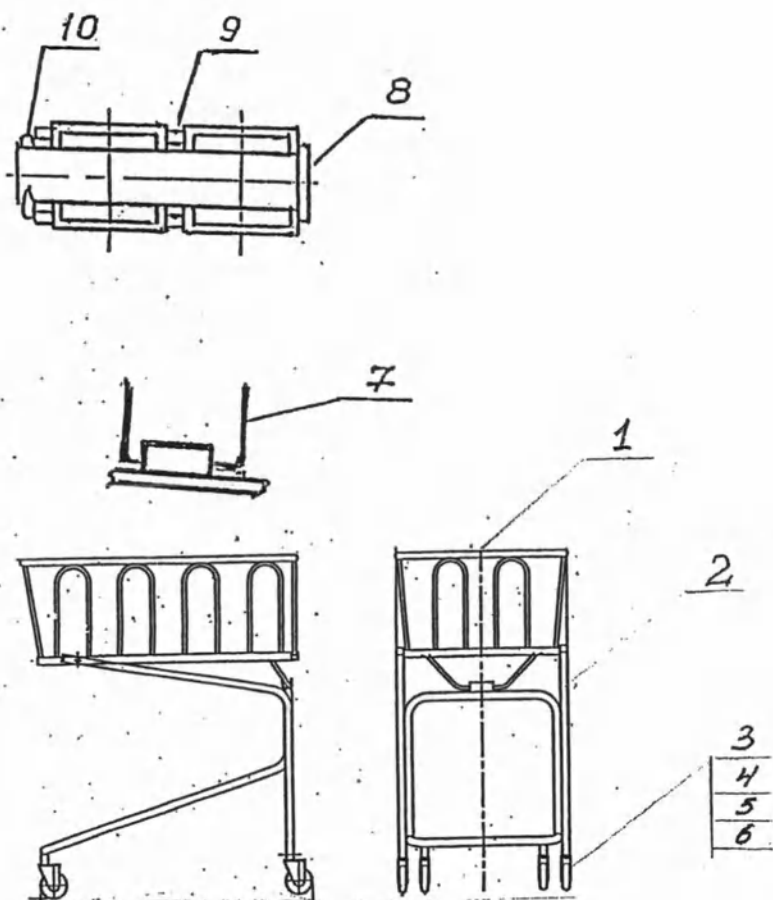

Комплект поставки:

1. Кювета (поз. 1) – 1 шт.
2. Каркас (поз. 2) – 1 шт.
3. Колесо $\varnothing$ 75 без тормоза (поз. 3) – 3 шт.
4. Колесо $\varnothing$ 75 с тормозом (поз. 4) – 1 шт.
5. Болты М10х20 (поз. 5) – 4шт.
6. Шайбы 10.65Г.2,5 (поз. 6) – 4 шт.
7. Упор
8. Ось
9. Шайба 10.01.05
10. Шплинт 2,5х20

Матрац

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

1. Привернуть колеса (поз. 3 и 4) к ножкам каркаса (поз. 2) болтами М10х20 через шайбу 10.65Г.2,5. Усилие зажима болтов для крепления колес (поз. 8 и 9) – не менее 40 Нм.
2. Установить кювету (поз. 1), как показано на рисунке.
3. Для установки кюветы в наклонное положение – приподнять подвеску со стороны поручня снять с упора и опустить кювету.

Примечание: Колесные опоры с тормозом (поз.4) установить со стороны поручня. Периодически, проверять крепление колес к ножкам каркаса и периодически производить подтяжку крепежа колес. Перемещение тележки внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенным тормозом.

Хранение:

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части тележки имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа <Лотос> или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК

Общество с ограниченной ответственностью

< ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ МЕБЕЛИ >

Россия 127521, г. Москва
12-й проезд Марьиной рощи, д. 8
тел. 619-26-38, факс. 618-51-31

ПАСПОРТ

Тележка-кровать для новорожденных
передвижная

ТКНп-01-ЗМММ
ТУ-9451-001-32466639-2004

Назначение

Тележка-кровать для новорожденных передвижная четырехместная ТКНп-01-3МММ предназначена для ухода за грудными детьми.

Применяется как для оснащения родильных домов, так и для лечебно-профилактических детских медицинских учреждений.


Технические данные:

Габариты:

длина	1990мм
ширина	748мм
высота	870мм
масса не более	30кг
допустимая нагрузка не более	60кг

Средний срок эксплуатации не менее 5 лет

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ25.В00666 срок действия по 05.10.2010г.

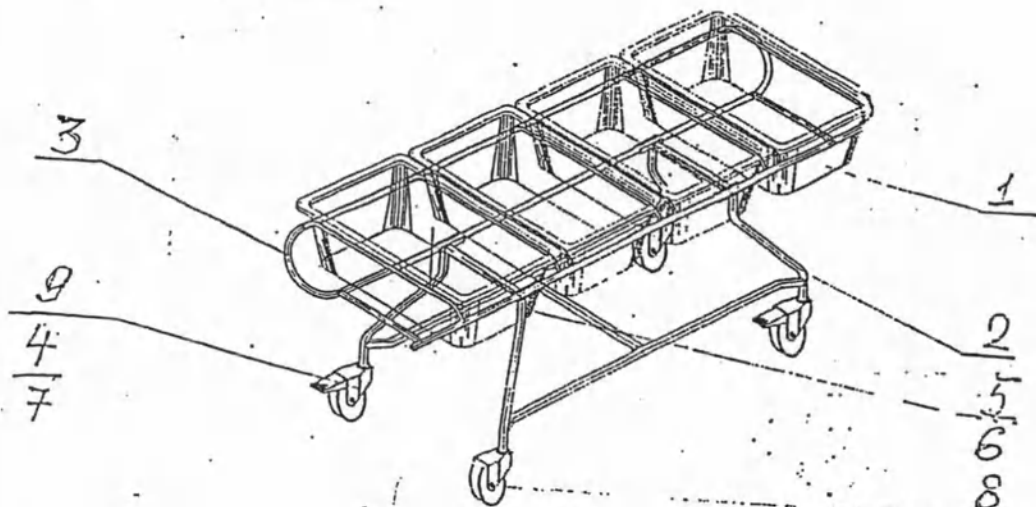

Комплект поставки:

1. Кювета (поз. 1) – 4 шт.
2. Каркас (поз. 2) – 1 шт.
3. Колесо без тормоза (поз. 3) – 3 шт.
4. Колесо с тормозом (поз. 4) – 1 шт.
5. Болты М10х20 (поз. 5) – 4шт.
6. Шайбы 10.65Г.2,5 (поз. 6) – 4 шт.
7. Упор
8. Ось
9. Шайба 10.01.05
10. Шплинт 2,5х20

Матрац

Инструкция по монтажу и эксплуатации:

1. Привернуть колеса (поз. 3 и 4) к ножкам каркаса (поз. 2) болтами М10х20 через шайбу 10.65Г.2,5. Усилие зажима болтов для крепления колес (поз. 3 и 9) – не менее 40 Нм.
2. Установить кювету (поз. 1), как показано на рисунке.
3. Для установки кюветы в наклонное положение – приподнять подвеску со стороны поручня снять с упора и опустить кювету.

Примечание: Колесные опоры с тормозом (поз.4) установить со стороны поручня. Периодически, проверять крепление колес к ножкам каркаса и периодически производить подтяжку крепежа колес.

Перемещение тележки внутри корпуса осуществлять по ровному полу, с отключенным тормозом.

Хранение:

Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от -50 до +40С в относительной влажности воздуха 80%.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

Все металлические части тележки имеют защитно-декоративное полимерное покрытие.

Дополнительной консервации не требуется.

При необходимости тележку подвергнуть дезинфекции 3-процентным раствором перекиси водорода с добавлением полупроцентного моющего средства типа «Лотос» или тампоном, смоченным 1-процентным раствором хлорамина (тампоны должны быть отжаты).

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок тележки составляет 12 месяцев со дня начала эксплуатации, но не позднее 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения покупателем требований настоящего паспорта.

Дата выпуска

Представитель ОТК