

Руководство по эксплуатации

Столик-тележка медицинская инструментальная «Медицинофф» с принадлежностями, варианты исполнения: F-2, F-17, F-20, F-19, F-21, F-16

ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМН:

«Hebei Pukang Medical Instruments CO.,LTD», Hebei Province 072550 China

Телефон: 86-312-859-2888; Факс: 86-312-859-2026.

«УТВЕРЖДАЮ»


Генеральный директор

ООО «Медицинофф»

Белоглазов А.В.



2010г.

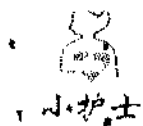


河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

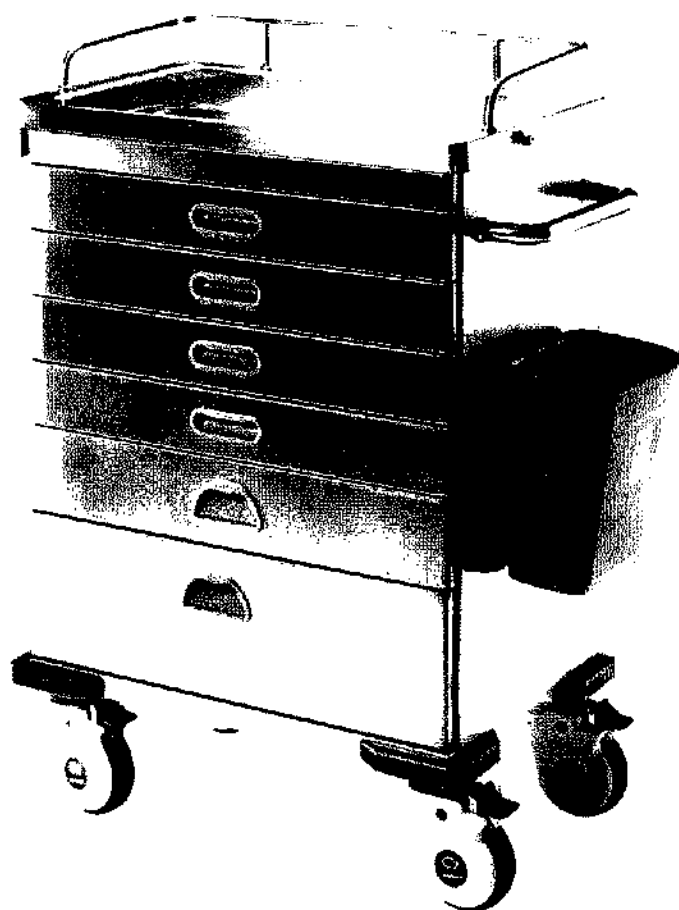

Столик – тележка медицинский инструментальный F-2 «МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКЦИЯ: предназначена для оказания неотложной медицинской помощи пациентам.

Изготовлена из прочной нержавеющей стали.

СТРУКТУРА: корпус выполнен из нержавеющей стали 08F.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ: рабочая плоскость с бортиком из нержавеющей стали; легкость чистки.

БУКСИРНАЯ РУКОЯТКА: буксирная рукоятка выполнена из нержавеющей стали.

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: система общего центрального замка и модульные выдвижные ящики. Ящики изготовлены из материала с мягкими направляющими для глушения стука при закрывании.

СТАНДАРТНЫЕ ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ: внутренние габаритные размеры первых трех ящиков: 526*380*57 мм, внутренние размеры – 526*380*280 мм.

СИСТЕМА ЗАМКА: система центрального замка.

ЛЕВАЯ СТОРОНА: 1 корзины для мусора.

КОЛЕСА: четыре бесшумных колеса диаметром 5 дюймов; два колеса имеют фиксирующиеся тормоза.

БАМПЕР: имеется 4 противоударных бампера.

К тележке прилагаются вспомогательные принадлежности.

Габаритные размеры: (Д)650 × (Ш)420 × (В)1020 мм

Обязательства обслуживания

- а) Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты приобретения. Отдельные запасные детали поставляются в течение всей службы изделия.
- б) В течение гарантийного срока по поводу обслуживания обращайтесь к дилеру. За продукцию, реализуемую на Европейском рынке, ответственность несет доверенное лицо ЕЕА, назначенное нашей компанией.




河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

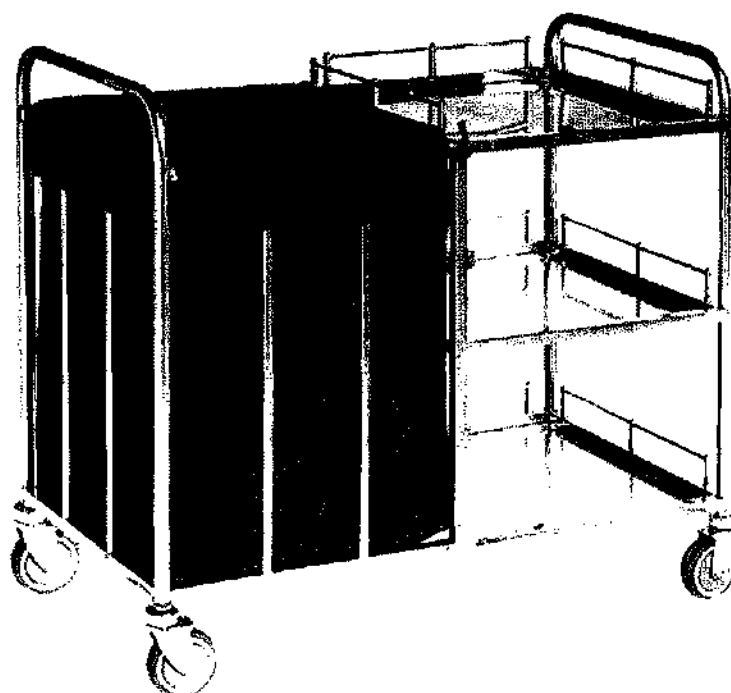

Столик – тележка медицинский инструментальный F-16 «МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТРУКТУРА: корпус тележки выполнен из нержавеющей стали.

СТАНДАРТНЫЕ ПОЛКИ: 3 полки с бортиками, выполнены из нержавеющей стали, обеспечивающие легкость чистки.

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ: рабочая плоскость – высококачественный конструкционный материал с бортами из нержавеющей стали; легкость чистки.

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ: предназначен для грязного белья, выполнен из непромокаемой ткани.

КОЛЕСА: четыре колеса, диаметром – 100 мм.


Габаритные размеры: (Д)950 × (Ш)500 × (В)900 мм

Инструкция по обслуживанию

1. Изделие запрещено использовать для транспортировки тяжелых предметов.
2. Подлежит регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медучреждения.
3. Беречь от деформаций и ударов.
4. Поверхности следует протирать мягкой тканью.
5. Движение разрешено только по гладкой поверхности.
6. Гарантия качества – 1 год.

Инструкция по защите

1. Расшатанные стойки со всех сторон и ролики подлежат ремонту.
2. Раз в 6 месяцев ролики следует смазывать натриевой консистентной смазкой.
3. Стальные шарики по ходу движения выдвижных ящиков следует смазывать каждые 3 месяца.

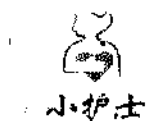

河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации



Столик – тележка медицинский инструментальный F-17 «МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- a. Основной каркас и полки стола выполнены из нержавеющей стали.
- b. Простота сборки.
- c. Колеса диаметром – 100 мм.
- d. Лоток для стерилизации принадлежностей.
- e. Выдвижной поднос из нержавеющей стали.
- f. Лоток из нержавеющей стали.
- g. Ведро из пластика.
- h. Габаритные размеры: (Д)640×(Ш)420×(В)800 мм

Инструкция по обслуживанию

- 1. Изделие запрещено использовать для транспортировки тяжелых предметов.
- 2. Подлежит регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медучреждения.
- 3. Беречь от деформаций и ударов.
- 4. Поверхности следует протирать мягкой тканью.
- 5. Движение разрешено только по гладкой поверхности.
- 6. Гарантия качества – 1 год.

Инструкция по защите

- 1. Расшатанные стойки со всех сторон и ролики подлежат ремонту.
- 2. Раз в 6 месяцев ролики следует смазывать натриевой консистентной смазкой.
- 3. Стальные шарики по ходу движения выдвижных ящиков следует смазывать каждые 3 месяца.




河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

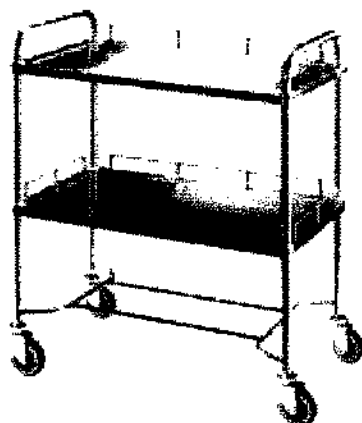

Столик – тележка медицинский инструментальный F-19 «МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- a. Основной каркас, полки и бортик стола выполнены из нержавеющей стали.
- b. Простота сборки.
- c. Колеса диаметром – 100 мм.
- d. Габаритные размеры: (Д)750×(Ш)470×(В)925 мм

Инструкция по обслуживанию

- 1. Изделие запрещено использовать для транспортировки тяжелых предметов.
- 2. Подлежит регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медучреждения.
- 3. Беречь от деформаций и ударов.
- 4. Поверхности следует протирать мягкой тканью.
- 5. Движение разрешено только по гладкой поверхности.
- 6. Гарантия качества – 1 год.

Инструкция по защите

- 1. Расшатанные стойки со всех сторон и ролики подлежат ремонту.
- 2. Раз в 6 месяцев ролики следует смазывать натриевой консистентной смазкой.
- 3. Стальные шарики по ходу движения выдвижных ящиков следует смазывать каждые 3 месяца.




河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

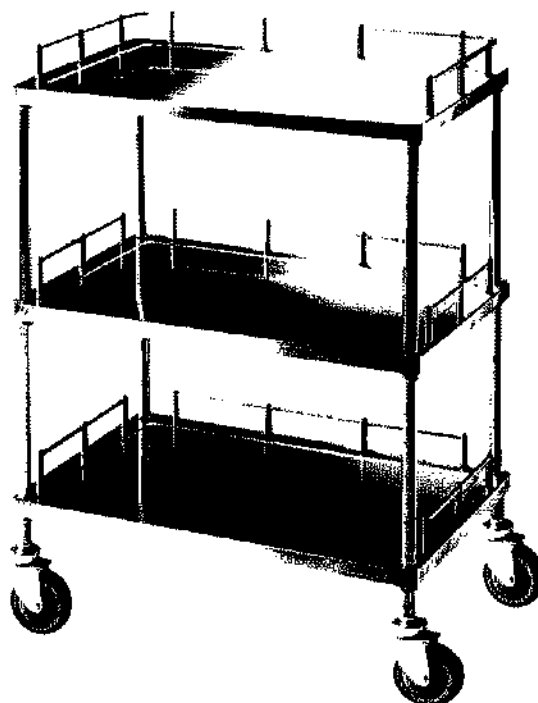

Столик – тележка медицинский инструментальный F-20 «МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- a. Основной каркас, полки и бортик стола выполнены из нержавеющей стали.
- b. Простота сборки.
- c. Колеса диаметром – 100 мм.
- d. Габаритные размеры: (Д)660×(Ш)440×(В)870 мм

Инструкция по обслуживанию

- 1. Изделие запрещено использовать для транспортировки тяжелых предметов.
- 2. Подлежит регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медучреждения.
- 3. Беречь от деформаций и ударов.
- 4. Поверхности следует протирать мягкой тканью.
- 5. Движение разрешено только по гладкой поверхности.
- 6. Гарантия качества – 1 год.

Инструкция по защите

- 1. Расшатанные стойки со всех сторон и ролики подлежат ремонту.
- 2. Раз в 6 месяцев ролики следует смазывать натриевой консистентной смазкой.
- 3. Стальные шарики по ходу движения выдвижных ящиков следует смазывать каждые 3 месяца.

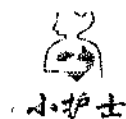


河北普康医疗设备有限公司

HEBEI PUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

HEBEI PU KANG MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации

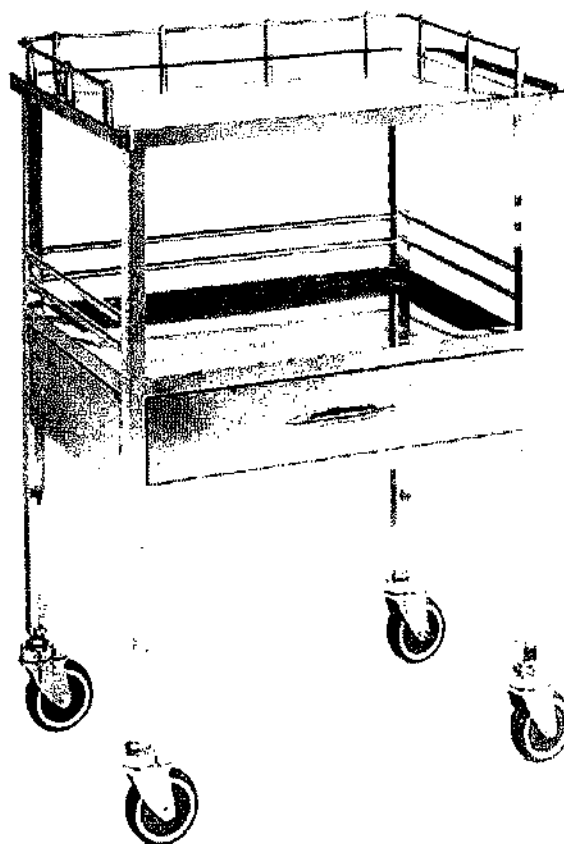

**Столик – тележка медицинский
инструментальный**

F-21

«МЕДИЦИНОФФ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- a. Основной каркас, полки и бортик стола выполнены из нержавеющей стали.
- b. Простота сборки.
- c. Выдвижной ящик изготовлен из нержавеющей стали.
- d. Колеса диаметром – 100 мм.
- e. Габаритные размеры: (Д)640×(Ш)450×(В)990 мм

Инструкция по обслуживанию

- 1. Изделие запрещено использовать для транспортировки тяжелых предметов.
- 2. Подлежит регулярной стерилизации в соответствии с требованиями медучреждения.
- 3. Беречь от деформаций и ударов.
- 4. Поверхности следует протирать мягкой тканью.
- 5. Движение разрешено только по гладкой поверхности.
- 6. Гарантия качества – 1 год.

Инструкция по защите

- 1. Расшатанные стойки со всех сторон и ролики подлежат ремонту.
- 2. Раз в 6 месяцев ролики следует смазывать натриевой консистентной смазкой.
- 3. Стальные шарики по ходу движения выдвижных ящиков следует смазывать каждые 3 месяца.